

Spis treści

Spis treści	1
1 Wstęp	1
2 Przed użyciem	1
3 Montaż	2
4 Obsługa	2
5 Konserwacja	2
6 Dane techniczne	3

1 Wstęp

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście wybierając wyroby **VERMEIREN**.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwa wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja informacji zamieszczonych w instrukcji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.

2 Przed użyciem

2.1 Przy dostawie

Rozpakuj produkt i sprawdź, czy dostawa jest kompletna. Powinna obejmować wymienione poniżej pozycje:

- tapicerowana deska toaletowa i inakładane siedzisko
- zawieszany pojemnik toaletowy z przykrywką
- instrukcja postępowania

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2.2 Przewidziane zastosowanie

Wskazania i przeciwwskazania: Mobilna, wielokrotnego użytku komoda toaletowa do użytku wewnątrz pomieszczeń, przeznaczone dla użytkowników cierpiących na nietrzymanie moczu lub mających problemy z poruszaniem się. Powinien nie mogą być używane do brania prysznica, do składowanie, jako drabina lub nad wbudowaną częścią składową toalety.

Krzesło toaletowe zostało zaprojektowane i jest produkowane wyłącznie w celu używania jako pomoc toaletowa dla jednej osoby o maksymalnej wadze 120 kg.

2.3 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń

Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie krzesła toaletowego.

- Przy ustawianiu krzesła i podczas transportu należy uważać na stłuczenia i ścinanie - niebezpieczeństwo zranienia.
- Nie chwytać się na boki dalej niż pozwala na to długość ramienia, w przeciwnym razie krzesło może się przewrócić.
- Przed siadaniem upewnić się, że krzesło stoi na płaskiej poziomej powierzchni -- Ryzyko przewrócenia.
- Nie przechylać się zbyt daleko do przodu- Ryzyko przewrócenia.
- Pamiętaj, że pewne części krzesła toaletowego mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze itp. Zachowaj ostrożność, kiedy ich dotykasz.
- Należy zawsze ściągnąć pojemnik przed transportem.
- Należy zawsze po użyciu krzesła natychmiast opróżnić zawartość pojemnika.

PL

- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/ konserwację.

3 Montaż

Krzeselko toaletowe jest dostarczane w stanie zmontowanym. Pojemnik sanitarny powinien być zawieszony na zaczepach pod siedziskiem. Gdy krzeselko nie jest używane otwór toaletowy powinien być zakryty poduszką, która jest wyposażeniem standardowym.

4 Obsługa

- Należy zawsze ściągnąć pojemnik przed transportem.
- Należy zawsze po użyciu krzesła natychmiast opróżnić zawartość pojemnika.
- Wlej trochę wody na górną krawędź pojemnika sanitarnego w ten sposób uszczelni się on w sposób hermetyczny po zatankowaniu przykrywką i uniknie się nieprzyjemnego zapachu.

5 Konserwacja

5.1 Czyszczenie

Do mycia krzesła toaletowego używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Nie namaczaj przez dłuższy czas. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

5.2 Dezynfekcja

Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki i letniej wody z delikatnym środkiem dezynfekującym aby wyczyścić krzesło toaletowe.

W przypadku poważnego lub trwałego zanieczyszczenia należy rozważyć wymianę kubła toaletowego i wyściełanych siedzeń.

5.3 Kontrole / serwisowanie / naprawy

Oczekiwany okres użytkowania krzesła toaletowego wynosi 5 lat. Trwałość jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem krzesła toaletowego, należy sprawdzić niżej wymienione punkty:

- Sprawdzić ramę pod kątem odkształceń plastycznych i ograniczonego funkcjonowania..
- Kontrola wzrokowa uszkodzeń lakieru (niebezpieczeństwo korozji).
- Sprawdzić stan poduszek (łzy, kruchość, moczenie).
- Uszczelnienie łyżki (nie w przypadku ponownego użycia)
- Gumowe końcówki na nogach: bez brakujących lub uszkodzonych końcówek
- Kompletność przesyłki?
- Dostępna instrukcja obsługi?

Krzesło toaletowe skonstruowane jest z stalowych i plastikowych elementów. Zalecamy przeprowadzać inspekcję stanu technicznego krzesła toaletowego przynajmniej raz na rok, ale częstotliwość serwisu zależy od częstotliwości i intensywności użytkowania. Skonsultuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu uzgodnienia częstotliwości serwisu.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren. Warto korzystać z usług oferowanych przez wyspecjalizowanego sprzedawcę. On/ona chętnie udzieli pomocy w zakresie serwisu i napraw.

5.4 Ponowne użycie

Przed każdym ponownym użyciem krzesła toaletowego należy poddać dezynfekcji, przeglądowi i serwisowaniu zgodnie z instrukcjami w niniejszym rozdziale.

5.5 Usuwanie odpadów

Po zakończeniu użytkowania należy poddać krzesło toaletowe utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest demontaż krzesła toaletowego, w celu ułatwienia transportu części nadających się do przetworzenia.