

Spis treści

Spis treści	1
1 Wstęp	1
2 Przed użyciem	1
3 Montaż	2
4 Obsługa	2
5 Konserwacja	2
6 Dane techniczne	3

1 Wstęp

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście wybierając wyroby **VERMEIREN**.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli ona na zapoznanie się z działaniem, możliwościami i ograniczeniami.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwa wyspecjalizowanym sprzedawcą. Sprzedawca chętnie służy pomocą.

Ważna uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres użytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego oraz regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie.

Dostępne informacje

W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze znajduje się najnowsza wersja informacji zamieszczonych w instrukcji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją przy użyciu oprogramowania zamieniającego tekst na mowę.

2 Przed użyciem

2.1 Przy dostawie

Rozpakuj produkt i sprawdź, czy dostawa jest kompletna. Powinna obejmować wymienione poniżej pozycje:

- tapicerowana deska toaletowa i inakładane siedzisko
- zawieszany pojemnik toaletowy z przykrywką
- instrukcja postępowania

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2.2 Przewidziane zastosowanie

Wskazania i przeciwwskazania: Mobilna, wielokrotnego użytku komoda toaletowa do użytku wewnątrz pomieszczeń, przeznaczone dla użytkowników cierpiących na nietrzymanie moczu lub mających problemy z poruszaniem się. Powinien nie mogą być używane do brania prysznica, do składowanie, jako drabina lub nad wbudowaną częścią składową toalety.

Krzesło toaletowe zostało zaprojektowane i jest produkowane wyłącznie w celu używania jako pomoc toaletowa dla jednej osoby o maksymalnej wadze 120 kg.

2.3 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń

Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie krzesła toaletowego.

- Przy ustawianiu krzesła i podczas transportu należy uważać na stłuczenia i ścinanie - niebezpieczeństwo zranienia.
- Nie chwytać się na boki dalej niż pozwala na to długość ramienia, w przeciwnym razie krzesło może się przewrócić.
- Przed siadaniem upewnić się, że krzesło stoi na płaskiej poziomej powierzchni -- Ryzyko przewrócenia.
- Nie przechylać się zbyt daleko do przodu- Ryzyko przewrócenia.
- Pamiętaj, że pewne części krzesła toaletowego mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze itp. Zachowaj ostrożność, kiedy ich dotykasz.
- Należy zawsze ściągnąć pojemnik przed transportem.
- Należy zawsze po użyciu krzesła natychmiast opróżnić zawartość pojemnika.

PL