

konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

3.3 Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać dopuszczalnej wagi obciążeniowej na krzesła prysznicowe (130 kg na krzesła prysznicowe).
- Używaj krzesła prysznicowego tylko w płaszczyźnie horyzontalnej, na nie gładkiej zamkniętej powierzchni. Wszystkie 4 nogi powinny dotykać podłoża.
- Należy trzymać z dala od dzieci. Krzesła prysznicowe nie służy do zabawy dla dzieci.
- Jeżeli krzesło prysznicowe używane jest przez dzieci lub w ich pobliżu, oraz używane jest przez osoby niepełnosprawne to potrzebny jest nadzór.
- Istnieje ryzyko poparzenia - Należy zachować ostrożność podczas przewożenia przy bardzo wysokich i niskich temperaturach przez dłuższy czas i przy kontakcie ze skórą.
- Nie używaj krzesła prysznicowego kiedy nie działa właściwie.
- Sprawdź czy krzesło toaletowe jest kompletne prze użyciem.
- Sprawdź czy krzesło prysznicowe jest całkowicie rozłożone przed.
- Nie podnoś krzesła toaletowego gdy ktoś na nim się znajduje - Ryzyko urazu lub uszkodzenia.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i serwisu. Producent nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez nie właściwe użytkowanie i konserwację.

3.4 Symbole na krzeselku prysznicowym



Waga maksymalna



CE deklaracja




Oznaczenie typu

4 Montaż

4.1 Montaż / Demontaż oparcia

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko urazu - sprawdź, czy oparcie jest odpowiednio zamocowane.

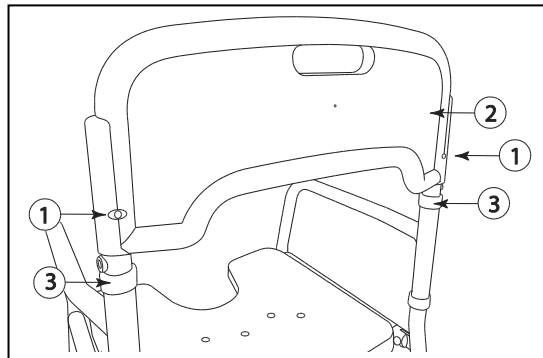

Mocowanie oparcia:

- Zamontuj oparcie ② na dwóch bocznych rurach tubes ③ wciskając sprężynki zabezpieczające ① w odpowiednich otworach do momentu gdy usłyszysz click.
- Sprawdź, czy oparcie jest odpowiednio zamocowane.


Demontaż oparcia:

- Wcisnij dwie sprężynki blokujące ① znajdujące się rurkach oparcia.
- Przesuń oparcie ② do góry wzdłuż rurek oparcia ③.

4.2 Składanie / Rozkładanie krzesła prysznicowego

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu - Sprawdź czy krzesło prysznicowe jest całe rozłożone przed użytkowaniem.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko przyskrzynienia - Nie wkładaj palcy, klamer i ubrania do strefy uwięzienia elementów zewnętrznych.

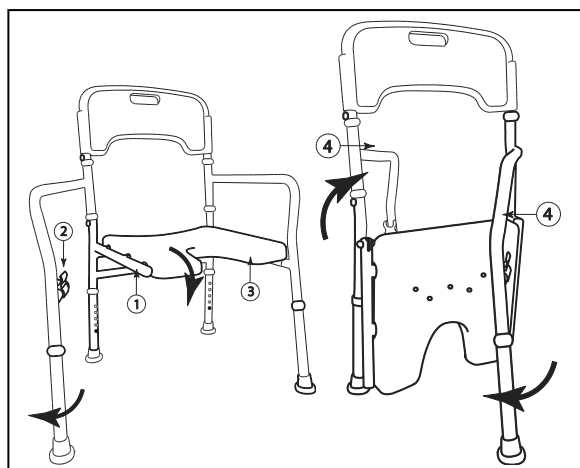

Do transportu krzesła prysznicowego w samochodzie czy samolocie należy je złożyć.

4.2.1 Składanie krzesła prysznicowego

- Podnieś rurkę siedziska ① z dwóch mocujących ją klipsów ②.
- Przesuń siedzenie ③ w dół.
- Złóż jedną stronę ramy ④ do siedziska.
- Złóż drugą stronę ramy ④ do drugiej strony siedziska.


4.2.2 Rozkładanie krzesła prysznicowego

- Rozłóż obydwie strony ramy ④ na strony.
- Pociągnij siedziska ③ do góry.
- Wciśnij rurkę siedziska ① w dwa plastikowe klipsy ②.

5 Użytkowanie krzesła pod prysznicem

5.1 Regulacja wysokości siedziska

- ⚠ **PRZESTROGA: Ryzyko upadku –** Dobrze umocuj siedzisko przed użyciem krzesła prysznicowego. Sprawdź czy sprężynki blokujące ① znajdują się w wyznaczonych otworach.
- ⚠ **PRZESTROGA: Ryzyko upadku –** Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu wysokości rączek do pchania. Krzesło prysznicowe utraci stabilność.
- ⚠ **PRZESTROGA: Ryzyko przewrócenia –** Wszystkie cztery nogi powinny znajdować się na tej samej wysokości.

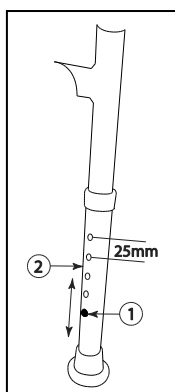

Przed użyciem krzesła prysznicowego, należy siedzisko ustawić na prawidłowej wysokości.

Wysokość położenia siedziska może być regulowana w następujący sposób:

- Wciśnij sprężynkę blokującą ①.

- Przesuń nogi ② do pożądanego przez Ciebie wysokości. (5 różnych pozycji: miarka co 25 mm).
- Sprawdź czy sprężynka zabezpieczająca ① kliknęła i znalazła się w prawidłowym otworze.
- Ustaw drugie nogi w takim samym sposób.
- Sprawdź czy wszystkie nogi są w tej samej pozycji.

5.2 Przenoszenie krzesła prysznicowego

Najlepszy sposób na przeniesienie krzesła prysznicowego to złapanie go za odpowiedni otwór w oparciu bądź złapanie za dwa podłokietniki.

6 Konserwacja

6.1 Czyszczenie i dezynfekcja

Do mycia ławki wannowej używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i letniej wody z dodatkiem łagodnego, domowego mydła. Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia środka czyszczącego. Nie namaczaj przez dłuższy czas. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

W przypadku użytkowania w placówkach opieki długoterminowej należy przestrzegać wewnętrznych instrukcji dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

6.2 Kontrole / serwisowanie / naprawy

Przewidywany okres użytkowania krzesła prysznicowego wynosi 5 lat. Trwałość jest zależna od jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, serwisowania i czyszczenia.

Przed ponownym użyciem krzesła pod prysznic należy sprawdzić następujące punkty:

- Rama (odkształcenia, stabilność, połączenia).

Krzesło prysznicowe jest z elementów aluminiowych i plastikowych.

Naprawa i wymiana części mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vermeiren. Warto korzystać z usług oferowanych przez