

BEZPIECZEŃSTWO

-  Leżak kąpielowy PEPI jest przyrządem terapeutycznym i winien być używany pod nadzorem!
-  Używać tylko na płaskich, równych powierzchniach!

PIELĘGNACJA

Aby Państwa wyrób zachowywał odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą pielęgnację. W osiągnięciu tego celu pomocne będą poniższe wskazówki.

Tapicerka

Tapicerka jest zdejmowana i może być prana w pralkach (w temperaturze maksymalnej 60° C) Zaleca się pranie w powłóczkach lub siatkach

-  Przy mocnym zabrudzeniu czyścić ręcznie z zastosowaniem łagodnych środków piorących
-  Nie wolno czyścić tapicerki bardzo mocnymi środkami np. rozpuszczalnikami czy środkami żrącymi; niewskazane jest też używanie twardych szczotek,
-  Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących nie ponosimy odpowiedzialności,
-  Czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane.

Elementy z tworzywa sztucznego

Detale takie czyścić należy ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka.

Powłoki zewnętrzne

Zastosowane anodowanie ma duże znaczenie estetyczne i chroni konstrukcję przed korozją. Powłoki te nie stawiają szczególnych wymogów przy czyszczeniu (zwykle wytarcie wilgotną czy suchą szmatką jest wystarczające).

Dezynfekcja

Dezynfekcji dokonywać można ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. Pamiętać należy, że mogą one przenikać do wnętrza obić tapicerskich.

-  W trakcie zabiegu używać należy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta takiego środka,
-  Wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie obciążają producenta wyrobu dezynfekowanego.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj wózek wyłącznie w suchych pomieszczeniach (od + 5°C do + 45°C).
- Względna wilgotność powietrza: 30–70%.
- Dopilnuj, aby zabezpieczyć wózek przed korozją (np. na skutek działania słonej wody, morskiego powietrza, piasku, kurzu), stosując odpowiednie przykrycie lub opakowanie.
- Wszystkie zdemontowane części przechowuj w jednym miejscu (w razie konieczności odpowiednio je oznacz), aby przy montażu nie pomylić ich z innymi elementami.
- Wszystkie części konstrukcyjne nie powinny być w żaden sposób obciążone podczas przechowywania.