

INSTALACJA

Materac Vicair® Academy 415 jest gotowy do użycia.

Zalecamy przeprowadzenie następujących kontroli podczas pierwszego użycia, najlepiej razem z opiekunem / terapeutą.

Sprawdzanie rozmiaru materaca

Upewnij się, że materac pasuje do wymiarów łóżka, na którym ma być używany. Materac można ustawić w dowolnej pozycji ramy łóżka

Test „dna”

Twoje ciało powinno być w pełni podparte, aby żadna część nie mogła zetknąć się z materacem bazowym. Wykonanie testu „dna” należy przeprowadzić przy pierwszym użyciu i po odpowiednim wypełnieniu komór materaca.

Nie używaj materaca, jeśli jakaś część ciała styka się z materacem bazowym. W większości przypadków odpowiednie wypełnienia komór rozwiąże problem.

Regulacja wypełnienia materaca

W razie potrzeby można regulować twardość materaca, usuwając (lub dodając) komórki SmartCells™ z różnych komór materaca.

UŻYCIE

Regularnie sprawdzaj zaczerwienienie skóry

Regularnie sprawdzaj zaczerwienienie skóry, szczególnie w ciągu pierwszych kilku dni. Jeśli wystąpi silne zaczerwienienie, zaprzestań przestań używać materaca. Skonsultuj się z terapeutą lub sprzedawcą.

Transfer

Upewnij się, że masz dobre wsparcie podczas transferu na i z materaca. Wykonuj transfer w najniższej pozycji łóżka, najlepiej lekko pochylając się do tyłu (kolana wyżej niż biodra). Uważaj, aby nie zsunąć pokrowca wierzchniego, siedząc na krawędzi materaca.

Używanie na dużej wysokości

Ponieważ każda komórka SmartCell™ jest wypełniona powietrzem, materac może zachowywać się inaczej, gdy jest używany na dużej wysokości lub w samolocie. W takich okolicznościach twardość materaca można regulować, usuwając kilka komórek z każdego przedziału. Vicair zaleca, aby nie używać materaca powyżej 2400 m npm (8000 stóp).

Waga użytkownika

Maksymalna waga użytkownika - 250kg.

Używanie materaca przez innego użytkownika

Przed zezwoleniem drugiej osobie na użycie materaca należy wyczyścić materac wewnętrzny i wyprać pokrowiec wierzchni. Zdezynfekuj obie części. Upewnij się, że materac jest prawidłowo dopasowany do drugiej osoby.

Reanimacja

Materac zapewnia wystarczające wsparcie, aby umożliwić resuscytację (RKO). Nie jest konieczne używanie płyty wspierającej.

Łatwopalność

Nie należy używać ani pozostawiać materaca w pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła o wysokiej temperaturze.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

 **Ostrzeżenie:** Nie należy czyścić materaca parą ani w autoklawie. Materac nie wytrzymuje nadmiernego ciepła ani ciśnienia.

Sprawdzanie zużycia i nieszczelności komórek

Co trzy miesiące sprawdzaj materac pod kątem zużycia i nieszczelności komórek. W przypadku poważnego uszkodzenia lub dużej liczby nieszczelnych komórek, przestań używać materaca. Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Czyszczenie materaca

- Wytrzyj materac wilgotną szmatką, używając łagodnego detergentu. Trudno zmywalne plamy można usunąć, najpierw nasycając plamę, a następnie używając miękkiej szczotki do usuwania brudu.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących lub ostrych ściernych przedmiotów do czyszczenia materaca.
- Nie zanurzaj materaca w wodzie lub innym płynie.
- Nie prać wypełnionego materaca ani komórek w pralce.

Czyszczenie pokrowca wierzchniego

Zewnętrzny pokrowiec można prać w pralce. Zobacz instrukcję na etykiecie przymocowanej do wewnętrznej strony pokrowca.

Dezynfekcja materaca

Jeśli płyny zanieczyściły materac wewnętrzny w wyniku silnego nietrzymania moczu, lub przed używaniem materaca przez innego użytkownika, materac należy wyczyścić i zdezynfekować, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

- Usuń wszystkie komórki z wewnętrznego materaca. Zanotuj liczbę komórek w każdej komorze.
- Usuń materac piankowy bazowy
- Prać w pralce pusty materac wewnętrzny w 60 ° C.
- Użyj łagodnego detergentu do czyszczenia poszczególnych komórek, a następnie spryskaj je środkiem dezynfekującym.
- Prać w pralce pokrowiec wierzchni używając środka przeciwbakteryjnego.
- Poczekać, aż wszystkie części wyschną i ponownie wypełnić komórkami SmartCell™ komory materaca (wg. zapisanej wcześniej ilości)
- Rozpylić środek dezynfekujący na pokrowiec wierzchni i materac.

GWARANCJA

Vicair oferuje ograniczoną gwarancję na wady produkcyjne i materiałowe przez okres pięciu (5) lat od pierwotnej daty zakupu, pod warunkiem, że produkt był używany normalnie. Wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się, czyszczeniem lub zaniedbaniem są wyłączone z niniejszej gwarancji. W przypadku wad materiałowych lub wadliwego wykonania w ciągu pięciu (5) lat od pierwotnej daty zakupu, Vicair, według własnej oceny, naprawi lub wymieni produkt na nowy bezpłatnie. Pokrowiec wierzchni jest wyłączony z tej gwarancji.

Działania w przypadku naruszenia gwarancji są ograniczone do naprawy lub wymiany produktu. W żadnym przypadku roszczenia w ramach gwarancji nie mogą obejmować szkód rzeczy i osób trzecich będących wynikiem usterki oraz nie mogą przekraczać wartości produktu.

Więcej informacji o produktach Vicair na stronie : www.vicair.com.