

11. Instrukcje bezpieczeństwa

- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu bezpośrednio po użyciu.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu tam, gdzie może on wpaść lub zostać wciągnięty do umywalki, zlewu lub wanny.
- Jeśli materac wpadnie do wody, nie dotykaj go, tylko natychmiast odłącz od prądu.
- Chroń kompresor przed wilgocią lub bezpośrednim kontaktem z płynami.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu.
- Jeśli produkt jest użytkowany w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych, musi pozostawać pod ścisłym nadzorem.
- Produkt można użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, tak jak to zostało przedstawione w niniejszej instrukcji. Nie należy korzystać z wężyków nie zalecanych przez producenta urządzenia.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub wejdzie w kontakt z wodą, należy oddać go do lokalnego punktu sprzedaży lub serwisu w celu naprawy.
- Nie wolno użytkować produktu, jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub wtyczka nie działa prawidłowo.
- Trzymaj przewód zasilania z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie korzystaj z materaca w bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła.
- Nie korzystaj z materaca w bezpośrednim pobliżu gazów łatwopalnych lub w sytuacji zagrożenia wybuchem.
- Nie blokuj otworów powietrznych i nie umieszczaj materaca na podłożu na tyle miękkim (jak łóżko czy kanapa), że mogłoby dojść do zablokowania otworów powietrznych materaca. Dbaj o to, aby do otworów powietrznych nie dostały się żadne włókna, włosy ani inne tego typu przedmioty.
- Dbaj o to, aby wężyki nie były zagięte.
- Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do wężyków i otworów urządzenia.
- Produkt można podłączyć tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka z właściwym napięciem.
- Produktu nie można użytkować na zewnątrz ani w pomieszczeniach, w których używa się produktów w aerozolu (sprayu) lub podaje tlen.
- Materaca nie można używać w stanie nie napompowanym.
- Przed przesunięciem łóżka wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Trzymaj ostre przedmioty z dala od materaca.
- Nie stosuj niewłaściwych metod naprawy materaca.

- Korzystaj tylko z oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
- Jeśli łóżko ma boczne poręcze, sprawdź, czy zachowana jest minimalna odległość między matercem i poręczami. W razie potrzeby zastosuj podwyższenie.
- **Maksymalna dopuszczana waga użytkownika to MAT-X1: 125 kg, MAT-X2: 150 kg, MAT-X3: 130 kg i produktu.**
- Materac można oddać do naprawy tylko u producenta lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży/naprawy.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i serwisu. Producent nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez nie właściwe użytkowanie i konserwację.

12. EMC

Zakłóceń sprzętu elektrycznego przez pola elektromagnetyczne w otoczeniu nie można całkowicie uniknąć. Możliwe skutki to:

W przypadku obecności bardzo silnych lub długotrwałych pól, które powodują zakłócenia, systemy elektroniczne mogą nawet całkowicie się zepsuć lub ulec trwałemu uszkodzeniu.

Możliwe źródła promieniowania to:

- Przenośne systemy odbiorników i nadajników (odbiornik i nadajnik z przymocowaną anteną)
 - Telefony komórkowe lub krótkofalówki
 - Przenośne odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz urządzenia nawigacyjne
 - Inne urządzenia
- Przenośne urządzenia nadawcze i odbiorcze o średnim zasięgu (np. anteny samochodowe)
 - Przymocowane zestawy nadajników i odbiorników
 - Zestawy głośnomówiące (instalacja stacjonarna)
 - Przymocowanie odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz urządzenia nawigacyjne
- Inne urządzenia domowe
 - Odtwarzacz CD
 - Laptop
 - Kuchenka mikrofalowa
 - Magnetofon kasetowy
 - itp.

Urządzenia takie jak maszynki do golenia i suszarka do włosów nie powinny generować zakłóceń. Jednak muszą prawidłowo funkcjonować i mieć odpowiednie okablowanie, niezależnie od ich wpływu na zakłócenia. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi od odpowiedniego producenta.

Aby ograniczyć zakłócenia powodowane przez źródła fal elektromagnetyczne, należy przeczytać poniższe ostrzeżenia: