

2 Przed użyciem

2.1 Przeznaczenie

W niniejszej sekcji przedstawiono krótki opis przewidzianego zastosowania wózka prysznicowego. W pozostałych sekcjach instrukcje zostały opatrzone istotnymi ostrzeżeniami. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę użytkowników na możliwość nieprawidłowej eksploatacji produktu.

- Wskazania i przeciwwskazania: Wózek prysznicowy jest przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności lub braku zdolności chodzenia. Wiele rodzajów akcesoriów umożliwiają pełne użytkowanie wózka przez osoby starsze oraz osoby dotknięte niepełnosprawnością z powodu: paraliżu; utraty kończyn; uszkodzenia lub deformacji kończyn; sztywnych lub uszkodzonych stawów; niewydolności serca i słabego krążenia krwi; zaburzeń równowagi; kacheksji (ubytków masy mięśniowej). Wózek prysznicowy 5" może obsługiwać asystent. Model 24" może również obsługiwać użytkownik.
- Wózek prysznicowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach w charakterze wózka łazienkowego oraz środka transportu do/z łazienki.
- Wózek prysznicowy jest zaprojektowany i produkowany w celu transportu wyłącznie jednej (1) osoby ważącej maksymalnie 150 kg. Nie jest przeznaczony do transportu towarów, przedmiotów ani innego wykorzystania niż wcześniej opisane.
- Jeśli ma to zastosowanie, używać wyłącznie akcesoriów i części zapasowych zatwierdzonych przez Vermeiren.
- Należy się zapoznać z wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami wózka prysznicowego, które są podane w §6.
- Gwarancja na ten produkt bazuje na normalnej eksploatacji i konserwacji, opisanej w niniejszej instrukcji. Uszkodzenia produktu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub brakiem konserwacji spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

**UWAGA**

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń

Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie wózka prysznicowego.

Podczas eksploatacji należy pamiętać o ogólnych ostrzeżeniach:

- Nie używać wózka prysznicowego, jeśli użytkownik jest pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji, które mogą mieć wpływ na zdolność jazdy. Dotyczy to również asystenta obsługującego wózek prysznicowy.
- Niektóre części wózka prysznicowego mogą stać się bardzo gorące lub zimne ze względu na temperaturę otoczenia, promieniowanie słoneczne, urządzenia grzewcze lub wodę do mycia. Dotykając ich, należy zachować ostrożność.
- Nie pochylać się za bardzo do przodu ani na boki, aby się nie przewrócić.
- Nie stawać na podnóżku
- Wózek prysznicowy można podnosić tylko, gdy nikt na nim nie siedzi. Wózek prysznicowy chwycić za rury ramy.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy któraś część nie jest uszkodzona lub pęknięta. Nie używać wózka prysznicowego, jeśli jest w nieodpowiednim stanie technicznym. Skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w kwestii ewentualnych napraw lub wymiany części.
- Konstrukcji wózka prysznicowego nie wolno w żaden sposób modyfikować.
- Przestrzegać instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/konserwację.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu z udziałem produktu, należy powiadomić firmę Vermeiren lub specjalistycznego sprzedawcę, jak również właściwe władze w swoim kraju.

2.3 Symbole na wózku prysznicowym

Do wózka prysznicowego mają zastosowanie symbole z następującej listy. Symbole można znaleźć w odnośnych normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 i IEC 417).



Maksymalna masa użytkownika w kg



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Oznaczenie typu



Ryzyko przycięcia

PL

2.4 Pierwsze użycie i przechowywanie

**UWAGA**

Ryzyko uszkodzenia akumulatora

- Szczegóły techniczne na temat przechowywania: patrz rozdział 6.

3 Korzystanie z wózka prysznicowego


OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń

- Najpierw przeczytaj poprzednie rozdziały i zaznajom się z przewidzianym zastosowaniem. **NIE** używaj wózka prysznicowego, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz wszystkich instrukcji.
- W razie wątpliwości i pytań skontaktuj się z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawcą, opiekunem lub doradcą technicznym, który udzieli pomocy.
- Zwracać uwagę, aby ręce, ubrania, pasy, klamry ani biżuteria nie zostały pochwycone przez koła lub podczas regulacji.

PL

3.1 Hamulce


UWAGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń

- Nie używać hamulców, aby zwolnić ruch wózka.

Wózek jest wyposażony w dwa hamulce postojowe obsługiwane ręcznie. Te hamulce służą do unieruchomienia zatrzymanego wózka.


3.1.1 Hamulce postojowe do modelu 24"

Zwalnianie hamulców [A]:

1. Mocno chwycić ciąg jedną ręką (lub asystent trzyma rączkę do pchania jedną ręką)
2. Pociągnąć dźwignię hamulca (10) **DRUGIEGO** koła **DO TYŁU**.
3. Powtórzyć z drugim kołem i hamulcem postojowym.

Zaciąganie hamulców [B]:

1. Mocno chwycić ciąg jedną ręką (lub asystent trzyma rączkę do pchania jedną ręką)
2. Popchnąć dźwignię hamulca (10) **DRUGIEGO** koła **DO PRZODU**, aż do wyraźnego oporu i zablokowania.
3. Powtórzyć z drugim kołem i hamulcem postojowym.

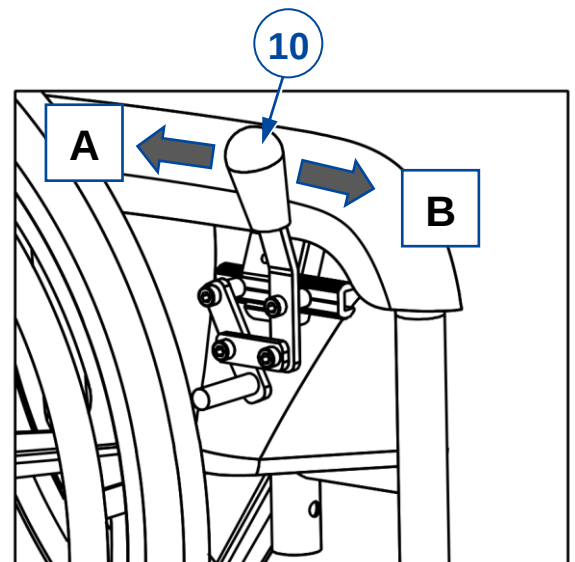


3.1.2 Hamulce postojowe do modelu 5"

Zwalnianie hamulców [C]:

Nacisnąć stopą górną część dźwigni hamulca do tyłu.


Zaciskanie hamulców [D]:

Nacisnąć stopą dźwignię hamulca w dół, w kierunku kółka samonastawnego.

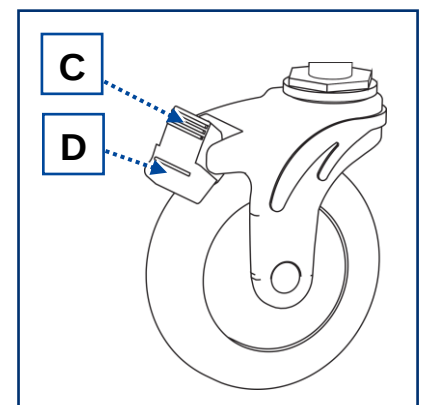

3.2 Podłokietnik

- Obrócić go w górę, aby zrobić miejsce na przesadzenie użytkownika.
- Obrócić w dół, aby użytkownik mógł usiąść wygodnie.

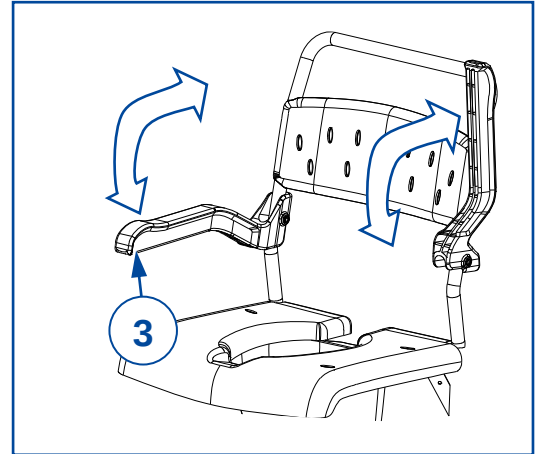

PL


3.3 Podnóżek

Aby wsunąć i wyciągnąć:

- Popchnąć podnóżek (6) stopą do środka, aby zrobić miejsce na przesadzenie użytkownika.
- Wyciągnąć podnóżek, aby przywrócić jego poprzednią pozycję. Upewnić się, że przednia rura znajduje się w zagłębieniu wspornika podnóżka (25) (dostępne 3 położenia)

Demontaż i montaż:

- Zdemonstować, wyciągając uchwyt (26) z rur ramy po lewej i prawej stronie. Przesunąć podnóżek między rurami ramy przednich kół.
- Aby zmontować ponownie, wepchnąć uchwyt (26) podnóżka na rurę ramy po lewej i prawej stronie. Upewnić się, że przednia rura znajduje się w zagłębieniu wspornika podnóżka (25).

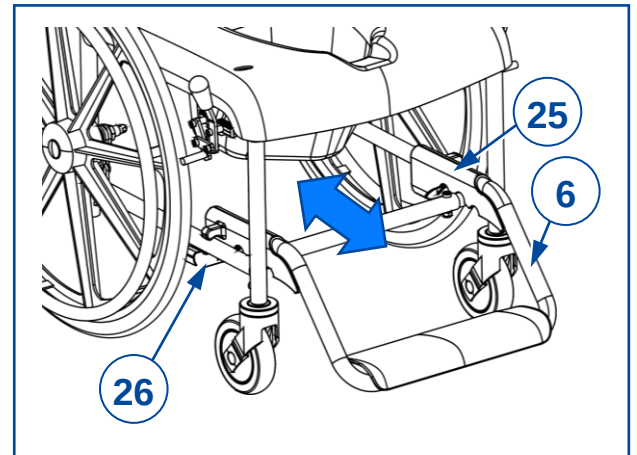


3.4 Wiaderko toaletowe

Wkładanie:


- Umieścić wiaderko toaletowe z tyłu, krawędzią na dwóch prowadnicach.
- Wsunąć do przodu, aż do blokady wiaderka.

Wymowanie:

- Wysunąć wiaderko do tyłu, podtrzymując je drugą ręką.

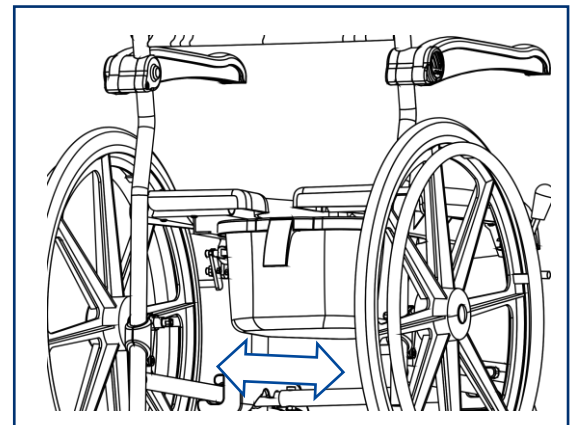

3.5 Przesiadanie się na wózek/z wózka prysznicowego

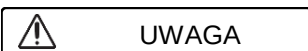


UWAGA

Ryzyko obrażeń i uszkodzeń

- Jeśli użytkownik nie może się bezpiecznie przesiąść, powinien poprosić o pomoc.
- Podczas przesiadania nie stać na podpórkach pod stopy.
- Podczas przesiadania nie opierać się na podłokietnikach.

Przesiadanie się

- Ustawić wózek prysznicowy możliwie najbliżej użytkownika, siedzącego na krześle, kanapie, fotelu, łóżku itp.
- Obrócić kółka samonastawne na zewnątrz, aby zwiększyć stabilność, patrz ilustracja.
- Zacisnąć hamulce, patrz §3.1.
- Wepchnąć podnózek pod siedzisko i obrócić jeden z podłokietników w górę (patrz §3.3 i §3.2).
- Użytkownik może się przesiąść na wózek/z wózka samodzielnie, używając siły rąk. Można też użyć sprzętu do podnoszenia lub poprosić o pomoc asystenta.

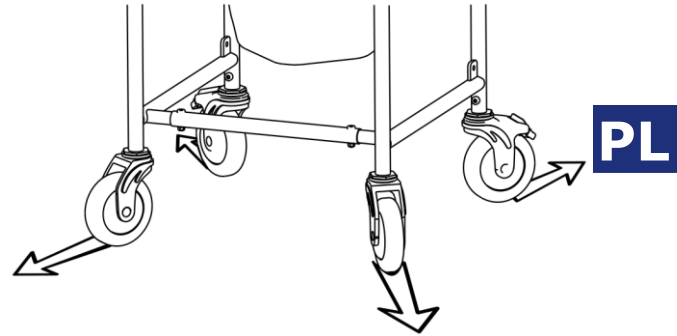

Siedzenie na wózku

- Siedzieć na siedzisku tak, aby dolna część pleców opierała się o oparcie.
- Ponownie rozłożyć podłokietnik i/lub podnózek.
- Postawić stopy na podpórcę.
- Upewnić się, że uda leżą poziomo; odpowiednio ustawić podnózek, patrz §3.3.

3.6 Przetaczanie/jazda na wózku prysznicowym

i Informacje o pokonywaniu progów i innych przeszkód znajdują się w instrukcji obsługi wózka w naszej witrynie internetowej.

**UWAGA****Ryzyko obrażeń i uszkodzeń**

- Przed każdym użyciem upewnić się, że:
 - Wszystkie części są prawidłowo i mocno zamocowane, patrz § 4.
 - Hamulce działają prawidłowo, patrz §3.1.
- Stopy trzymać na podpórcę.
- Progi i inne przeszkody należy pokonywać, jadąc tyłem.