

3. Zakres stosowania

System novacare® Smartline plus 5 to skuteczna pomoc w profilaktyce i leczeniu odleżyn I-III stopnia (zgodnie z klasyfikacją Seilera) lub I-III stopnia (zgodnie z klasyfikacją EPUAP/NPUAP). W przypadkach większego ryzyka lub odleżyn wyższego stopnia należy użyć odpowiedniego systemu z serii produktów novacare®.

4. Maksymalne obciążenie / waga pacjenta

System novacare® Smartline plus 5 jest przeznaczony dla pacjentów o wadze do 160 kg. W przypadku cięższych pacjentów należy użyć innego odpowiedniego systemu z serii produktów novacare®.

5. Opakowanie

Przy dostawie należy sprawdzić produkt i opakowanie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku konieczności transportowania systemu po użyciu należy użyć oryginalnego opakowania. W przeciwnym razie należy pozbyć się opakowania zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Środki bezpieczeństwa przed użyciem

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia z powodu nieprawidłowej obsługi lub zagrożeń dla pacjenta i użytkownika, przed użyciem należy w całości przeczytać instrukcję użytkowania. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa. Należy używać systemu i wyposażenia dodatkowego wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi i zadbać o to, aby każdy z użytkowników zawsze miał do niej możliwy dostęp. W przypadku zmiany właściciela do produktu należy dołączyć instrukcję.

Firma novacare® gmbh nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użytkowanie systemu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.

- Wszystkie części należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i nie wolno ich zmieniać ani modyfikować.
- Ustawienia może zmieniać wyłącznie przeszkolony personel pielęgniarski lub inne odpowiednio przeszkolone osoby.

- Należy zwracać uwagę na zmiany skórne. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.
- Ogólnie należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących produktów medycznych oraz krajowych rozporządzeń dla użytkowników produktów medycznych.

7. Bezpieczeństwo / przygotowanie systemu do użycia

1. Wyjmij jednostkę sterującą z opakowania, rozłóż znajdujący się z tyłu uchwyt i przymocuj jednostkę w nogach łóżka.
2. Wyjmij nakładkę materacową z opakowania i ułóż na materacu łóżka szpitalnego. Jeśli nie jest możliwe zachowanie minimalnego wymaganego prześwitu, należy zastosować element zwiększający wysokość barierki bocznej.
3. Upewnij się, aby przewód przyłączeniowy znajdował się w nogach łóżka i nie był zgięty.
4. Za pomocą dołączonych pasów przymocuj nakładkę materacową novacare Basic do łóżka pacjenta na wysokości nóg i głowy. To zabezpieczy nakładkę przed przesuwaniem. Należy zwrócić uwagę na to, aby pasy nie były przymocowane do ramy łóżka, a do regulowanego stelaża.
5. Strona materaca, na której powinny się znajdować stopy, jest oznaczona wytłoczonymi stopami na pokrowcu. Zawór bezpieczeństwa CPR znajduje się przy wezglowiu.
6. Po zdjęciu zabezpieczenia transportowego podłącz główną rurkę przyłączeniową materaca do gniazda z boku jednostki sterującej. Zwróć uwagę na prawidłowe wsunięcie łącznika rurki (patrz punkt 13, rys. 1).
7. Upewnij się, że wtyczki reanimacyjne CPR są włożone do materaca.
8. Włóż wtyczkę do gniazdka zasilania (230 V), upewniając się, że napięcie jest prawidłowe.
9. Włącz jednostkę sterującą (patrz punkt 9). Dioda LED zasilania będzie migać na zielono do czasu osiągnięcia zaprogramowanego ciśnienia. Później dioda LED będzie świeciła światłem ciągłym na zielono.
10. Urządzenie zacznie działać i nakładka materacowa napełni się powietrzem. Proces ten trwa około 30-35 minut.
11. Ustaw pokrętkę regulatora na wagę pacjenta. Skorzystaj przy tym ze wskaźnika wagi na skali pokrętki regulatora.
12. Pacjenta można teraz ułożyć na nakładce materacowej. Aby poprawić komfort leżenia pacjenta, na system można nałożyć prześcieradło. Podczas nakładania należy zwrócić uwagę, aby prześcieradło się nie zwijało ani zaginało.
13. Należy przeprowadzić test praktyczny (patrz punkt 14) i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.


Uwaga: System zmiennociśnieniowy można stosować również w łóżkach o regulowanych stelażach. Przy podwyższeniu wezgłowia łóżka należy zwiększyć ustawione ciśnienie materaca o 1-2 stopnie. Jeśli to możliwe, należy unikać regulowania nachylenia powierzchni łóżka o więcej niż 30°. Należy przeprowadzić test praktyczny (patrz punkt 14).

Komory przy wezgłowie są statyczne, nie zmiennociśnieniowe. Ustawienie wybrane dla zmiennego ciśnienia wpływa również na ciśnienie w komorach przy wezgłowie.

8. Alternatywne pozycje jednostki sterującej

Jednostka sterująca systemu novacare® Smartline plus 5 powinna być powieszona na łóżku od strony stóp pacjenta. Jeśli brakuje miejsca, jednostkę sterującą można też zawiesić na niższej z dwóch poręczy łóżka. Należy się upewnić, że przewód prowadzący do pompy nie jest w nigdzie zgięty.

9. Jednostka sterująca / panel sterowania

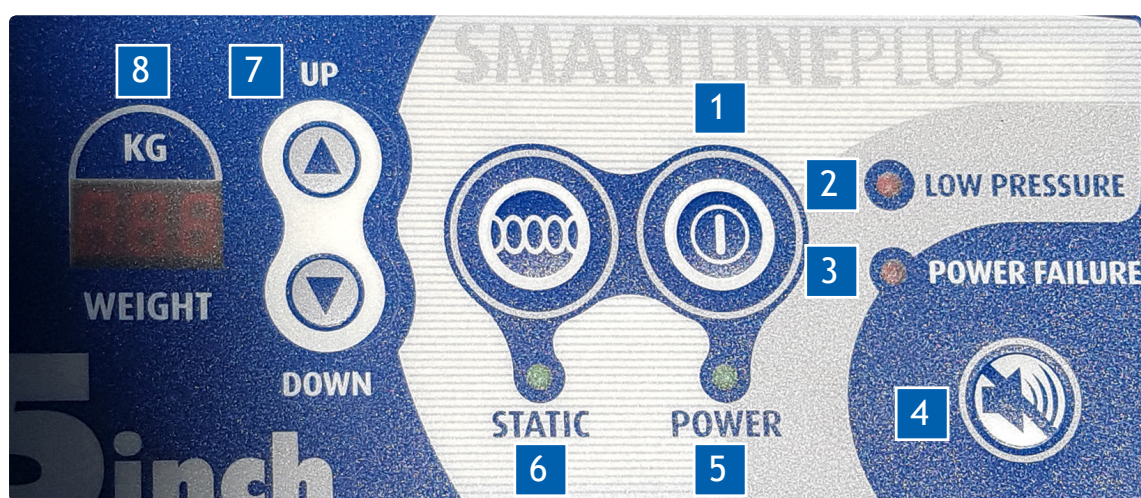

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Włącznik/wyłącznik | 6. Dioda LED włączonego trybu statycznego |
| 2. Dioda LED niskiego ciśnienia | 7. Zmiana ustawienia wagi |
| 3. Dioda LED awarii zasilania | 8. Dioda LED wagi |
| 4. Wyciszenie alarmu | |
| 5. Dioda LED zasilania | |