



Poduszka systemu STABILO jest wyrobem rehabilitacyjno-przeciwodleżynowym, przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci z porażeniem mózgowym, kompensującym i łagodzącym upośledzenia poprzez stabilizowanie chorego w pozycji siedzącej lub leżącej.

Przeznaczenie:

- profilaktyce przeciwodleżynowej,
- łagodzeniu skutków długotrwałego przebywania w jednej pozycji - przykurcze,
- stabilizowaniu chorego w przypadku wiotkości,
- produkt dedykowany jest dla pacjentów z porażeniem mózgowym (spastyka czterokończynowa) z niskim napięciem mięśniowym.

Ostrzeżenia:

- Poduszka systemu STABILO powinna być trwale zapięta do siedziska czy oparcia
- W razie potrzeby zwiększonej wentylacji ciała stosować przewiewny podkład
- Unikać ostrych przedmiotów mogących uszkodzić poduszkę
- Nie używać do mycia środków na bazie rozpuszczalników: toluen, aceton
- Nie ciągnąć za zaworek
- Nie nadmuchiwać poduszki
- Używać tylko specjalnej pompki dołączonej do poduszki
- Nie prasować za pomocą żalazka
- W przypadku rozprucia, z poduszki mogą się wydostać mikrogranulki niebezpieczne dla małych dzieci.

Jak używać:

1. Wyciągnąć wężyk znajdujący się w ręczce pompki.
2. Wkręcić wężyk w zaworek poduszki i poczekać, aż poduszka będzie dostatecznie miękka.
3. Wstępnie ukształtować poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu lub np. nią).
4. Dokręcić pompkę do wężyka i odessać powietrze, do momentu uzyskania o odkręceniu wężyka!
5. Dla zmiany kształtu - wkręcić sam wężyk do zaworka i poczekać, aż poduszka zmięknie.
6. Przy dużych zmianach temperatury, należy dodatkowo ponownie użyć pompki do uzyskania właściwej twardości (↑ °C poduszka mięknie, ↓ °C poduszka twardnieje).
7. Należy użyć pompy do ustawienia wymaganej twardości, gdy znacznie zmienia się temperatura.

