

2.2. Przewidziane zastosowanie

- Ten produkt jest wyrobem medycznym.
- Szafka ze stolikiem jest przeznaczona do użytku przy łóżku/wózku/fotelu pacjenta tak by dzięki mógł korzystać z niej pozostając na łóżku/wózku/fotelu.
- Szafka nie jest przeznaczona do przewozu osób lub dóbr.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.

2.3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń

- Należy przeczytać zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z nimi. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uraz lub uszkodzenie wózka inwalidzkiego.

Podczas użytkowania należy pamiętać o ostrzeżeniach ogólnych:

- Nie opieraj się o wyciągany stolik gdyż może to grozić przewróceniem się szafki.
- Nie podnoś szafki przyłóżkowej chwytając za stolik.
- Nie kładź obiektów większych niż sama szafka.
- Nie obciążaj wyciąganego stolika ponad limit 10kg.
- Nie przewoź osób lub przedmiotów na szafce przyłóżkowej.
- Szafka przyłóżkowa może być wykorzystywana tylko we wnętrzach na wypoziomowanych powierzchniach. Podczas korzystania sprawdź czy wszystkie 4 koła/nóżki równo stoją na podłożu.
- Naprawy i wymiana części mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez przeszkolone osoby i przy użyciu tylko oryginalnych części zamiennych Vermeiren.
- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/konserwację.

Każdy poważny incydent [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)], który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

2.4. Symbole na produkcie

	Oznaczenie typu
	Numer artykułu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczne
	Producent
	Data produkcji
	Deklaracja zgodności
	Uwaga: ważna informacja
	Zaleca się przeczytanie instrukcji
	Ryzyko przycięcia

2.5. Montaż

Szafka przyłóżkowa dostarczana jest już jako w pełni zmontowany towar, jednak uchwyty szuflady oraz drzwiczek są zamontowane od środka. Przed użyciem przemocuj uchwyty na zewnątrz korzystając z śrubokręta.

2.6. Wysyłka i przechowywanie

Transport i przechowywanie szafki przyłóżkowej powinno się odbywać zgodnie z parametrami technicznymi w §5.. Upewnić się, że stolik jest przechowywany w stanie suchym.

Należy zapewnić dostateczną osłonę lub opakowanie, chroniące szafkę przed korozją i ciałami obcymi (np. wodą morską, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).

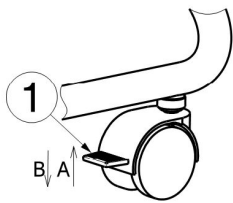
3. Użytkowanie

3.1. Korzystanie z hamulców (tylko dla szafek z kołami)

UWAGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń

- Hamulce mogą ulec zużyciu. Sprawdź funkcjonowanie hamulców przed każdym użyciem.

	3.1.1. Zwalnianie hamulców (A) Naciśnij stopą szarą płytę hamulca kół, aż zablokuje się w odpowiedniej pozycji. Koła są teraz zablokowane.
	3.1.2. Blokowanie hamulców (B) Naciśnij stopą płytę hamulca kół w kierunku ramy. Koła zostają odblokowane i mogą się obracać oraz skręcać.

Aby zablokować pozycję stolika należy zaciągnąć hamulec na obu kółkach.

3.2. Wyciągnięcie/schowanie stolika (jeśli dostępny)

UWAGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń

- Stabilność produktu jest osłabiona kiedy stolik jest wyciągnięty (istnieje ryzyko przewrócenia).

3.2.1. Taca przesuwna

3.2.1.1. Wyciągnięcie

Chwycić stolik za uchwyt. Pociągnij stolik w tył a następnie do góry.

3.2.1.2. Schowanie

Podnieś lekko stolik w górę a następnie wsuń go na swoją pozycję popychając go w dół szyn szafki.

3.2.2. Taca składana

UWAGA

Ryzyko obrażeń

- Nie zbliżać palców, klamer, biżuterii ani ubrań do mechanizmu składania.

3.2.2.1. Rozwijanie

Chwyc tacę u dołu i pociągnij ją do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

3.2.2.2. Składanie

Naciśnij dźwignie mechanizmu składania znajdujące się na dole po obu stronach tacy. Ostrożnie opuść tacę w kierunku szafki.