

2 Przed użyciem



OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń i uszkodzeń

- NIE WOLNO instalować, konserwować ani używać produktu, zanim użytkownik wcześniej nie przeczyta i nie zrozumie całkowicie wszystkich informacji w niniejszej instrukcji, a także we wszystkich odnośnych instrukcjach dotyczących wózka inwalidzkiego, w którym niniejszy produkt jest zamontowany.
- W żadnym razie nie wolno podejmować prób otwierania ani rozmontowania V-drive ani konsoli – wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mógłby serwisować użytkownik.
- W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawcą, opiekunem lub doradcą technicznym, który udzieli pomocy.

Dotyczy wózków inwalidzkich wyposażonych w hamulce linkowe dla asystenta:

- Dźwignie hamulców dla asystenta należy zdemontować przed montażem konsoli kierowniczej V-drive. Jeśli z tego powodu wózek zostanie pozbawiony hamulców postojowych, należy w nim zamontować oddzielne hamulce postojowe.

2.1 Przewidziane zastosowanie

W niniejszej sekcji przedstawiono krótki opis przewidzianego zastosowania V-drive. W pozostałych sekcjach instrukcje zostały opatrzone istotnymi ostrzeżeniami. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę użytkowników na możliwość nieprawidłowej eksploatacji produktu.

- Wskazania i przeciwwskazania: V-drive został zaprojektowany oraz wyprodukowany aby być wsparciem w pchaniu wózka dla asystenta osoby na wózku inwalidzkim gdy ten nie ma wystarczająco siły dla samodzielnego pchania. Nie ma znanych przeciwwskazań do korzystania z systemu V-drive.
- V-drive może obsługiwać wyłącznie asystent, urządzenie nie może być obsługiwane przez samego użytkownika wózka inwalidzkiego.
- V-drive jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- V-drive służy do wspomagania transportu wyłącznie jednej (1) osoby ważącej maksymalnie 135 kg (wersja standardowa) lub 200 kg (wersja wzmocniona).
- Należy się zapoznać ze wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami V-drive, które są podane w rozdziale 6.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.

2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas eksploatacji należy pamiętać o następujących ogólnych ostrzeżeniach:

- Nie używać wózka, jeśli użytkownik jest pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji, które mogą mieć wpływ na zdolność jazdy.
- Nie należy wystawiać V-drive na działanie silnych opadów śniegu i deszczu, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Podłączając/odłączając akumulator do/od silnika lub ładowarki, należy się upewnić, że zasilanie zarówno ładowarki, jak i konsoli kierowniczej V-drive jest wyłączone.
- V-drive przetestowano pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w typowych reprezentatywnych pojazdach. Wykazano zgodność z następującymi normami EMC (EN 12184: 2014, ISO7176-21: 209). Niemniej jednak, źródła pól elektromagnetycznych, takie jak telefony komórkowe, agregaty prądotwórcze i źródła energii wielkiej mocy mogą zakłócić działanie mechanizmów jezdnych V-drive. Z drugiej strony, układy elektroniczne V-drive mogą zakłócić działanie innych urządzeń elektronicznych, takich jak systemy alarmowe w

sklepach lub drzwi automatyczne. Dlatego zalecamy, aby regularnie kontrolować wózek i V-drive pod kątem uszkodzeń i zużycia, ponieważ mogą one powodować większe zakłócenia.

- Należy się upewnić, że V-drive jest zamontowany maksymalnie z tyłu wózka przy zachowaniu wygody asystenta.
- Po zamocowaniu V-drive zwróć uwagę na to, że musisz dostosować się ogólnych zasad ruchu drogowego co może wiązać się z koniecznością zamocowania dodatkowych reflektorów/światła na wózku inwalidzkim.