

- Ławka należy używać wyłącznie w pozycji poziomej, na niegładkiej powierzchni wanny.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

3.3 Instrukcje bezpieczeństwa

- **Nie należy przekraczać dopuszczalnej wagi obciążeniowej na ławce (130 kg na ławce).**
- Ławkę wannową należy używać w pozycji poziomej, na niegładkiej powierzchni wanny.
- Należy trzymać z dala od dzieci. Deska wannowa nie służy do zabawy dla dzieci.
- Jeżeli ławka wannowa używana jest przez dzieci lub w ich pobliżu, oraz używana jest przez osoby niepełnosprawne to potrzebny jest nadzór.
- Uważaj gdy będziesz montował ławkę wanna na wannie istnieje ryzyko przytrąśnięcia palców w momencie montażu.
- Upewnij się, że ławka wannowa dokładnie przylega do wanny i że nie jest ustawiona ani za krótko ani za długo.
- Należy sprawdzić, czy ławka jest odpowiednio przymocowana do wanny za pomocą klipsów mocujących.
- Nie używaj ławki wannowej kiedy nie działa właściwie.

3.4 Symbole na ławki wannowej



Waga maksymalna



CE deklaracja




Oznaczenie typu

4 Montaż

- ▲ PRZESTROGA: Ryzyko urazu – Upewnij się, że deska wannowa jest poprawnie zmontowana.**

Zmontuj /zdemntuj wszystkie elementy tak jak pokazuje rysunek poniżej.

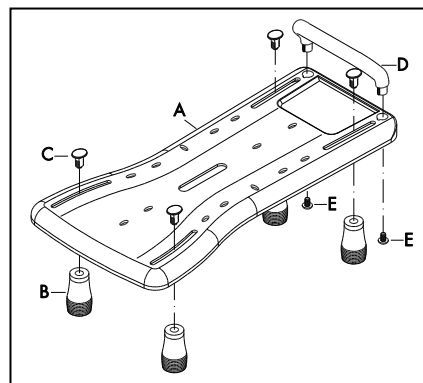


Rys. 2. Montaż / Demontaż ławki wannowej

5 Obsługa ławki

Ławkę obrotową wannową można umieścić na wannie i w łatwy sposób je ściągnąć, gdy nie jest używane. Dzięki temu inne osoby również mogą korzystać z wanny.

5.1 Mocowanie ławki do wanny:

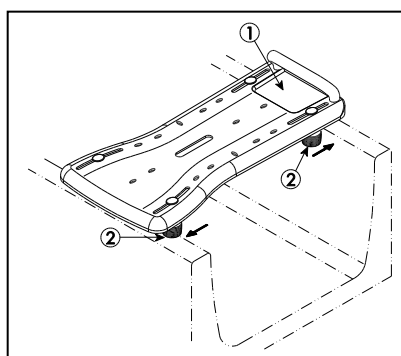

Rys. 3. Mocowanie ławki do wanny oraz demontaż

▲ PRZESTROGA: Ryzyko urazu

- **Należy sprawdzić, czy ławka jest odpowiednio przymocowana do wanny za pomocą gumowych nóg ②.**
- **Sprawdź czy obrotowa deska wannowa dobrze leży na wannie. Upewnij się że deska leży dokładnie i czy nigdzie nie odstaje bądź jej nie brakuje.**
- **Uważaj aby nie włożyć palców pomiędzy deskę obrotową a wane w czasie montażu. Grozi to przytrąśnięciem palców.**

1. Połóż deskę obrotową ① na krawędziach wanny.
2. Przseuń gumowe nóżki ② do odpowiedniej pozycji na wannie.
3. Sprawdź, czy deska wannowa jest odpowiednio przymocowane do wanny.