

Szanowni klienci!


Dziękujemy za wybór produktu marki Vicair®. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego prostotę, niezawodność i fantastyczne działanie. W celu szybkiej instalacji można skorzystać ze skróconej instrukcji instalacji dostarczonej wraz z poduszką. Przed rozpoczęciem użytkowania należy również zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przyswoić sobie jej treść. Zarówno skróconą instrukcję montażu, jak i niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić instrukcję, należy skontaktować się z dystrybutorem w danym kraju. Informacje na temat dystrybutora znajdują Państwo na stronie vicair.com.

WPROWADZENIE

Vicair Multifunctional O2 to wielofunkcyjna poduszka przeznaczona do wózków inwalidzkich posiadających funkcję odchylania oraz regulacji głębokości siedziska. Poduszka zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony skóry osobom obciążonym wysokim ryzykiem powstania odleżyn. Jest ona stosowana w celu poprawienia pozycji ciała, zapobiegania powstawaniu odleżyn oraz zapewnienia komfortu i stabilności podparcia. Jest to również skuteczny dodatek do planu leczenia odleżyn (etap I-IV). Poduszkę Vicair Multifunctional O2 można prac w palce bez wyjmowania wkładów SmartCells!

GŁÓWNE ELEMENTY

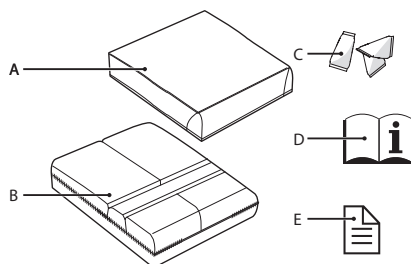

- A** Pokrowiec na poduszkę
- B** Poduszka
- C** Wkłady SmartCells™, umieszczone w 5 komorach
- D** Instrukcja obsługi
- E** Skrócona instrukcja instalacji (Quick Installation Guide)

OGÓLNE SPECYFIKACJE PRODUKTU

Nazwa produktu:	Vicair Multifunctional O2
Producent:	Vicair B.V., Holandia
Gwarancja:	24 miesiące
Ciężar (bez pokrowca):	Rozmiar najmniejszy: 0,7 kg / 1,5 lbs Rozmiar średni: 0,8 kg / 1,8 lbs Rozmiar największy: 0,9 kg / 2 lbs
Dostępne rozmiary:	Sprawdź siatkę na odwrocie instrukcji
Zastosowane materiały:	Bez zawartości lateksu
Poduszka:	Wierzch wykonany z tkaniny poliestrowej w powłoką poliuretanową, spód z tkaniny z siatki poliestrowej
Wypełnienie:	Wypełnione powietrzem wkłady SmartCells o niskim współczynniku tarcia powłoki
Pokrowiec	
Top Cover:	Góra: Dżianina poliestrowa. Obręcz dolna: Tkanina poliestrowa z poliuretanową powłoką antypoślizgową.