

PINOTHERM®

FANGO PARAFINOWE

PL Instrukcja użytkowania: Dokonany zakup jest produktem wysokiej jakości. Należy zapoznać się z nim przed pierwszym użyciem. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z opisem. Instrukcję użytkowania należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie: Masa fango parafinowa jest wykorzystywana jako okład w terapii termicznej. Służy wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel (np. fizjoterapeutów).

⚠ Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń.

Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z produktu, poinformuj je o jego prawidłowym użytkowaniu i zapewnij im nadzór. Zezwalać na użytkowanie tylko wtedy, gdy pozwala na to rozwój umysłowy i fizyczny dzieci. Trzymać dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje między innymi ryzyko uduszenia! W przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania nie można wykluczyć uszczerbku na zdrowiu.

i Jeśli w związku z użytkowaniem produktu dojdzie do poważnych incydentów, należy zgłosić je producentowi oraz właściwemu organowi w swoim kraju. Dane kontaktowe producenta znajdują się w niniejszej instrukcji użytkowania. Dane kontaktowe właściwego organu w danym kraju można znaleźć na: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact/en

Zastosowanie:

Masę fango parafinową podgrzewa się do temperatury od 60 do 70°C w specjalnej maszynie grzewczej, a następnie wylewa na folię z tworzywa sztucznego o grubości 2-3 cm. Masę można formować w temperaturze ok. 50°C. Prawidłową temperaturę można określić, testując fango palcem oraz gdy powierzchnia staje się matowa. Pacjent jest następnie owijany ręcznikami i wełnianymi kocami, aby zapobiec wydostawaniu się ciepła do powietrza w pomieszczeniu i zapewnić pożądany efekt terapeutyczny. Terapia termiczna nie powinna trwać dłużej niż 25 - 30 minut. Masę wraz z folią można usunąć z ciała, nie przykleja się ona do skóry ani obszarów owłosionych. Unikać kontaktu z tekstyliami.

Dawkowanie:

2-3 kg okład na rękę
1-2 kg okład na łokieć
2-3 kg okład na stopę

3-4 kg na okład woreczka żółciowego, wątroby 2-3 kg
na okład pośladków
2 kg na okład dłoni
2 kg na okład biodra
2-3 kg na okład kolana
2 kg na okład dolnej części pleców
3-4 kg na okład tylnej części ciała
3 kg na okład pleców
2-3 kg na okład ramienia
3-4 kg na okład brzucha

Ważna uwaga! Masa fango nadaje się do ponownego użycia po podgrzaniu do temperatury 130-135°C przez 15-20 minut i przestrzeganiu zwyczajowych środków higieny. Tę procedurę można przeprowadzać do 30 razy bez utraty jakości masy. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe szczegóły producenta mieszalników fango dotyczące obróbki wysokotemperaturowej. Należy pamiętać, że masy fango nie da się całkowicie usunąć z tekstyliów.

Przechowywanie i utylizacja: Produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. W dzisiejszych czasach meble i podłogi są pokrywane różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi oraz poddawane działaniu szerokiej gamy środków pielęgnacyjnych, dlatego produkt może zostawić ślady po dłuższym kontakcie z delikatnymi powierzchniami. W związku z tym należy go przechowywać w odpowiednim pudełku lub podobnym opakowaniu. Materiały opakowaniowe i produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności: W przypadku niewłaściwego użycia lub nieprawidłowej obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.



PINO Pharmazeutische Präparate GmbH Grosse Elbstrasse 281 •
22767 Hamburg/Niemcy
Dystrybutor w USA: Helias LLC, Los Angeles, CA 91316, USA
www.pinoshop.com



Medizinprodukt
Medical Device



Zuletzt geandert: 01/2022 0401A