

PL: PINOFIT® - TAŚMA DO ĆWICZEŃ I REHABILITACJI

Instrukcja użytkowania: Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z opisem.

Uwaga: Taśmy wykonane są z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne. Odpowiedzialnym alergenem jest białko występujące w naturalnym lateksie. Dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu zawartość tego białka w taśmie jest znacznie zmniejszona, co również zmniejsza właściwości alergenne. Taśma jest funkcjonalnym urządzeniem treningowym do treningu siłowego, wytrzymałościowego i budującego mięśnie, które jest wszechstronne i łatwe w użyciu.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa: Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Trzymać dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje między innymi ryzyko uduszenia! Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z produktu, poinformuj je o jego prawidłowym użytkowaniu i zapewnij im nadzór. Zezwalać na użytkowanie tylko wtedy, gdy pozwala na to rozwój umysłowy i fizyczny dzieci. Nie można wykluczyć uszczerbku na zdrowiu w przypadku niewłaściwego użytkowania. Używać na własne ryzyko. Sprawdzić produkt przed każdym użyciem. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie należy go używać. Uszkodzony produkt należy zutylizować. Upewnić się, że w pobliżu produktu nie znajdują się żadne spiczaste lub ostre przedmioty.

Zastosowanie: Zwróć uwagę na prawidłową postawę podczas ćwiczeń. Taśmę należy prawidłowo chwycić, umieszczając jej koniec między kciukiem a palcem wskazującym nad dłońią i owijając ją dwa lub trzy razy szeroko wokół dłoni. Chroń taśmę, trzymając ostre przedmioty z dala od niej. Przed treningiem zdejmij biżuterię.

Przechowywanie i utylizacja: Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać bezpośredniego ciepła (ogrzewanie, suszarka) i światła (promienie słoneczne). Materiały opakowaniowe i produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wyłączenie odpowiedzialności: W przypadku niewłaściwego użycia lub nieprawidłowej obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Ryzyko obrażeń!