



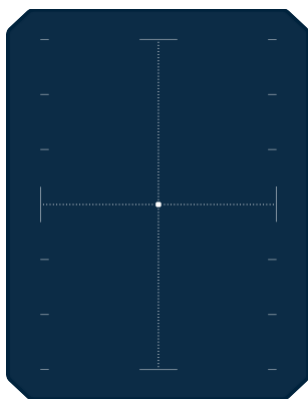

easybase

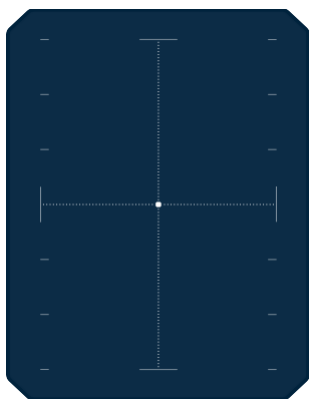

PL – Instrukcja obsługi



Producent

Meloq AB
Brännkyrkagatan 72
118 23 Sztokholm
Szwecja info@meloq.se
+46 8 600 80 70
www.meloqdevices.com



Spis treści

Polski	2
--------------	---



Zawartość opakowania

- 2 x płyty EasyBase [1]
- 2 x kable USB-C [2]
- 1 x IO (niniejszy dokument) [3]

Pierwsze użycie


Sprzęt

Urządzenie należy ładować zgodnie z poniższymi instrukcjami przez dwie godziny przed pierwszym użyciem. Sprawdź, czy płytki są umieszczone na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni. Umieszczając płyty obok siebie, należy upewnić się, że się nie dotykają.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Meloq może być używane na systemach IOS i Android. Aby pobrać oprogramowanie, użyj kodu QR lub: <https://qrco.de/bfVIOM>

Należy pamiętać, że do pobrania i aktywacji oprogramowania Meloq wymagane jest połączenie internetowe.

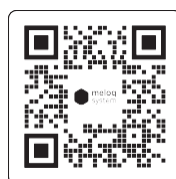

Tworzenie konta

Utwórz konto, naciskając przycisk **“Utwórz nowe konto”** w oprogramowaniu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Początkowe połączenie z EasyBase

Aby dodać i podłączyć płyty z oprogramowania Meloq:

- 1 Naciśnij przycisk zasilania na każdej płycie, aby je uruchomić.
- 2 Zaloguj się na swoje konto.
- 3 Naciśnij ikony płyt [4] w oprogramowaniu Meloq.
- 4 Urządzenia EasyBase powinny być teraz widoczne w sekcji *Znajdź urządzenia*. Naciśnij przycisk Połącz na obu wymienionych urządzeniach, aby je połączyć.
- 5 Naciśnij *Zarządzaj urządzeniami*, aby upewnić się, że obie płyty są zidentyfikowane i połączone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie połączeniami.



Podstawowe działanie


Przeprowadzanie oceny

Aby przeprowadzić ocenę, postępuj zgodnie z instrukcjami w oprogramowaniu Meloq. Protokół każdej oceny jest szczegółowo opisany zarówno w oprogramowaniu Meloq, jak i w podręczniku użytkownika EasyBase (patrz kod QR poniżej lub <https://qrco.de/bfXkSq>).



Bezpieczeństwo oceny skoku

- Podczas wykonywania jakichkolwiek testów związanych ze skokami należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Ładowanie na krawędziach urządzenia może spowodować obrażenia ciała klienta. Upewnij się, że klient został odpowiednio poinstruowany, aby uniknąć ładowania na krawędziach.
- W przypadku testów skoków zalecane jest użycie opcjonalnego akcesorium JumpGuard, ale nie jest ono wymagane.
- Bezpieczne ładowanie powinno odbywać się w obszarze pokazanym na rysunku 5.

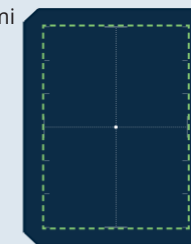

[5]

Ocena równowagi

Aby zapewnić prawidłową ocenę równowagi, pięta klienta powinna być skierowana w stronę logo Meloq. Stopy powinny znajdować się w obszarze zaznaczonym na rysunku 5.



Zarządzanie połączeniami

Definicje:

- Zarządzanie połączeniami** – Zarządzanie połączeniem między EasyBase i oprogramowaniem Meloq
- Połączenie** – Połączenie bezprzewodowe między każdą bazą EasyBase a oprogramowaniem Meloq.
- Przydział** – Lokalizacja EasyBase, lewa lub prawa, po podłączeniu do niej
- Identyfikacja** – Identyfikacja, który EasyBase został przypisany do danej lokalizacji, lewej lub prawej, poprzez miganie diod LED na danej płycie.

Po początkowym podłączeniu do EasyBase można zarządzać połączeniami, naciskając ikonę płyt [4] w oprogramowaniu Meloq. Dostępne są następujące opcje:

- Rozłączenie** – Odłącz płytę.
- Połączenie** – Podłączenie do płyty.
- Identyfikacja** – Miganie diod LED na danej płycie [6].
- Automatyczne połączenie**, Oprogramowanie Meloq spróbuje połączyć się z płytą automatycznie po uruchomieniu.

[4]



[6]



Status połączenia

Po początkowym podłączeniu do EasyBase można zarządzać połączeniami, naciskając ikonę płyt [4] w oprogramowaniu Meloq. Dostępne są następujące opcje

- Zielony** – Wskazuje, że płyta jest *podłączona* i *przypisana*.
- Czerwony** – Wskazuje, że płyta nie jest *przypisana* lub *podłączona*.
- Migający czerwony** – Wskazuje niski poziom naładowania baterii.

Łączenie z bazą EasyBase

- Upewnij się, że kroki opisane w sekcji Początkowe połączenie z EasyBase zostały wykonane. Upewnij się, że urządzenie EasyBase jest włączone.
- Przejdź do opcji Zarządzaj urządzeniami, naciskając ikonę płyty [4].
- Naciśnij przycisk Połącz, gdy urządzenie zostanie podłączone, status urządzenia zmieni się na Połączone, a przycisk Połącz zmieni się na Rozłącz.

Przypisywanie/ponowne przypisywanie lokalizacji do bazy EasyBase

Przypisanie EasyBase można wykonać w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy płyta jest podłączona, czy nie, o ile znajduje się na liście płyt w sekcji Zarządzaj urządzeniami.

- Wejść do Zarządzaj urządzeniami, naciskając ikonę płyty [4].
- Naciśnij wiersz na liście płyt w sekcji Zarządzaj urządzeniami
 - Jeśli płyta była przypisana do prawej lub lewej strony, teraz nie będzie przypisana, a jej status będzie wskazywał jako Nieaktywna.
 - Jeśli płyta miała status Nieaktywna, zostanie ona przypisana jako:
 - Lewa, jeśli nie przypisano żadnej innej płyty
 - Prawa, jeśli Lewa została już przypisana.
- Sprawdź, czy dokonano prawidłowej lokalizacji przypisania, naciskając *ikonę identyfikacji* płyty [6]. Odpowiednia baza EasyBase powinna migać diodami LED po naciśnięciu *ikony identyfikacji płyty* [6] w oprogramowaniu Meloq.

Ładowanie

Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB-C [2] do gniazda zasilania USB i podłącz drugi kabel USB-C do płytki EasyBase [1]. Powtórz tę czynność dla drugiej płytki. Informacje na temat stanu podczas ładowania można znaleźć we wskaźnikach przycisku zasilania.

Do ładowania można używać wyłącznie wtyczek USB z oznaczeniami pokazanymi na rysunku [7].

Należy pamiętać, że podczas ładowania urządzenia nie można wykonywać ocen.

[7]



Przyciski i wskaźniki

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenia, naciśnij przycisk zasilania na każdym urządzeniu.

Uwaga: Urządzenie uruchomi się automatycznie po podłączeniu kabla USB-C do adaptera ściennego.

Twardy reset

- Odłącz kabel USB-C. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund przed jego zwolnieniem. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

Wskaźniki przycisku zasilania

	Wskaźnik	Status	Możliwa ocena
	Pulsujący niebieski	Oczekiwanie na połączenie z Meloq Software	Nie
	Stały niebieski	Połączony z oprogramowaniem Meloq	Tak
	Pulsujący zielony	Ładowanie	Nie
	Stały zielony	Ładowanie zakończone	Nie
	Czerwony	Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii	Tak
	Pulsujący czerwony	Ochrona przed wyczerpaniem baterii, urządzenie wyłączy się w celu ochrony baterii, należy naładować urządzenie.	Nie

Tabela 1.

Ostrzeżenia

Przed czyszczeniem należy odłączyć kabel USB.

- NIE zanurzać urządzenia w cieczy, nie sterylizować, nie stosować rozpuszczalników, kwasów ani olejów.
- NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur.
- NIE używaj uszkodzonego urządzenia.
- Żadne modyfikacje sprzętu nie są dozwolone.
- NIE WOLNO obciążać urządzenia podczas przechowywania.
- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie
- NIE WOLNO wywierać siły większej niż znamionowa. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli urządzenie zostało poddane działaniu siły większej niż 120% siły znamionowej (120% siły znamionowej to 1440 kg na płytkę)

Pielęgnacja i konserwacja

Aby wyczyścić urządzenie, należy przetrzeć je szmatką zwilżoną 70% roztworem etanolu/alkoholu izopropylowego.

Przeznaczenie

EasyBase ma na celu ułatwienie oceny sił reakcji podłoża, a także analizy środka nacisku. Grupami docelowymi klientów mogą być na przykład klienci z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzeniami neurologicznymi, pediatrycznymi, geriatrycznymi. Docelowymi użytkownikami mogą być na przykład fizjoterapeuci, chiropraktycy, terapeuci zajęciowi, ortopedzi.

Przeciwwskazania

NIE wolno używać EasyBase:

- Bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
- W środowisku bogatym w tlen.
- Tam, gdzie występują podwyższone poziomy promieniowania elektromagnetycznego, jonizującego lub cząsteczkowego.
- Na powierzchniach, które nie są płaskie i poziome.
- Na powierzchniach, które nie są stabilne lub miękkie.
- Na śliskich lub mokrych powierzchniach.
- Z klientem z poważnymi zaburzeniami równowagi

Serwis i gwarancja

EasyBase jest objęty dwudziestoczeromiesięczną (24) gwarancją od daty zakupu. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie zostało naruszone, wystawione na działanie siły 120% siły znamionowej lub w inny sposób użytkowane niezgodnie ze specyfikacją. Serwis nie jest wymagany, o ile urządzenia są używane zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja

Nazwa produktu	EasyBase
Środowisko operacyjne	Nie do użytku domowego
Temperatura pracy	Od 10°C do 45°C
Temperatura przechowywania	Od 0°C do 45°C
Obudowa	IP4X
Czas pracy	24h (diody LED wyłączone) / 4h (diody LED o maksymalnej intensywności)
Maksymalna siła znamionowa	1200 kg / 11770 N na płytę
Czas czuwania/czas ładowania	15 tygodni/5 godzin
Dokładność czujnika	±1%
Specyfikacja ładowarki	5VDC, >0.5A, USB-C
Aktualizacja instrukcji	2011-1MA001-01

Tabela 2.

Transport

Podczas pakowania i transportu EasyBase:

- Upewnij się, że górna płyta każdego urządzenia nie styka się bezpośrednio ze sobą. Umieść na przykład karton, tkaninę lub inny miękki materiał pomiędzy płytami, aby uniknąć zarysowania płyty górnej podczas transportu.
- Umieść stronę z logo Meloq do góry, aby uniknąć naciśnięcia przycisku zasilania.

Przechowywanie

EasyBase należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze zgodnej ze specyfikacją. W przypadku długotrwałego przechowywania urządzenia należy ładować raz w roku, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Materiały dodatkowe

Dodatkowe materiały można znaleźć na stronie <https://www.meloqdevices.com>

Odpowiedzialność

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Meloq, ani żadna osoba lub podmiot powiązany z Meloq, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, wydatki lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania) lub w inny sposób, w tym między innymi za uzasadnione koszty obsługi prawnej, szkody wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub polegania na, lub jakiegokolwiek błędu, pominięcia, przerwania, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu lub zmiany strony internetowej EasyBase lub samego urządzenia, w tym bez ograniczeń, wszelkiej odpowiedzialności za szkody dla firmy użytkownika oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody szczególne lub wtórne, nawet jeśli EasyBase lub autoryzowany przedstawiciel Meloq został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Meloq za szkody nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika. Wszystkie roszczenia i oświadczenia przedstawione przez Meloq dla EasyBase mają na celu wybieganie w przyszłość i są kwalifikowane przez ważne czynniki.

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

ISED

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez kanadyjską organizację Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED Canada, dawniej Industry Canada) do pracy z wbudowaną anteną oraz z antenami wymienionymi w tabeli 3 o maksymalnym dopuszczalnym wzmocnieniu. Typy anten niewymienione na tej liście, o zysku większym niż maksymalny wymieniony zysk, są surowo zabronione do użytku z tym urządzeniem.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Ten nadajnik radiowy (IC: 3147A-LYRAP) został zatwierdzony przez kanadyjską organizację Innovation, Science and Economic Development Canada (IS-ED Canada, dawniej Industry Canada) do pracy z wbudowaną anteną i typami anten wymienionymi w sekcji Tabela 3 przy wskazanym maksymalnym dopuszczalnym wzmocnieniu. Typy anten niewymienione na tej liście, o zysku większym niż wskazany maksymalny zysk, są surowo zabronione do użytku z tym urządzeniem.

Ten komponent jest zgodny ze standardami RSS zwolnionymi z licencji ISED. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Ten komponent nie może generować zakłóceń.
2. Ten komponent musi być w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju zakłócenia, w tym takie, które mogłyby zakłócić jego działanie.

Tabela 3.

Certyfikacja	
FCC	Bluetooth LE: 0 mm
ISED	Bluetooth LE: 14 mm



Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Zarezerwuj bezpłatną konsultację, podczas której zaprezentujemy produkt i przeprowadzimy szkolenie.

Umów się na spotkanie, klikając w poniższy link:

calendly.com/marko-dombi/15min

Możesz także skontaktować się z nami drogą mailową: contact@melog.se



easybase

Wyprodukowano w Szwecji