



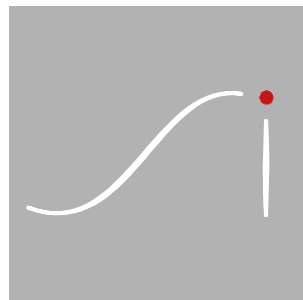


Sport Innovations LLC
Equine & Canine Therapy Equipment

Instrukcja użytkowania “**MAGPRO PLUS**”

Nowa generacja **derek terapeutycznych dla koni**

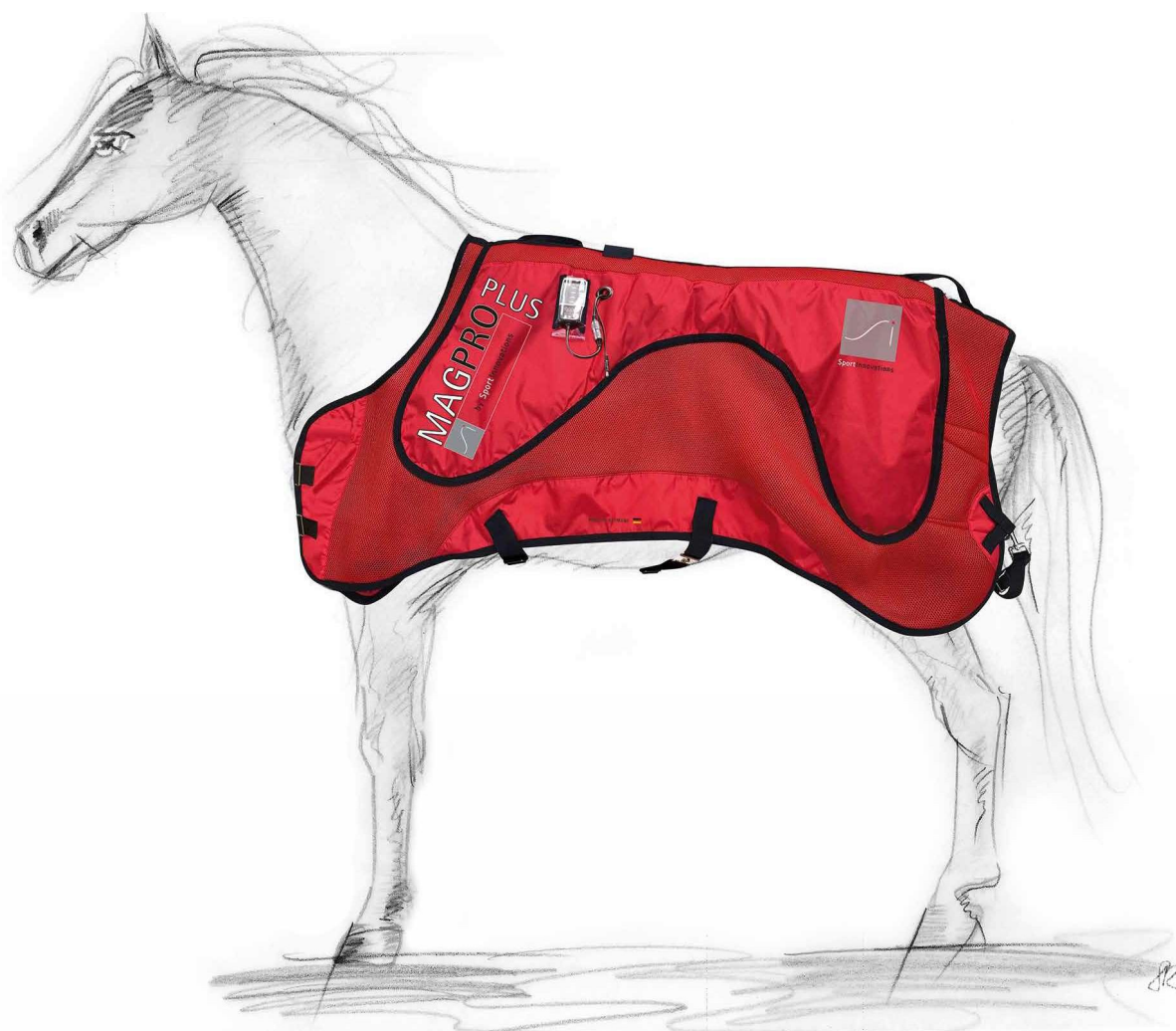

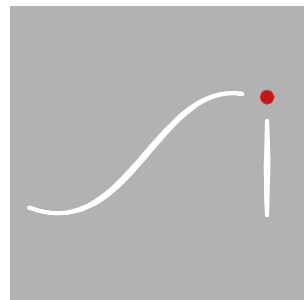

“MAGPRO PLUS”

Instrukcja: Bateria



Wyposażenie derki terapeutycznej
MagPro Plus zawiera

- 1 baterię
- 1 sterownik


Pełne naładowanie baterii trwa do 4 godzin

- jeśli dioda LED świeci na czerwono - baterie ładują się
- jeśli dioda LED świeci na zielono - baterie są naładowane
- odłączyć od ładowania gdy diody LED świecą na zielono



Podłączenie baterii



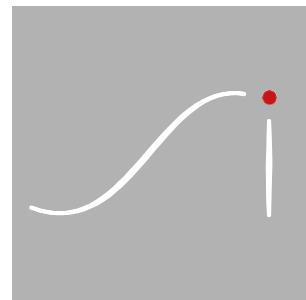


“MAGPRO PLUS”

Instrukcja: Sterownik - Magnetoterapia i Termoterapia

- U **koni nerwowych** należy stosować **niskie częstotliwości** przez 4 pierwsze użycia.

TERMOTERAPIA:

Aby rozpocząć termoterapię należy użyć adaptera dla magneto-/termoterapii. Urządzenie potrzebuje stałego zasilania do działania termoterapii. Wciśnij przycisk „MAG POWER OFF” a następnie przycisk do obsługi termoterapii ON/OFF aby rozpocząć. Równocześnie podczas 20-minutowej termoterapii można dołączyć masaż konia.

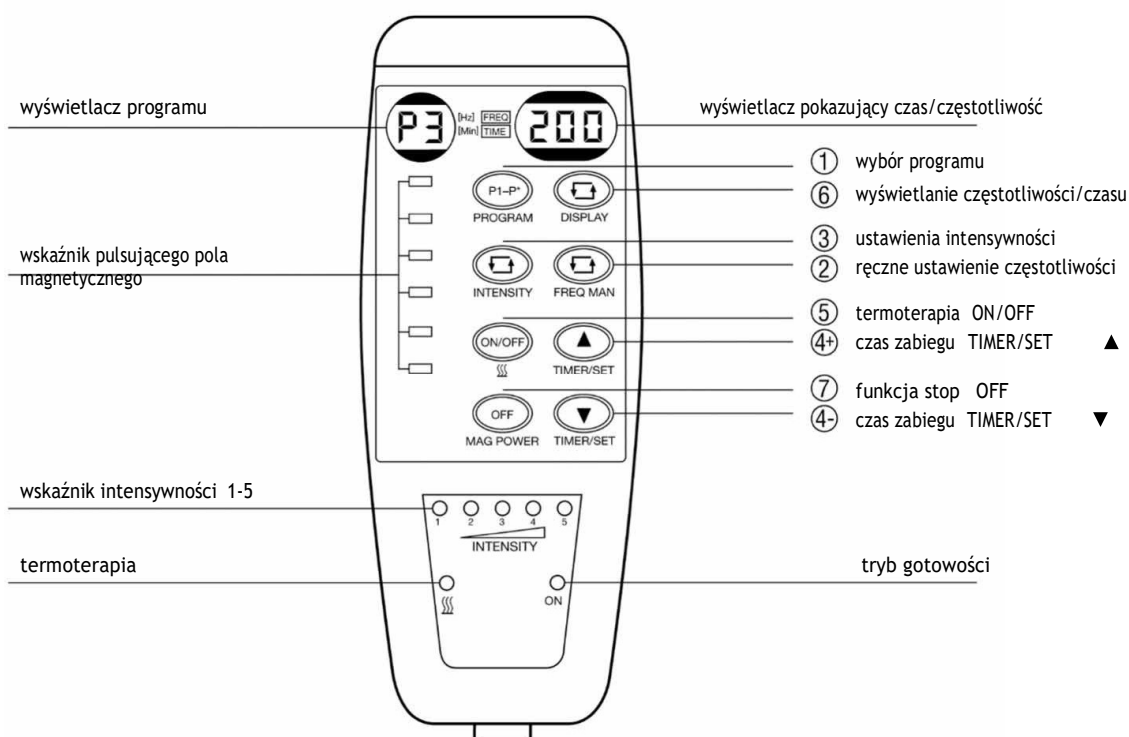




Instrukcja: Sterownik - Magnetoterapia i Termoterapia

- ① **Wybór programu:** 7 programów automatycznych wybieranych przyciskiem PROGRAM od P1 do P7. Aby wyświetlić aktualny program wciśnij PROG. a czas zabiegu przycisk DISPLAY. Program rozpoczyna się automatycznie po 3 sekundach. Automatyczne programy działają z ciągle zmieniającą się częstotliwością z określonego zakresu.
- ② **Ręczne ustawienie częstotliwości:** Aby ustawić częstotliwość pola magnetycznego należy wcisnąć FREQ MAN zakres od 1 Hz do 250 Hz (250 Hz -1 Hz). Aby wyświetlić częstotliwość wciśnij DISPLAY. Program rozpoczyna się automatycznie po 3 sekundach.
- ③ **Intensywność:** Wybór 5 poziomów intensywności od 1 do 5 z aktywnym polem magnetycznym. Wskaźnik z pięcioma diodami LED.
- ④+ **Czas zabiegu:** Po uruchomieniu programu automatycznego i/lub na początku zabiegu z ręczną regulacją częstotliwości uruchamiany jest timer z podstawowym czasem zabiegu. Po upływie czasu pole magnetyczne jest wyłączane (sygnał dźwiękowy i END na wyświetlaczu)
- ④- **Wyświetlanie czasu zabiegu i/lub pozostałego czasu za pomocą przycisku DISPLAY**
Modyfikacja czasu zabiegu za pomocą przycisków TIMER/SET ▲ i TIMER/SET ▼
- ⑤ **Termoterapia:** Termoterapię włącza/wyłącza się przyciskiem ON/OFF. Włączenie termoterapii powoduje wyłączenie pola magnetycznego.
- ④+ **Termoterapia działa tylko przy nieaktywnym polu magnetycznym. Automatyczny czas terapii to 20 minut. Wyświetlanie czasu trwania i/lub pozostałego czasu za pomocą przycisku DISPLAY.**
Modyfikacja czasu zabiegu za pomocą przycisków TIMER/SET ▲ i TIMER/SET ▼.
W momencie zakończenia programu elementy grzejące są wyłączane (END na wyświetlaczu).
- ⑥ **Wyświetlacz:** Gdy pole magnetyczne jest aktywne, można użyć przycisku DISPLAY aby przełączyć pomiędzy częstotliwością/zakresem częstotliwości oraz czasem trwania/pozostałym czasem zabiegu. 2 diody LED - FREQ i TIME wskazują wybrany zakres. Dla programów automatycznych zakres częstotliwości pola magnetycznego jest wyświetlany.
- ⑦ **Funkcja Stop:** Wciśnięcie przycisku OFF powoduje wyłączenie pola magnetycznego i termoterapii

Podświetlenie przycisków: Przyciski sterownika są podświetlane, ułatwiając obsługę przy słabym oświetleniu. Po naciśnięciu przycisku, podświetlenie włącza się na 90 sekund.

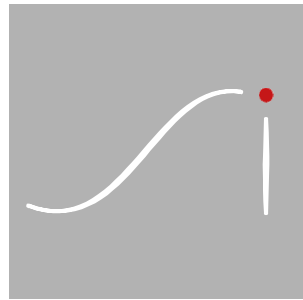


Sport Innovations LLC

Equine & Canine Therapy Equipment

“MAGPRO PLUS”

Magnetoterapia - Programy

Program	Czas	Częstotliwość (magnesy)	Wskazania
P01 Tylko przy urazach	40 min	8-70 Hz	• zapalenie stawów • zrost kości • złamania i pęknięcia • wspomaga leczenie
P02 Przed-/Potreningowy	30 min	4-60 Hz	• działanie przeciwbólowe • rehabilitacja
P03 Przed-/Potreningowy START	30 min	1-6 Hz	• relaksacja • dla wszystkich koni korzystających z derki przez pierwszy tydzień • kolki
P04 Przed-/Potreningowy	30 min	7-11 Hz (Częstotliwości Schumanna)	• redukuje stres • dla zwierząt zestresowanych • relaksacja
P05 Potreningowy	25 min	2-25Hz	• regeneracja
P06			NIE DO STOSOWANIA U ZWIERZĄT!
P07	30 min	10-30Hz	• zwiększa stymulację, buduje kondycję • witalizuje zwierzę

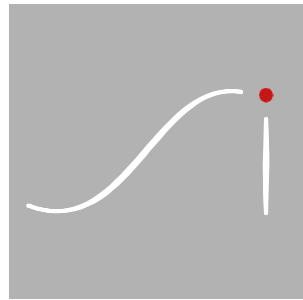

Sport Innovations LLC

Equine & Canine Therapy Equipment

“MAGPRO PLUS”


Ustawienia magnetoterapii

- 1) Stosowanie magnetoterapii przez pierwszy tydzień:
MAGNETOTERAPIA: Używać P03 U WSZYSTKICH KONI, ustawić INTENSITY NA 5
- 2) Stosowanie magnetoterapii w drugim tygodniu:
MAGNETOTERAPIA: Używać P03, ustawić INTENSITY NA 2
- 3) Przy braku rezultatów po drugim tygodniu :
MAGNETOTERAPIA: Wypróbować P04, ustawić INTENSITY NA 5
- 4) U spiętych/dużych koni: Zmienić program na P05

“MAGPRO PLUS”

Testowanie funkcji PEMF

- 1) Podłączyć baterie
- 2) Wybrać program magnetyczny P06 za pomocą przycisku
- 3) Program rozpoczyna się automatycznie po wybraniu
- 4) Lewa strona wyświetlacza pokazuje rotację pulsów
- 5) Aby zwiększyć intensywność należy wcisnąć przycisk „INTENSITY” do pojawienia się #5
- 6) Chwycić magnes testowy na ostatniej ręczce na grzbiecie derki / powinno być wyczuwalne lekkie pulsowanie

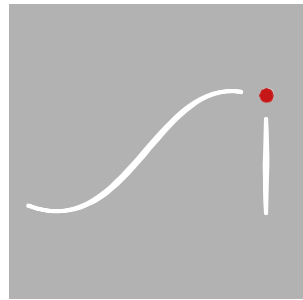

Sport Innovations LLC

Equine & Canine Therapy Equipment

“MAGPRO PLUS”

Czyszczenie - Informacje

Skontaktuj się z dystrybutorem aby uzyskać instrukcje dotyczące prania.


Przetrzyj urządzenie wilgotnym ręcznikiem od wewnątrz i z zewnątrz co kilka użyć. Wysusz derkę na powietrzu po osuszeniu ręcznikiem.

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA INFORMACJE:

Ten produkt nie powinien być w kontakcie z płynami oraz nie powinien być wystawiany na ciągłe działanie wilgoci. Produkt MUSI być używany na uwiązany koniu. Koń musi być pod nadzorem w czasie używania produktu. Ten produkt posiada oznaczenie  spełnia wytyczne EWG

Unieważnienie gwarancji następuje jeśli nie dotrzymane są poniższe wytyczne:

- Konie zostają bez nadzoru lub nie są uwiązane. Zwierzęta muszą być uwiązane podczas używania urządzenia.
- Naprawy dokona osoba nieuprawniona.
- Plomby gwarancyjne (złote plomby) są przerwane lub widoczne są próby ingerencji.
- “MagPro Plus” powinny być ładowane tylko ładowarkami dostarczonymi przez Sport Innovations.
- Należy odłączać ładowarki i baterie chwytając za wtyczkę. NIE CIĄGNĄC ZA PRZEWODY
- Baterie należy wyjąć z ładowarki po skończonym ładowaniu. Nie wolno zostawiać baterii w ładowarce na noc. Należy odłączać baterie gdy nie są w użyciu
- Produkt jest używany przez dzieci.
- Baterie ładować przez około 3 godziny i wyjąć z ładowarki gdy diody LED na ładowarce świecą na zielono.
- Kabel zasilający derkę i kable do ładowania nie powinny być narażone na kontakt z ostrymi przedmiotami.
- Odsłonięte przewody w ładowarkach mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Należy więc wymienić ładowarki na nowe.
- Nie używać produktu jeśli kable są przerwane lub uszkodzone i odsłonięte są przewody.
- Elementy elektroniczne nie powinny być wystawiane na działanie płynów, słońca, ognia i ekstremalnych temperatur. Unikać kontaktu z oczami, jeśli baterie są uszkodzone
- Należy wyłączać derkę po każdym użyciu i odłączyć baterię. Nie przechowywać i przewozić urządzenia z podłączonym zasilaniem/baterią
- Baterie należy poddawać recyklingowi.
- Urządzenie posiada złote plomby na zewnętrznej stronie kieszeni od masażu, jeśli plomby są przerwane gwarancja jest unieważniona.

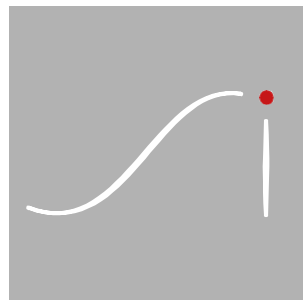

“MAGPRO PLUS”

Sport Innovations LLC
Equine & Canine Therapy Equipment

“MAGPRO PLUS”

Specyfikacja/dane

Wybór programów:

7 programów automatycznych ze zmienną częstotliwością

Ustawienia ręczne:

stałe częstotliwości od 1 Hz do 250 Hz

Częstotliwości terapeutyczne:

1 Hz ... 250 Hz (impuls bipolarny)

Moc pola magnetycznego: Gęstość strumienia Bmax na środku cewki: około 1000 μ T
bezpośrednio przy cewce

około 400 μ T na wysokości 95 mm nad cewkami

Intensywność: 5 poziomów (poziomy 1-5 około 20% - 31% - 50% - 71% - 100%) skokowo

Termoterapia światłem podczerwonym:

około 50 W przy nieaktywnym polu magnetycznym

