



**Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Kazimierz Ligas**

46-053 Chrzastowice, ul. Zielona 1, Tel.: (77) 456 51 90, fax: (77) 423 23 90

Internet: <http://www.opiw.pl>

e-mail: opiw@opiw.pl
marketing@opiw.pl



**Gabinet Leczenia Zaburzeń Integracji Czynności Zmysłowych
Metodą Integracji Sensorycznej.**

INSTRUKCJI OBSŁUGI

GABINET LECZENIA ZABURZEŃ INTEGRACJI CZYNNOŚCI ZMYŚLOWYCH METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (Gabinet GSI)

URZĄDZENIA GABINETU GSI:

- **Zawiesie z zawieszami STZ**
- **Platforma wisząca PW-01**
- **Huśtawka terapeutyczna HT-01**
- **Huśtawka T HTT-01**
- **Konik KN-01**
- **Helikopter HR-01**
- **Hamak HK-01**
- **Deska do ćwiczeń równoważnych RW-01**
- **Deska Rotacyjna DR-01**
- **Trampolina TP-01**
- **Deskorołka DK-01**
- **Beczka BA-01**
- **Materac MRS-01**
- **Klin KR-30**
- **Gruszka rehabilitacyjna GR-01**
- **Huśtawka grzybek HTG-01**
- **Platforma wisząca okrągła PWO-01**
- **Zestaw piłek sensorycznych**
- **Zestaw piłek gimnastycznych**

Zawieszenie z zawieszami





Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Metalowa konstrukcja wykonana w formie rozbiernego stojaka, służąca do podwieszania urządzeń stosowanych w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych w terapii metodą SI. Różnorodność zawiesi predysponuje do wielozmysłowej stymulacji.

II. ZASTOSOWANIE

Zawieszenie z zawieszami znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeuta SI.

III. DANE TECHNICZNE

Zawiesie z zawieszami STZ-1/U

Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana proszkowo. Całość jest rozbierna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi z miękkiej pianki obciążonej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada trzy haki do podwieszania.

Wymiary:

Wysokość:	244 cm
Długość:	294 cm
Szerokość:	130 cm
Waga:	97 kg
Max obciążenie:	500 kg

Wyposażenie:

Szakla z rolką	2 szt.
Szakla z rolką i krętlikiem	1 szt.

Zawiesie z zawieszami STZ-2/T

Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana proszkowo. Całość jest rozbierna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi z miękkiej pianki obciążonej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada sześć haków do podwieszania.

Wymiary:

Wysokość:	244 cm
Długość:	294 cm
Szerokość:	352 cm
Waga:	180 kg
Max obciążenie:	500 kg

Wyposażenie:

Szakla z rolką	4 szt.
Szakla z rolką i krętlikiem	2 szt.

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostarczoną w elementach konstrukcję należy rozpakować i ustawić w miejscu przeznaczonym do zmontowania. Następnie przy pomocy dostarczonych śrub skręcić stojaki do belki górnej, pamiętając aby były one ustawione na podłożu płasko bez tzw. chybota. Tak przygotowana konstrukcja jest gotowa do zamocowania elementów służących do terapii metodą SI. Elementy należy mocować na zawieszeniu wyłącznie za pośrednictwem szaki z rolką (zabezpieczy to haki i karabińczyki zawiesi przed uszkodzeniem). Różnorodne zawiesia umożliwiają dziecku jego wielozmysłowy rozwój oraz stymulują do aktywnego planowania nowych aktywności ruchowych. Urządzenie to stanowi ciekawe połączenie zabawy i terapii.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP, oraz przed każdym rozpoczęciem zajęć sprawdzić zamocowanie haków. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia na urządzenia zamocowane na konstrukcji. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić poprawność zawieszenia urządzeń. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzeń zamocowanych na zawieszeniu z zawieszami. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy zamocowanych urządzeń należy zwrócić uwagę czy nie są one zawieszone zbyt blisko siebie uniemożliwiając bezpieczne użytkowanie (tego typu urządzenia w ruchu zajmują więcej miejsca). Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu zawieszenia z zawieszami w czystości. Konstrukcję metalową należy przecierać miękką ściereczką przy użyciu środków myjących rozpuszczalnych w ciepłej wodzie. Elementy tapicerowane zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tapicerki osłon antyurazowych.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy

jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Platforma wisząca PW-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Platforma wisząca PW-01 przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

II. ZASTOSOWANIE

Platforma wisząca PW-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Platforma wykonana w formie lakierowanej proszkowo stalowej ramy, do której zamocowano siedzisko. Siedzisko wykonane jest z płyty MDF, wyłożone pianką i pokryte zmywalnym, miękkim materiałem skóropodobnym. Cała konstrukcja podwieszona jest za pomocą 4 regulowanych linek, które parami zamocowane są na karabińczykach. W zależności od rodzaju ćwiczeń platforma może być zawieszona za pośrednictwem dwóch szaki z rolkami na sąsiednich hakach lub na jednym haku za pośrednictwem szaki z rolką i krętlikiem.

Wymiary:

Długość siedziska:	131 cm
Szerokość siedziska:	61 cm
Waga:	20 kg
Zakres regulacji:	40 cm
(przy max obniżeniu platforma spoczywa na podłożu)	
Max obciążenie:	160 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostarczoną konstrukcję należy rozpakować i zawiesić na hakach zawieszenia. Pacjent może leżeć, siedzieć, klęczeć na platformie leżyska w zależności od indywidualnego toku ćwiczeń, ustalonego przez terapeutę. O ruchu wahadłowym, okrężnym decyduje osoba prowadząca terapię.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z platformy. Należy dopilnować aby linki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić wypoziomowanie i poprawność zawieszenia platformy. Nie dopuścić do splątania linek. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru

terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na platformie należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Elementy tapicerowane zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tapicerki (wykładziny leżyska).

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Huśtawka terapeutyczna HT-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Huśtawka terapeutyczna HT-01 umożliwia realizację różnych kierunków ruchu, włącznie z rotacją - przeznaczona jest do stymulacji przedsionkowej i proprioreceptywnej.

II. ZASTOSOWANIE

Huśtawka terapeutyczna HT-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Huśtawka wykonana w formie tapicerowanej platformy. Siedzisko wykonane jest ze sklejki, wyłożone pianką i pokryte zmywalnym, miękkim materiałem skóropodobnym. Całość zawieszona dwustopniowo, w pierwszym stopniu na czterech skracalnych linach zamocowanych na dwóch trawersach, które w drugim stopniu zawieszone są na trawersie głównym, a ten z kolei zawieszony jest na haku konstrukcji stojaka za pośrednictwem szaki z rolką i krętlika. Trawersy wykonane z drewna bukowego.

Wymiary:

Długość siedziska:	120 cm
Szerokość siedziska:	60 cm
Waga:	15 kg
Zakres regulacji:	45 cm
(przy max obniżeniu huśtawka spoczywa na podłożu)	
Max obciążenie:	100 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostarczoną konstrukcję należy rozpakować i ustawić (zawiesić) w miejscu przewidzianym do zmontowania. W zależności od potrzeb jej długość możemy zmieniać, skracając lub wydłużając stosowne linki. Terapeuta może ułożyć pacjenta na leżysku w następujących pozycjach: leżenie na plecach, brzuchu, w tzw. pozycji czworacznej, klęczącej, klęku jednonożnym z wykrokiem, siadu bokiem, po turecku i siad prosty oraz pozycji stojącej. Dodatkowo można wykorzystać tzw. półwałek i próbować w/w pozycji. Ruchy jakie terapeuta może wykonać w zależności od potrzeb to delikatne wychylenia przód-tył, w bok i ruchy okrężne. Dziecko może wykonać ruch podciągający się za linę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP, oraz przed każdymi zajęciami sprawdzić należy pewność mocowania do haka zawieszenia. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z huśtawki. Należy dopilnować aby linki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy wypoziomować platformę i sprawdzić poprawność zawieszenia huśtawki. Nie dopuścić do splątania linek. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na huśtawce należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu huśtawki terapeutycznej w czystości. Wykładzinę zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tworzywa..

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Huśtawka T HTT-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Huśtawka T HTT-01 przeznaczona jest do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

II. ZASTOSOWANIE

Huśtawka T HTT-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w relacji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Huśtawka HTT-01 ma kształt odwróconej litery T. Konstrukcję nośną huśtawki wykonano z rur stalowych lakierowanych proszkowo a siedzisko w formie belki ze sklejki. Konstrukcja wyłożona jest pianką i otapicerowana materiałem skóropodobnym. W słupku huśtawki T zamocowano jeden koniec linki, drugi- zakończony karabińczykiem i układem regulacji długości- wieszany na haku zawieszenia za pośrednictwem szaki z rolką i krętlika.

Wymiary:

Wysokość całkowita:	80 cm
Długość siedziska:	85 cm
Szerokość siedziska:	20 cm
Średnica słupka:	16 cm
Wysokość słupka:	60 cm
Waga:	8 kg
Zakres regulacji:	45 cm
(przy max obniżeniu huśtawka T spoczywa na podłożu)	
Max obciążenie:	100 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po zawieszeniu huśtawki i wyregulowaniu w zależności od potrzeb wysokości (długość linki), pacjent (dziecko) siedząc w rozkroku obejmuje oburącz słupek. Terapeuta wprawia huśtawkę w ruch wahadłowy, bądź w karuzelowy, dostarczając wrażeń przedsionkowych, umożliwiając ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Maksymalne obciążenie 100kg.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Przed każdym ćwiczeniem sprawdzić pewność umocowania zawieszenia. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności

zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z huśtawki. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić czy pacjent siedzi bezpiecznie na huśtawce. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na huśtawce należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu huśtawki w czystości. Element platformy zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla pokrycia platformy.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania huśtawki T nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Konik KN-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Konik KN-01 przeznaczony do pracy metodą SI, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się i integrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu. Przyrząd ten służy do ćwiczeń mających nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.

II. ZASTOSOWANIE

Konik KN-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Konik ma kształt podłużnej belki wykonanej ze sklejk, zawieszanej poziomo na czterech regulowanych linach, które zamocowane są na specjalnym trawersie a ten zawieszony jest poprzez system lin za pośrednictwem szakli z rolką oraz w miarę potrzeby: krętlika, na haku belki zawieszenia. Belka wyłożona jest miękką pianką i pokryta pokrowcem wykonanym z materiału skóropodobnego. Przyrząd ten porusza się ruchem wahadłowym w płaszczyźnie poziomej. W skład zestawu wchodzi dodatkowy system podwieszania, poszerzający zakres ruchu sprzętu

Wymiary:

Długość:	158 cm
Szerokość:	24 cm
Wysokość :	30 cm
Waga:	14 kg
Zakres regulacji:	40 cm
(max obniżenie konika od podłoża- 10cm)	
Max obciążenie:	150 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po rozpakowaniu wieszamy konika (linka od trawersu) na haku zawieszenia za pośrednictwem szakli z rolką oraz w miarę potrzeby: krętlika, ustalamy wysokość skracając lub wydłużając linki. Dziecko może być w zależności od potrzeb ułożone w leżeniu na plecach, brzuchu, może przyjąć pozycję czworaczną, klęczącą lub inną. Terapeuta wykonuje delikatne ruchy wychylenia w różnych kierunkach: przód- tył, na boki, okrężnie.

Istnieje możliwość uzyskania ruchu obrotowego po założeniu krętlika między szakle a karabińczyk systemu zawieszenia konika.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Sprawdzić przed każdymi ćwiczeniami pewność zamocowania zawieszenia. Wykonywane

ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z konika. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na koniku należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu konika w czystości. Element belki zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla pokrycia.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania konika nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Helikopter HR - 01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Helikopter HR-01 angażuje głównie układ wertykalny oraz proprioreceptywny. Wspomaga mechanizmy posturalne. Kształtuje kokontrakcje, czucie własnego ciała, koordynację między dwiema stronami ciała. Stymuluje do nabywania nowych doświadczeń ruchowych przy zachowaniu elementu zabawy.

II. ZASTOSOWANIE

Helikopter HR-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Przyrząd w formie specjalnych podwójnych szelek zamocowanych przy pomocy kompletu linek. Linki zakończone karabińczykiem umożliwiającym zaczepienie helikoptera za pośrednictwem szaki z rolką na hakach konstrukcji wsporczej zawieszenia.

Wymiary:

Długość linek:	ok. 140 cm
Zakres regulacji linek:	ok. 60 cm
Waga:	1,50 kg
Max obciążenie	75 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po zawieszeniu helikoptera na hakach zawieszenia i ustaleniu odpowiedniej do wzrostu pacjenta długości linek, zakładamy szelki na część barkową a drugie na część udowo- miedniczą. Doprowadzamy dziecko do pozycji poziomej i w zależności od potrzeb, różnicując kierunki oraz intensywność, wykonujemy odpowiednie ruchy. Ponadto możemy polecić dziecku takie zadanie ruchowe by je mogło samodzielnie wykonywać.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Przed każdym ćwiczeniem sprawdzamy pewność zamocowania na hakach. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i wychodzenia z helikoptera. Należy dopilnować aby linki lub szelki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić poprawność zawieszenia pacjenta oraz to, czy żaden element nie powoduje ucisku. Nie dopuścić do splątania linek.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie ułożenia dziecka oraz mocowań i linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na helikopterze należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu helikoptera w czystości, przecierając lekko wilgotną ściereczką elementy helikoptera.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Hamak terapeutyczny HK-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Hamak HK-01 podwieszony punktowo, do relaksacji wywoływanej przez wrażenia proprioceptywne i linearną stymulację przedsionkową oraz do ćwiczeń wzmacniających obustronną koordynację ruchową, konwergencję oczu. Ćwiczenia wykonywane na hamaku doskonale stymulują układ przedsionkowy, proprioceptywny i wzrokowy.

II. ZASTOSOWANIE

Hamak terapeutyczny znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeuta SI.

III. DANE TECHNICZNE

Hamak wykonany z mocnego płótna z odpowiednio zamocowanymi linkami zakończonymi elementami do podwieszania na hakach zawieszenia (za pośrednictwem szaki z rolką).

Wymiary:

Szerokość:	ok. 100 cm
Waga:	0,9 kg
Zakres regulacji linek:	30 cm
Max obciążenie:	75 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po zawieszeniu i ustaleniu wysokości dziecko kładziemy na brzuszku, terapeuta wprowadza w delikatny ruch hamak wykorzystując różne kierunki, a pacjent zbiera przedmioty z podłogi, próbuje trafić piłką w cel, podciąga się za linę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Sprawdzić przed każdym ćwiczeniem pewność zawieszenia. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia na hamak. Nie dopuścić do splątania linek. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek oraz stanu płótna. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy dopilnować aby linki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na hamaku należy pamiętać, że tego typu urządzenia

(w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Nie dziurawić płótna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia hamaka.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Hamak przetrzeć zmiotką, w razie potrzeby odkurzyć na mokro odkurzaczem wodnym.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Deska do ćwiczeń równoważnych RW – 01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Deska do ćwiczeń równoważnych RW-01 przeznaczona jest do ćwiczeń równowagi w różnych pozycjach – od leżącej do stojącej.

II. ZASTOSOWANIE

Deska do ćwiczeń równoważnych RW-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w relacji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Deska do ćwiczeń równoważnych wykonana jest z płyty sklejkowej pokrytej materiałem skóropodobnym o dużym współczynniku tarcia i podparta dwoma kołyskami z litego drewna.

Wymiary:

Wysokość:	13,5 cm
Długość:	118 cm
Szerokość:	48,5 cm
Waga:	9 kg
Max obciążenie:	150 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W zależności od potrzeby, terapeuta decyduje o pozycji pacjenta na równoważni i poruszając delikatnie deską czeka na reakcję dziecka. Dodatkowo można wykorzystać kliny i półwałek.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Podczas wykonywania ćwiczeń należy zadbać aby dziecko nie podłożyło rąerek pod deskę. Należy też asekurować ćwiczącego podczas wchodzenia i schodzenia z deski.

Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Nie dziurawić powłoki ochronnej i nie używać ognia w pobliżu urządzenia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do deformacji i tym samym, do zmiany właściwości produktu.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu przyrządu w czystości. Konstrukcję należy przecierać miękką ściereczką przy użyciu środków myjących rozpuszczalnych w ciepłej wodzie. Elementy pokryciowe zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą uszkodzić pokrycie.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania deski do ćwiczeń równoważnych nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Deska rotacyjna DR – 01



DR-01

Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Deska rotacyjna DR-01 przeznaczona do wykonywania Testu Oczopląsu Porotacyjnego wg J.Ayres oraz do ćwiczeń wspomagających układ przedsionkowy oraz

proprioceptywny. Ponadto stymuluje przekroczenie linii środkowej ciała oraz kształtuje obustronną koordynację.

II. ZASTOSOWANIE

Deska rotacyjna DR-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w leczeniu zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest do dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Na stabilnej podstawie, wykonanej z profili stalowych lakierowanych proszkowo, zamocowano na obrotowym trzpieniu platformę, co umożliwia jej pełny płynny obrót. Platforma wykonana jest z płyty MDF i otapicerowana materiałem skóropodobnym zapewniającym dobrą przyczepność.

Wymiary:

Długość:	50 cm
Szerokość:	50 cm
Wysokość:	11 cm
Waga:	7,5 kg
Max obciążenie	100 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po ustawieniu deski i jej wypoziomowaniu, w zależności od potrzeb terapeuta może ustawić pacjenta w pozycji stojącej, siedzącej lub też klęczącej. Wykonując o różnej intensyfikacji obroty może wykonać tzw. Test Oczopląsu Porotacyjnego wg J.Ayres. Ponadto w terapii dziecko wykorzystując siłę swoich mięśni poprzez odpychanie się może samodzielnie wprowadzać się w ruch. Maksymalne obciążenie 100kg.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP, oraz pewne, bez chybotań, ustawienie podstawy na podłożu. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z deski rotacyjnej- zaleca się przytrzymanie dziecka ręką aż do zajęcia żądanej pozycji. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się sprawdzenie wypoziomowania deski. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami wokół deski. Nie dziurawić powłoki ochronnej i przechowywać z dala od źródeł

ciepła.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu deski rotacyjnej w czystości. Konstrukcję metalową należy przecierać miękką ściereczką przy użyciu środków myjących rozpuszczalnych w ciepłej wodzie. Elementy platformy zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tapicerki.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania deski rotacyjnej nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Trampolina TP-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Trampolina TP-01 przeznaczona do ćwiczeń uzupełniających, przydatna w każdej dyscyplinie sportu. W terapii integracji sensomotorycznej wspomaga układ błędnikowy i czucia głębokiego. Wykorzystywana jest również do kształtowania somatognozji, lateralizacji, koordynacji bilateralnej.

II. ZASTOSOWANIE

Trampolina TP-01 wykorzystywana w rehabilitacji, fitness oraz treningu ogólnorozwojowym. Idealna do ćwiczeń aerobowych oraz fitness. Podczas ćwiczenia angażowane są wszystkie mięśnie ciała, spalany jest nadmiar tkanki tłuszczowej oraz poprawiana ogólna kondycja.

Terapia metodą SI skierowana jest do dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Stabilna trampolina ustawiona na 6 antypoślizgowych nóżkach. Pod nylonowym, wytrzymałym pokryciem 32 mocne sprężyny zapewniają równomierne rozłożenie nacisku. Brzeg trampoliny zabezpieczony pianką i obłożony łatwo zmywalną tkaniną. Dodatkowa wkładka z pianki polietylenowej, pokrytej płótnem, zabezpiecza dziecko przed kontaktem ze sprężynami.

Wymiary:

Średnica:	103 cm
Wysokość:	23 cm
Waga:	7,5 kg
Maksymalne obciążenie:	40 kg.

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po rozpakowaniu należy ustawić trampolinę tak aby 6 antypoślizgowych nóg stało pewnie na podłożu, sprawdzić zamocowanie sprężyn do konstrukcji i płótna. Stojąc jedno nogą lub obiema nogami dziecko wykonuje podskoki w różnym tempie (szybko - wolno) oraz na różną wysokość (wysoko – nisko). Jednocześnie dziecko może próbować naśladować, odwzorować skoki według schematu podanego przez terapeutę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z trampoliny. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić czy nóżki są prawidłowo rozstawione i czy membrana jest dobrze naciągnięta i nie ma oznak uszkodzenia (przerwania). Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z

przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Dookoła trampoliny zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu trampoliny w czystości. Pokrycie zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Deskorolka DK - 01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Deskorolka DK-01 przeznaczona do wspomagania terapii bazalnej (stymulacja taktylna, proprioreceptywna, westybularna). Umożliwia jednoczesną stymulację podstawowych trzech zmysłów. Ponadto kształtuje: napięcie posturalne, koordynację bilateralną, schemat ciała oraz świetnie wspomaga planowanie motoryczne.

II. ZASTOSOWANIE

Deskorolka znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeuta SI.

III. DANE TECHNICZNE

Wymiary:

Długość:	50 cm
Szerokość:	30 cm
Wysokość:	± 8 cm
Waga:	2,5 kg
Maksymalne obciążenie:	75 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wyglądem zbliżona do klasycznej deskorolki (z czterema kółkami o pełnej osi obrotu), posiada szerszą platformę. Terapeuta może w zależności od potrzeb, dziecko ułożyć na powierzchni deskorolki w pozycji leżącej na brzuchu, siedzącej, klęczącej lub też stojącej z podparciem obu nóg lub jedną z drugą odpychającą. Terapeuta może pociągając za sznurek sam wprowadzać deskorolkę wraz z dzieckiem w ruch pokonując określony tor (po płaskim bądź pochylni) lub wskazać zadanie ruchowe mające na celu samodzielne poruszanie się dziecka np. poprzez odpychanie się kończynami górnymi lub dolnymi od podłoża, drabinek, ściany; podciągając się kończynami górnymi o podłoże, linę. Dziecko może samodzielnie poruszać się wokół własnej osi lub w określonych kierunkach jednocześnie nazywając je.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Podczas wykonywania ćwiczeń należy zadbać aby dziecko nie podłożyło rącek pod deskę ani też nie wkręciło paluszków w kółka. Należy asekurować ćwiczącego podczas wchodzenia i schodzenia z deskorolki.

Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka

ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Nie dziurawić powłoki ochronnej i nie używać ognia w pobliżu urządzenia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do deformacji i tym samym, do zmiany właściwości produktu.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu deskorolki w czystości. Elementy wykładziny zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla wykładziny.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Beczka BA-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Beczka BA-01 umożliwia jednoczesną pracę nad podstawowymi trzema układami zmysłu (przedsionkowym, czucia powierzchniowego, czucia głębokiego). Intensyfikując siłę, prędkość ruchu, przyspieszenie oraz kierunek ustawienia głowy dziecka w tym urządzeniu wpływa na nadwrażliwość lub niedowrażliwość przedsionkową. Przyczynia się do wspomagania prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, wspomaga budowę schematu ciała oraz kształtuje reakcje prostowania: nastawcze, równoważne oraz obronnego podporu. W połączeniu z dodatkowym elementem np. piłką lub urządzeniem świetlnym skupiającym wzrok na przedmiocie wspomaga lepszą kontrolę wzrokowo-ruchową. Ponadto zmusza, motywuje do zaplanowania czynności oraz skutecznego jego wykonywania czyli wspomaga planowanie motoryczne.

II. ZASTOSOWANIE

Przyrząd ten znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Przyrząd przypominający beczkę bez dna, wyłożony pianką i obciążony miękką tkaniną powlekana tworzywem sztucznym.

Wymiary:

Średnica zew:	60 cm
Średnica wew:	40 cm
Długość:	60 cm
Waga:	11 kg
Max obciążenie:	75 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz beczki dziecko może leżeć na brzuszku, plecach lub siedzieć po turecku. Stymulacja polega na wprowadzeniu beczki z dzieckiem w ruch (kątowy). Początkowo ruch pokazuje terapeuta pchając beczkę a następnie taki sam ruch próbuje naśladować dziecko korzystając z siły własnych mięśni. Ponadto beczka może służyć jako jeden z elementów toru przeszkód do pokonania, np. tunel lub most. Pozycje: siedząca, klęk obunóż, jednonóż, czworacza, stanie dziecka na beczce oraz odpowiednia stymulacja terapeuty, wymuszają prawidłową kontrolę napięcia posturalnego oraz wspomagają reakcje równoważne i obronnego podporu. Ćwiczenie tzw. taczki (gdzie biodra dziecka oparte są o beczkę a kończyny górne wędrują po podłodze) można udoskonalić wspomagając chód na rękach po różnych fakturach.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Nie dziurawić powłoki ochronnej i przechowywać z dala od źródeł ciepła.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu beczki w czystości. Elementy materiałowe zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla wyłożenia materiałowego.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania beczki nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Kształtki rehabilitacyjne (materace, wałki, półwałki, kliny)



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Materace, wałki i kliny o różnej wielkości przeznaczone są do wykonywania w ramach rehabilitacji leczniczej różnorodnych ćwiczeń jako elementy dzięki, którym po odpowiednim podłożeniu ich względem ciała pacjenta uzyskujemy stosowną pozycję potrzebną do wykonania ćwiczenia, zabiegu rehabilitacyjnego.

II. ZASTOSOWANIE

W rehabilitacji takich schorzeń jak: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (zespół bólowy krzyża), niedowład połowiczny, (chemiplegia, araplegia), usprawnienia ruchowego po amputacji kończyn. Stosowane są w gabinetach, centrach rehabilitacyjnych. Można je również stosować w szkolnych salach gimnastycznych jako elementy do różnorodnych ćwiczeń korekcyjnych młodzieży.

III. DANE TECHNICZNE

Materace, wałki i kliny wykonane są z pianki poliuretanowej, otapicerowane tkaniną zmywalną, skóropodobną typu Skaj, o szerokiej gamie kolorów.

Poniżej podajemy poszczególne zakresy wymiarów dla konkretnych rodzajów kształtek:

Materace - długość L = 180 - 200 cm; szerokość B = 90-100 cm; wysokość H = 4-10 cm (mogą one występować jako jedno, dwu lub trzyczęściowe).

Wałki - średnica O = 15 - 50 cm; długość L = 50 - 100 cm.

Półwałki - wysokość H = 10 - 30; szerokość B = 15 - 40; długość L = 50 - 100 cm

Kliny – wysokość H = 15- 60 cm; szerokość B = 50 - 100 cm; długość L = 30 - 120 cm. Ze względów handlowych utworzono w ramach ww wymiarów typoszereg z odpowiednią symboliką:

Lp. Symbol wyrobu Opis wyrobu Wymiary

1 2 3 4

1. MRS - 3 Materac rehabilitacyjny składany trzyczęściowy 180 x 90 x 4 cm
2. MR - 01 Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy 180 x 90 x 5 cm
3. MR - 02 Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy 180 x 90 x 10 cm
4. MR - 03 Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy 200 x 100 x 5 cm
5. MR - 04 Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy 200 x 100 x 10 cm
6. WR - 15/ 50 Wałek rehabilitacyjny O 15 x 50 cm
7. WR - 25/ 50 Wałek rehabilitacyjny O 25 x 50 cm
8. WR - 35/ 50 Wałek rehabilitacyjny O 35 x 50 cm
9. WR - 45/ 50 Wałek rehabilitacyjny O 45 x 50 cm
10. WR - 50/ 50 Wałek rehabilitacyjny O 50 x 50 cm
11. WR - 15/ 100 Wałek rehabilitacyjny O 15 x 100 cm

- 12. WR - 25/ 100 Wałek rehabilitacyjny O 25 x 100 cm
- 13. WR - 35/ 100 Wałek rehabilitacyjny O 35 x 100 cm
- 14. WR - 45/ 100 Wałek rehabilitacyjny O 45 x 100 cm
- 15. WR - 50/ 100 Wałek rehabilitacyjny O 50 x 100 cm
- 16. KR - 30 Klin rehabilitacyjny wys. H x szer. B x dług. L 15 x 50 x 30 cm
- 17. KR - 60 Klin rehabilitacyjny wys. H x szer. B x dług. L 20 x 50 x 60 cm
- 18. KR - 70 Klin rehabilitacyjny wys. H x szer. B x dług. L 30 x 60 x 70 cm
- 19. KR - 100 Klin rehabilitacyjny wys. H x szer. B x dług. L 60 x 60 x 100 cm
- 20. KR - 120 Klin rehabilitacyjny wys. H x szer. B x dług. L 60 x 100 x 120 cm
- 21. ZKM -01 Zestaw pięcioelementowych kształtek do masażu H x B x L (cm)
 - półwałek lędźwiowy 12 x 17 x 60
 - wałek szyjny O 6 x 25
 - klin duży 19 x 19 x 35
 - 2 kliny małe 9 x 19 x 26

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kształtki rehabilitacyjne nie wymagają instrukcji obsługi. Terapeuta prowadzący ćwiczenia ustala indywidualnie zadania ćwiczącemu wg podręcznika metodycznego i w oparciu o swoją wiedzę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

VI. WARUNKI KONSERWACJI

Pokrycie zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla pokrycia kształtek rehabilitacyjnych.

VII. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie będą usuwane w ramach gwarancji. Do każdego wyrobu producent załącza kartę gwarancyjną, która zawiera również w sobie sposób ewentualnej reklamacji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Gruszka rehabilitacyjna GR-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Gruszka rehabilitacyjna GR-01 do terapii SI wprowadza stymulację taktylną. Wspomaga proces somatognozji oraz ułatwia pracę przy zachowaniu symetrii ciała kształtując linię środkową ciała oraz później integrację, koordynację obustronną. Może ona również spełniać rolę siedziska głównie u dzieci z przepukliną oponową – rdzeniową i mózgowym porażeniem dziecięcym.

II. ZASTOSOWANIE

Gruszka rehabilitacyjna znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Gruszka rehabilitacyjna wypełniona jest miękkim granulem piankowo-styropianowym, pokryta wytrzymałą, a zarazem miękką tkaniną. Doskonale dopasowuje się do ciała.

Wymiary:

Średnica:	60 cm
Wysokość:	100 cm
Waga:	4 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po jej ustawieniu rehabilitant decyduje o sposobie jej wykorzystania podając odpowiednią stymulację, może być również miejscem odpoczynku, zastępując siedzisko.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Zabrania się wchodzenia pod gruszkę- powoduje to ograniczenie dopływu powietrza do dziecka. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów- może to doprowadzić do deformacji i tym samym, do zmiany właściwości produktu.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu gruszki rehabilitacyjnej w czystości. Pokrycie zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tapicerki.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania gruszki rehabilitacyjnej nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Huštawka grzybek HTG-01



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Huśtawka grzybek HTG-01 przeznaczona jest do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

II. ZASTOSOWANIE

Huśtawka grzybek HTG-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Konstrukcję nośną huśtawki wykonano z elementów stalowych lakierowanych proszkowo a siedzisko w formie koła ze sklejki. Konstrukcja wyłożona jest pianką i otapicerowana materiałem skóropodobnym. W słupku huśtawki zamocowano jeden koniec linki, drugi- zakończony karabińczykiem i układem regulacji długości- wieszany na haku zawieszenia za pośrednictwem szekli z rolką i krętlika.

Wymiary:

wysokość -	67 cm
średnica chwytu -	17 cm
średnica siedziska -	71 cm
waga	8,5 kg
Max obciążenie:	150 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostarczoną konstrukcję należy rozpakować i ustawić (zawiesić) w miejscu przewidzianym do zmontowania. W zależności od potrzeb jej długość możemy zmieniać, skracając lub wydłużając stosowne linki. Terapeuta może ułożyć pacjenta na leżysku w następujących pozycjach: leżenie na plecach, brzuchu, w tzw. pozycji czworaczek, klęczącej, klęku jednonożnym z wykrokiem, siadu bokiem, po turecku i siad prosty oraz pozycji stojącej. Dodatkowo można wykorzystać tzw. półwałek i próbować w/w pozycji. Ruchy jakie terapeuta może wykonać w zależności od potrzeb to delikatne wychylenia przód-tył, w bok i ruchy okrężne. Dziecko może wykonać ruch podciągający się za linę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP, oraz przed każdymi zajęciami sprawdzić należy pewność mocowania do haka zawieszenia. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z huśtawki. Należy dopilnować aby linki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Przed

przystąpieniem do ćwiczeń należy wypoziomować platformę i sprawdzić poprawność zawieszenia huśtawki. Nie dopuścić do splątania linek. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na huśtawce należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.


VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Konserwacja polega na utrzymaniu huśtawki terapeutycznej w czystości. Wykładzinę zmywać ciepłą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tworzywa..

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Platforma wisząca okrągła PWO-01

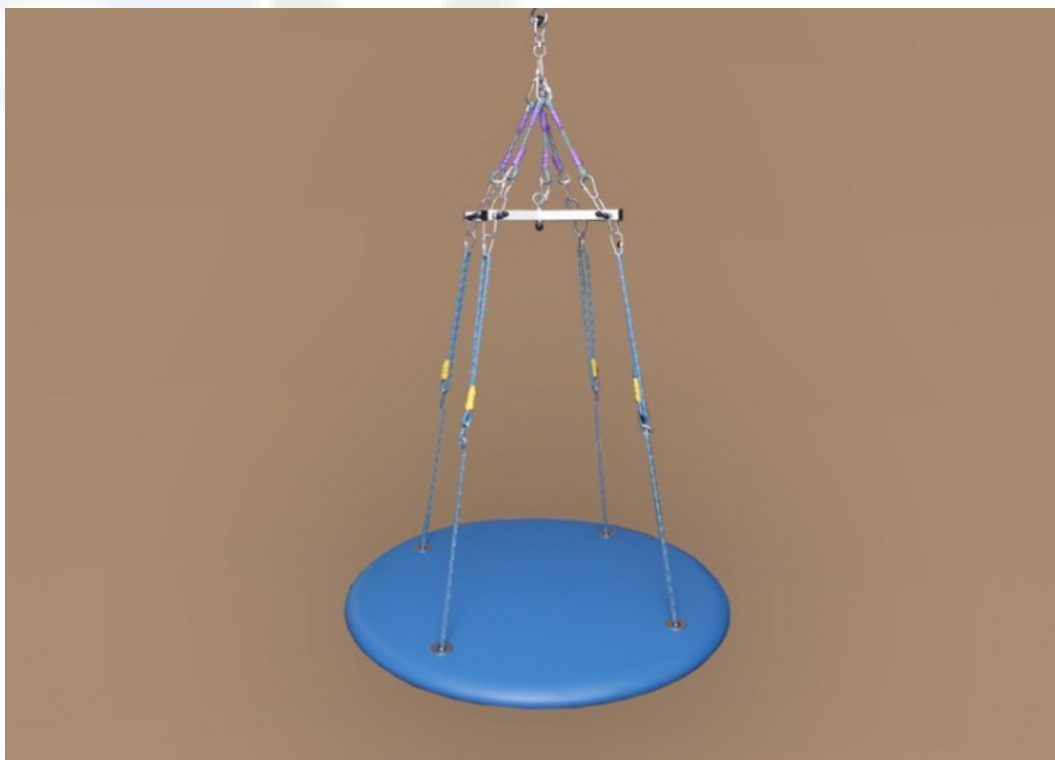

Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Platforma wisząca okrągła PWO-01 przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

II. ZASTOSOWANIE

Platforma wisząca okrągła PW0-01 znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Terapia skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia powinny być prowadzone w reakcji jeden terapeuta jedno dziecko (ze względu na bezpieczeństwo oraz na korzyści płynące z terapii). Zaleca się by ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanego terapeutę SI.

III. DANE TECHNICZNE

Siedzisko platforma w wykonanie jest z płyty MDF, wyłożone pianką i pokryte zmywalnym, miękkim materiałem skóropodobnym. Cała konstrukcja podwieszona jest za pomocą 4 regulowanych linek, które parami zamocowane są na karabińczykach. W zależności od rodzaju ćwiczeń platforma może być zawieszona za pośrednictwem dwóch szaki z rolkami na sąsiednich hakach lub na jednym haku za pośrednictwem szaki z rolką i krętlikiem.

Wymiary:

średnica -	95 cm
waga -	13,5 (razem z zawiesiem)
Zakres regulacji:	40 cm
(przy max obniżeniu platforma spoczywa na podłożu)	
Max obciążenie:	120 kg

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostarczoną konstrukcję należy rozpakować i zawiesić na hakach zawieszenia. Pacjent może leżeć, siedzieć, klęczeć na platformie leżyska w zależności od indywidualnego toku ćwiczeń, ustalonego przez terapeutę. O ruchu wahadłowym, okrężnym decyduje osoba prowadząca terapię.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z platformy. Należy dopilnować aby linki nie owinęły się dookoła szyi ćwiczącego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić wypoziomowanie i poprawność zawieszenia platformy. Nie dopuścić do splątania linek. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się dokładne sprawdzenie mocowań, linek. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych

predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z urządzenia. Ze względu na wykonywany ruch wahadłowy na platformie należy pamiętać, że tego typu urządzenia (w ruchu) zajmują więcej miejsca. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Elementy tapicerowane zmywać ciepłą wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla tapicerki (wykładziny leżyska).

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu nabywcy jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce handlowej, która nabyła wyrób bezpośrednio od producenta. Gwarancja na wydany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawieszenia z zawieszami nie będą usuwane w ramach gwarancji. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Piłki do stymulacji



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Piłki z kolcami pobudzają zakończenia czuciowe ciała. Doskonale do masażu całego ciała i stymulacji dotykowej.

II. ZASTOSOWANIE

Wykorzystywane w rehabilitacji, fitness oraz treningu ogólnorozwojowym, do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych, a także korekcji wad postawy.

III. DANE TECHNICZNE

Piłki posiadają stożkowate wypustki na powierzchni. Masuje ciało powodując lepsze ukrwienie.

Wymiary:

Średnica: 6cm, 8cm, 12cm, 24cm, 55cm, 65cm

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń skontroluj stan techniczny piłki.
2. Nie należy wystawiać piłki na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.
3. O sposobie wykorzystania decyduje terapeuta.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wystrzegać się ostrych krawędzi, wystających ostrych elementów na sali ćwiczeń. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z piłki. Zabrania się korzystania z urządzenia bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z piłki. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Nie używać ognia w pobliżu urządzenia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Piłki można myć w letniej wodzie przy użyciu łagodnych środków czystości.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.

Piłki gimnastyczne



Spis treści

I. PRZEZNACZENIE

II. ZASTOSOWANIE

III. DANE TECHNICZNE

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

VI. WARUNKI KONSERWACJI

VII. WARUNKI GWARANCJI

I. PRZEZNACZENIE

Piłki gimnastyczne przeznaczone do rehabilitacji i zabaw z dziećmi, mogą być używane także na zewnątrz. Polecane między innymi do ćwiczeń koordynacyjnych.

II. ZASTOSOWANIE

Wykorzystywane w rehabilitacji, fitness oraz treningu ogólnorozwojowym, do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, schorzeniach neurologicznych, a także korekcji wad postawy.

III. DANE TECHNICZNE

Wymiary:

Średnica 55cm

IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Upewnij się, że ćwiczący czuje się bezpiecznie na piłce.
2. Stawiaj piłkę na równym, stabilnym podłożu.
3. Podczas ćwiczeń zachowaj bezpieczną odległość od elementów wyposażenia pomieszczenia.
4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń skontroluj stan techniczny piłki.
5. Nie należy wystawiać piłki na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.
6. Piłkę należy pompować w temperaturze pokojowej, przy pomocy specjalnej pompki lub kompresora – pierwotnie do 80% jej wielkości. Następnego dnia dopompuj ją do podanego rozmiaru
7. Piłka może po kilku tygodniach utracić niewielką ilość powietrza. Jest to zjawisko normalne. W takiej sytuacji należy dopompować piłkę.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP. Wystrzegać się ostrych wystających elementów, które mogłyby uszkodzić piłkę w trakcie ćwiczeń. Wykonywane ćwiczenia mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem terapeuty posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Ćwiczącemu należy zapewnić asekurację podczas wchodzenia i schodzenia z piłki. Zabrania się korzystania z piłki bez nadzoru terapeuty oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach dziecka a tym samym o indywidualnym doborze terapii. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka ćwiczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Należy zapewnić swobodne i bezkolizyjne (z drugim urządzeniem lub innym ćwiczącym) korzystanie z piłki. Zaleca się wyłożenie podłogi materacami lub matami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

VI. WARUNKI KONSERWACJI.

Piłki można myć w letniej wodzie przy użyciu łagodnych środków czystości.

VII. WARUNKI GWARANCJI.

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Dokument sprzedaży jest jednocześnie dokumentem warunkujący możliwość dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji.