

Oznaczenia stosowane w instrukcji obsługi i na etykiecie

 Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa. Należy je uważnie przeczytać i stosować się do nich, aby uniknąć szkód na osobach i na rzeczach.	 Wytwórca  Rok produkcji  wyrób medyczny	 Zapoznać z instrukcją obsługi  numer seryjny
---	---	--

1. Przeznaczenie

Tablice do ćwiczeń manualnych dłoni bez oporu służą do ćwiczeń mających na celu poprawę zdolności manipulacyjnych oraz koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej ręki. Przy dysfunkcjach po stanach pourazowych, w schorzeniach neurologicznych i reumatoidalnych. Przyczyniają się również do wzrostu siły mięśni ręki i przedramienia. Stosowane są w warunkach szpitalnych: w salach rehabilitacyjnych, oddziałach chirurgicznych, neurologicznych jak również w przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach zdrowia. Celem ich stosowania jest leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz łagodzenie skutków urazów i upośledzeń.

2. Budowa

Dane techniczne:	KTM	KTM-BO
Regulacja wysokości blatu:	54 – 86 cm	54 – 86 cm
Błat (szer. x dł.)	72 x 52 cm	72 x 52 cm
Masa:	15kg	12kg

Podstawa tablicy wykonana jest z kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym, pokrytych lakierem proszkowym. Konstrukcja jest spawana. Stopki wykonane są z gumy kauczukowej szarej nie brudzącej podłoża, służąca do regulacji poziomu. Łącznik wykonany z kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym, konstrukcja spawana.

Błat wykonany jest ze sklejki bukowej, polakierowanej lakierem ekologicznym. Wszystkie uchwyty w przyrządach na blacie wykonane są z drewna bukowego. Elementy mocujące przyrządy wykonane są ze stali. Sprężyny wykonane są z drutu stalowego fi 6mm.

3. Stosowanie

- Ustawić blat drewniany na odpowiedniej wysokości blokując pokrętką śrubowym. Sprawdzić skuteczność zablokowania poprzez naciśnięcie na blat.
- Wyregulować poziom za pomocą stopek gumowych – wkręcić lub wykręcić stopkę gumową
- Wykonywać ćwiczenia wyłącznie według zaleceń specjalistów – fizjoterapeuty/ lekarza..

3. Dezynfekcja i Konserwacja

Konserwacja polega na myciu i wycieraniu miękką zwilżoną szmatką z dodatkiem detergentów. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia elementów przyrządów. Elementy wyrobów mogą być dezynfekowane środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

Wykaz przykładowych środków dezynfekujących:

- „Bechtozoid” spray
- „Surfasept” producent Iodex S.A. Polska,
- „Chlorizol” producent Septoma Polska.

Środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Warunki przechowywania

Tablica powinna być przechowywana w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma dużych wahań temperatur. Tablicę należy przechowywać w temperaturze od 10°C do 40 °C w pozycji poziomej. Nie narażać na działanie promieni słonecznych oraz chronić przed opadami atmosferycznymi. Standardowy poziom wilgotności w jakim wyrób jest przechowywany, użytkowany lub transportowany to nie więcej niż 80%.

6.Warunki transportu

W trakcie transportu wyrobów nie należy piętować oraz rzucać. Tablicę wraz z wystającymi elementami należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

7.Zalecenia

- Użytkować wyrób zgodnie z instrukcją obsługi,
- Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać



Zabrania się siadania na tablice. Siadanie na tablice grozi jej uszkodzeniem oraz urazem pacjenta.

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w wypadku, gdy:
 - a. producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b. w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka i elementy plastikowe sprzętu.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską, obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu- 10lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania-na terenie Polski- URPL.

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

Instrukcja obsługi

TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI model KTM-BO bez oporu, KTM z oporem



Wytwórca:

KINESIS Sp. z o.o.
ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45



Wydanie 03/2024, z dnia 18.11.2024