

	Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, Polska tel/fax.: +48 13 463 80 35 kom. +48 608074052 mail: biuro@juventas.pl www.juventas.pl	
	Instrukcja użycia Leżanki drewniane	
	RELAX MAX NP; RELAX; RELAX MAX; RELAX II 55; RELAX II 65; RELAX II MAX AFRODYTA I 55; AFRODYTA I 65; AFRODYTA I 75; AFRODYTA II HERA 55; HERA 65; HERA 75 GAIA I; GAIA II; GAIA III	
<i>Dokładna specyfikacja techniczna dostępna na stronie www.juventas.pl</i>		
Przeznaczenie	- Drewniana leżanka przeznaczona do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz masażu w celu łagodzenia skutków urazów. - Wyrób jest dedykowany dla profesjonalnego operatora	
Montaż i obsługa	- Leżankę należy zmontować wg. załączonej instrukcji montażu, następnie ustawić w miejscu przeznaczenia. Wypoziomować leżankę lub ustabilizować blokując kółka (wariant K). Użytkownikiem leżanki powinna być osoba wykwalifikowana, która powinna przeprowadzać na leżance zabiegi zgodne z jej przeznaczeniem. Powinna również ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji, oraz asekurować przy wchodzeniu i schodzeniu z leżanki. Skokowa regulacja wysokości (Afrodyta II, GAIA I, GAIA II, GAIA III). Odbywa się ręcznie, należy odkręcić nakrętki znajdujące się na każdej z nóg, zdjąć ruchomą nóżkę, umieścić nóżkę na odpowiedniej wysokości, zakręcić nakrętkę. Należy wykonać tą samą czynność na każdej z nóg. Regulacja kąta nachylenia podglówka (Relax Max NP, Relax, Relax Max, Relax II, Relax II Max). Odbywa się ręcznie za pomocą drewnianego wspornika. W celu podniesienia podglówka należy unieść go na maksymalną wysokość, po czym podstawić pod niego wspornik przytwierdzony do konstrukcji leżanki. W celu opuszczenia podglówka należy unieść go o kilka centymetrów, po czym złożyć wspornik przytwierdzony do konstrukcji leżanki i opuścić podglówek do najniższej pozycji. Regulacja kąta nachylenia podglówka (Afrodyta I, Afrodyta II, Hera, Gaia II). Odbywa się za pomocą mechanizmu typu rostomat (sześciostopniowa regulacja). W celu podniesienia podglówka należy unieść go i ustawić w jednym z sześciu położeń. W celu opuszczenia podglówka należy unieść go do zwolnienia blokady i opuścić do najniższej pozycji. Regulacja kąta nachylenia podnóżka (Relax II, Relax II Max). Odbywa się ręcznie za pomocą mechanizmu typu rostomat (sześciostopniowa regulacja). W celu podniesienia podnóżka należy unieść go i ustawić w jednym z sześciu położeń. W celu opuszczenia podnóżka należy unieść go do zwolnienia blokady i opuścić do najniższej pozycji. Regulacja kąta nachylenia wszystkich segmentów (Gaia III). Odbywa się ręcznie za pomocą sprężyn gazowych. Podniesienie dźwigni znajdującej się przy poszczególnym segmencie powoduje zwolnienie sprężyny i umożliwia ustawienie segmentu pod żądanym kątem, zwolnienie dźwigni blokuje segment w ustawionym położeniu. Demontaż, montaż zatyczek otworów w blacie. Odbywa się poprzez wyciągnięcie i włożenie w gniazda zatyczek. Montaż akcesoriów leżanek GAIA - Podglówek. Aby zamontować podglówek należy wsunąć wsporniki podglówka w otwory znajdujące się w przedniej części leżanki.	

	• Podłokietniki. Aby zamontować podłokietniki należy wsunąć wsporniki podłokietników w otwory znajdujące się po obu stronach leżanki. • Wieszak na papier. Aby zamontować wieszak na papier należy wsunąć wsporniki wieszaka w otwory znajdujące się w tylnej części leżanki.
Wskazania do stosowania	• Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz masażu
Przeciwwskazania do stosowania	• Wykonywanie zabiegów w stosunku do pacjentów o wzroście przekraczającym wymiary leżanki • Nie stosować w stosunku do pacjentów nadpobudliwych wykonujących nieskoordynowane ruchy – możliwość upadku z leżanki
Dezynfekcja	• W celu uniknięcia zakażenia skóry pacjenta, przed przystąpieniem do zabiegów, należy zdezynfekować blat leżanki. • Do tapicerki skóropodobnej (Standard Line) zaleca się stosowanie preparatu typu Glukoprotamina lub alkohol izopropylowy max. stężenie 70 %. Do dezynfekcji tapicerki winylowej (Exclusive Line) zaleca się stosowanie preparatów typu: Antibac, Brial, Desomed Rapid, FD 360, FD 366, Kohrsolin, Meliseptol Foam Pure, Mikrozid lub ściereczek Cleanisept.
Mycie	• Wyrób medyczny można myć wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. • Nie wolno stosować środków zawierających wolny tlen oraz chlor – może to spowodować uszkodzenie tapicerki oraz powłok lakierniczych
Obsługa bieżąca	Raz na kwartał. • Sprawdzanie sprężyn gazowych. Należy skontrolować poprawność działania sprężyn gazowych przez ich oględziny. Stwierdzenie osłabienia w działaniu oraz wszelkie wycieki należy bezzwłocznie zgłaszać do firmy JUVENTAS. Obsługa raz na pół roku. • Sprawdzanie połączeń ruchomych. Wszystkie połączenia ruchome należy przesmarowywać raz na pół roku lub w momencie wystąpienia głośnych odgłosów w czasie ich pracy. Jako środek zalecamy stosowanie dostępnych na rynku preparatów smarujących. • Sprawdzanie połączeń śrubowych. Należy skontrolować poprawność połączeń śrubowych i w razie potrzeby usuwać pojawiające się luzy. W przypadku braku takiej możliwości należy ten fakt bezzwłocznie zgłaszać do firmy JUVENTAS.
Przeglądy serwisowe	• Wyroby należy poddawać okresowym – dwu letnim przeglądom wykonywanym przez serwis producenta
Czas życia	• Czas życia wyrobu wynosi 15 lat od daty zakupu po warunkiem okresowych przeglądów serwisowych
	• Wszystkie zabiegi powinien wykonywać wykwalifikowany personel, • Zabronione jest używanie niesprawnej, uszkodzonej leżanki, • Należy przeprowadzać dezynfekcję leżanki przed zabiegiem u każdego pacjenta, • Należy asekurować pacjenta podczas wejścia i zejścia z leżanki, • Przed regulacją leżanki, sprawdzić czy pacjent nie położył rąk w pobliżu regulowanych mechanizmów, • Zabronione jest pozostawianie pacjenta leżance bez opieki, • Zabronione jest przemieszczanie leżanki wraz z pacjentem, • Zabronione jest korzystanie z niestabilnej leżanki, • Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń, • Zabronione jest siadanie na akcesoriach, • Zabronione jest opieranie się o akcesoria, • Nie należy montować akcesoriów nie należących do zestawu, niewyprodukowanych przez firmę JUVENTAS.
Skróty nazw wyposażenia dodatkowego	K Koła jezdne z hamulcem PP Podglówek prosty PR Podglówek regulowany W70 Wieszak na papier W60D Wieszak na papier drewniany WTZ Wycięcie na twarz, zatyczka PLUS Podłokietniki
Wersja wydania 08_2020	