


SaeboFlex®

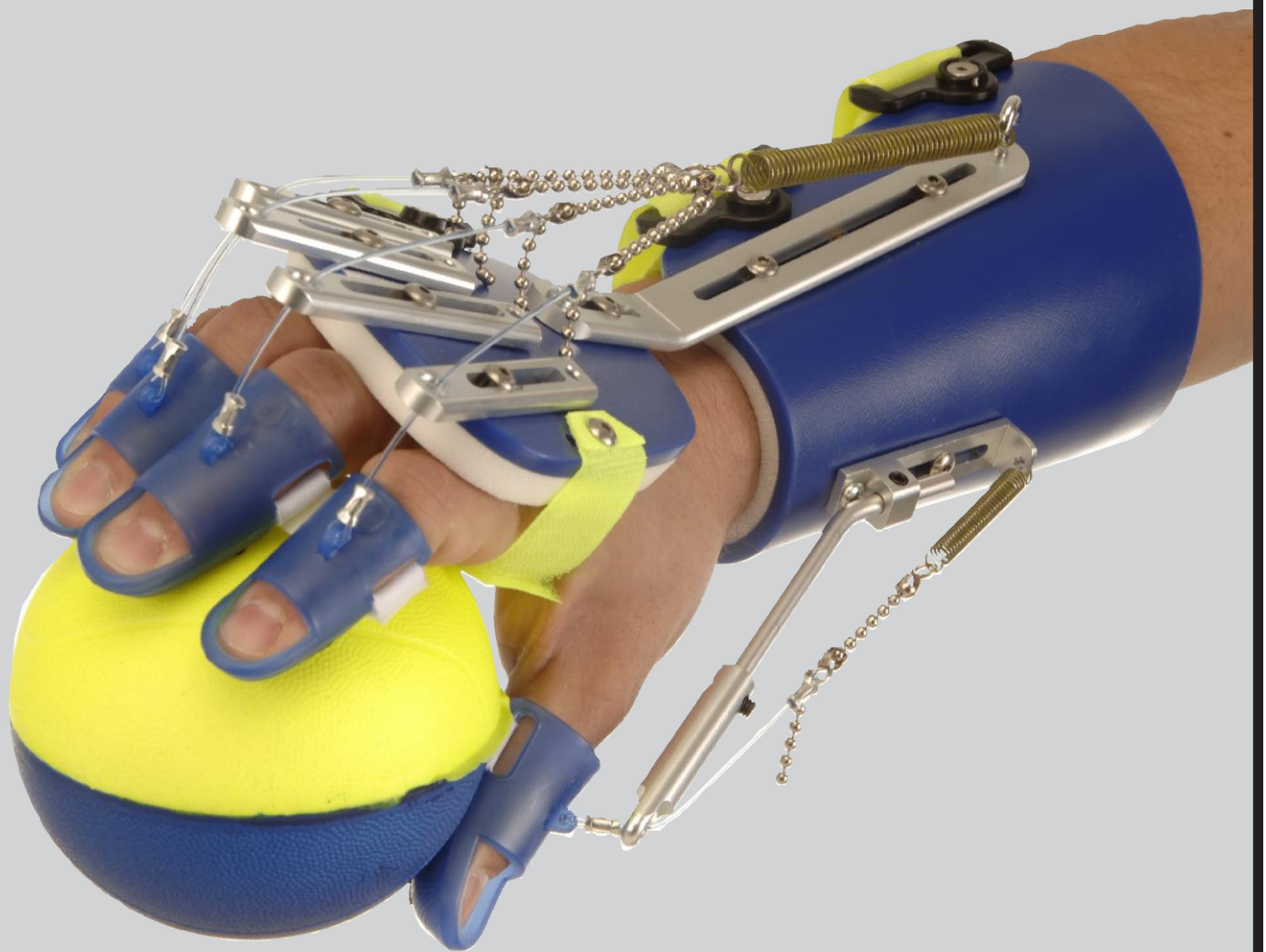

 **Saebo**
Leaders In Stroke Rehabilitation

WSTĘP:

SaeboFlex[®] to produkowana na zamówienie, dynamiczna orteza nadgarstka, dłoni i palców (WHFO). Zginanie jest wykonywane za pomocą palców i kciuka, a wyprost za pomocą linki. Orteza służy dwóm celom: utrzymaniu ręki w pozycji funkcjonalnej oraz umożliwieniu zaangażowania ręki w czynności funkcjonalne.

KORZYŚCI:

- Zaprojektowana tak, aby utrzymać nadgarstek, dłoń, kciuk i palce z upośledzeniem neurologicznym w funkcjonalnej pozycji
- Pomaga zapobiegać przykurczom nadgarstka, dłoni, kciuka i palców i je korygować
- Utrzymuje i poprawia zakres ruchu dłoni, kciuka, palców i całej kończyny górnej
- Zwiększa siłę nadgarstka, dłoni, kciuka, palców i całej kończyny górnej
- Wspiera w wykonywaniu czynności związanych z funkcjonalnym chwytaniem i uwalnianiem za pomocą niesprawnej ręki/dłoni

USTAWIANIE POZYCJI:

Nosząc **SaeboFlex** w celu ustawiania pozycji, pacjent powinien stopniowo wydłużać czas noszenia. (Proces ten powinien być nadzorowany przez wykwalifikowanego terapeutę/pracownika służby zdrowia). Ustawianie pozycji powinno odbywać się w czasie czuwania pacjenta. Noszenie urządzenia **SaeboFlex** podczas snu nie jest zalecane.

CZYNNOŚCI FUNKCJONALNE:

Zalecamy przeprowadzanie dwóch 45-minutowych sesji ćwiczeń funkcjonalnych polegających na chwytaniu i rozluźnianiu każdego dnia. Podczas konsultacji z wyszkolonym fizjoterapeutą SaeboTrained, pacjent może wybrać najlepsze ćwiczenia funkcjonalne, które odpowiadają jego konkretnym potrzebom. Po każdej 45-minutowej sesji urządzenie SaeboFlex należy zdjąć na co najmniej 30 minut. Każdego dnia można wykonać więcej niż dwie 45-minutowe sesje.

WSKAZANIA:

- Udar
- Urazowe uszkodzenie mózgu (T.B.I.)
- Niepełne uszkodzenie rdzenia kręgowego
- Mózgowe porażenie dziecięce
- Osoby cierpiące na niedowład połowiczny

PRZECIWWSKAZANIA:

- Poważne deformacje stawów palców i kciuka wtórne do wiotkości lub rozluźnienia stawów
- Każdy rodzaj zapalenia stawów palców lub kciuka
- Ograniczające ruch, utrwalone przykurcze palców, kciuka i nadgarstka
- Silny obrzęk przedramienia i/lub dłoni
- Otwarte rany lub miejsca zainfekowane
- **SaeboFlex** nie zostało zaprojektowane do użytku na zdrowej ręce, ponieważ dynamiczne sprężyny oporowe nie są dostosowane do normalnego napięcia mięśni i nie przyniosłyby żadnych korzyści funkcjonalnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. W przypadku wystąpienia bólu podczas noszenia lub korzystania z urządzenia **SaeboFlex** niezwłocznie ich zaprzestań i przed ponownym użyciem skontaktuj się z opiekunem medycznym.
2. Jeśli pojawi się nietypowy obrzęk, przebarwienie skóry, dyskomfort lub drętwienie, natychmiast zdejmij urządzenie i przed ponownym użyciem skontaktuj się z opiekunem medycznym.

3. Podczas funkcjonalnego korzystania z urządzenia **SaeboFlex** nie powinno się go nosić dłużej niż 45 minut.
4. Orteza **SaeboFlex** musi być ściśle dopasowana, ale wygodna, bez utrudniania krążenia.
5. Nie pozwalaj bawić się urządzeniem **SaeboFlex** dzieciom znajdującym się bez nadzoru. Urządzenie zawiera małe części, których połknięcie może spowodować zadławienie.

KONSERWACJA:


Urządzenie **SaeboFlex** należy czyścić wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Podczas czyszczenia nie używać środków chemicznych/ściernych, które mogą uszkodzić urządzenie **SaeboFlex** i pogorszyć jego wydajność.

ZAKŁADANIE **SaeboFlex**:


Pacjent i/lub opiekun musi znać zasady prawidłowego zakładania ortozy **SaeboFlex**. Aby zapewnić prawidłowe działanie, orteza **SaeboFlex** musi być zakładana za każdym razem w tym samym obszarze anatomicznym. Poniżej przedstawiono zalecane kroki zakładania ortozy **SaeboFlex**. Jeśli nadal będziesz mieć trudności z założeniem ortozy **SaeboFlex**, skontaktuj się ze swoim fizjoterapeutą lub zadzwoń do naszego zespołu wsparcia technicznego: 888-284-5433.

Krok #1: Upewnij się, że wszystkie trzy paski (dwa na przedramię i jeden na dłoń) są odpięte.

Krok #2: Połóż kciuk na kości nadgarstka (głowa łokciowa mięśnia) (ilustr. 1). Umieść **SaeboFlex** na przedramieniu. Upewnij się, że krawędź dystalna (najbliżej nadgarstka) osłony przedramienia znajduje się tuż nad kością nadgarstka (ilustr. 2).

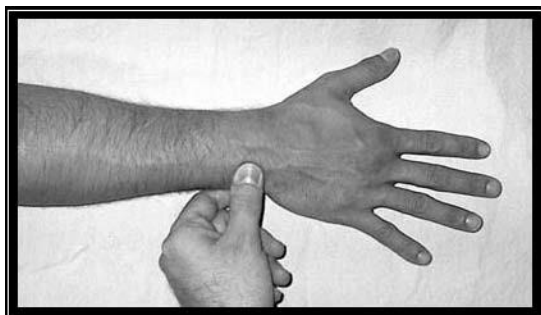


Ilustracja #1

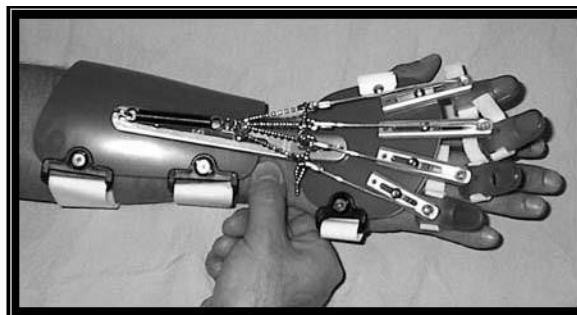


Ilustracja #2

Krok #3: Po ustawieniu osłony przedramienia we właściwej pozycji zamocuj dwa paski na przedramieniu. Upewnij się, że są one zabezpieczone, aby osłona przedramienia nie przemieszczała się w dół ponad kość nadgarstka (ilustr. 2).

Krok #4: Aby założyć pasek na dłoń, przyłóż grzbiet dłoni i palce do uchwytu. Po ich ułożeniu z dłonią wyśrodkowaną pod uchwycem, zamocuj pasek.

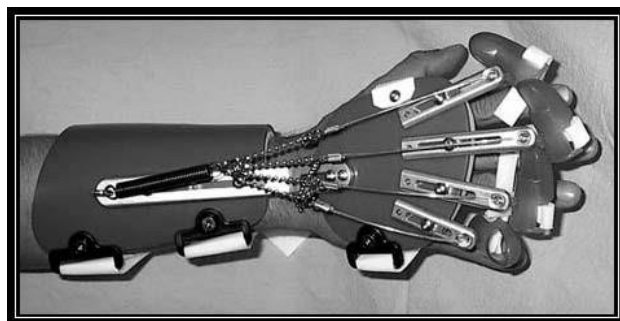


Krok #5: Po zabezpieczeniu wszystkich trzech pasków zdejmij sprężynę palca z zaczepu na mocowaniu nadgarstka znajdującym się na osłonie przedramienia, obracając zaczep o pół obrotu, tak aby otwór był skierowany w bok. Zdejmij sprężynę, aby opuścić nakładki na palce.

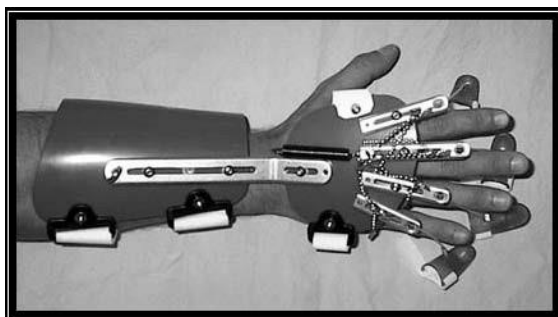

Krok #6: Zaczynając od palca wskazującego i kończąc na małym, wsuwaj każdy palec do odpowiedniej nakładki na palec. Upewnij się, że czubek palca dochodzi do końca nakładki. Ze względu na obniżone napięcie dłoni i palców ten krok może być trudny dla niektórych osób.


Na początku konieczne może być otwarcie białego paska z rzepem, który przytrzymuje nakładkę na palec. Po pewnym czasie możliwe będzie wsunięcie palca do nakładki na palec bez otwierania pasków na rzepy. Przytnij nadmiar długości pasków nakładki na palec. (Fizjoterapeuta powinien przyciąć te paski w placówce zdrowia).

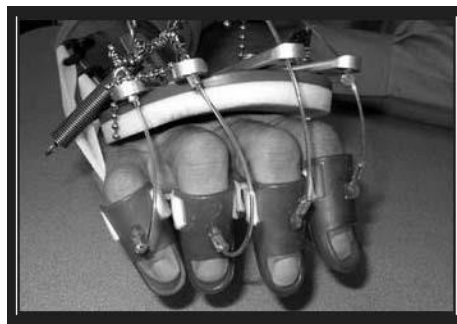


Krok #7: Gdy wszystkie cztery nakładki na palce zostaną bezpiecznie założone, przyłóż palce do ich mocowania (ilustr. 3). Ponownie zamocuj sprężynę palca do zaczepu na mocowaniu nadgarstka znajdującym się na przedramieniu (ilustr. 4).

Podczas naciągania sprężyny należy uważać, aby nie pociągnąć palców do góry, ponieważ może to spowodować nadmierne rozciągnięcie sprężyny lub otwarcie pierścienia rozciątego (okrągłego pierścienia na końcu sprężyny).

Zalecamy wyprostowanie palców i utrzymanie ich w pozycji wyprostowanej poprzez oparcie ich o udo lub stół.

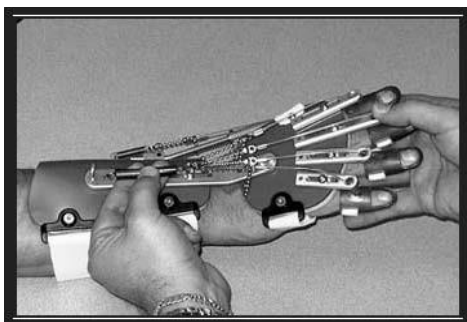

Ilustracja 3

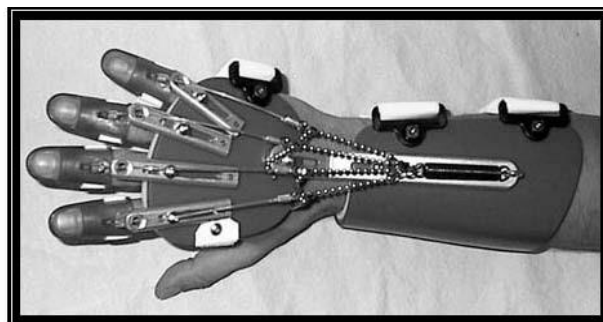

Ilustracja 4

Krok #8: Aby nałożyć nakładkę na kciuk, odczep sprężynę kciuka przymocowaną do mocowania kciuka na przedramieniu. Nakładka na palec powinna zwisać w kierunku kciuka.



Krok #9: Wsuń kciuk do nakładki na palec. Upewnij się, że czubek kciuka znajduje się na końcu (czubku) wewnętrznej części nakładki na palec i nie jest widoczna wolna przestrzeń.



Krok #10: Po założeniu nakładki na kciuk ponownie zamocuj sprężynę kciuka na mocowaniu kciuka. Uważaj, aby nie naciągnąć sprężyny zbyt mocno.



Pielęgnacja i czyszczenie zestawu Style SaeboFlex i SaeboReach

- W urządzeniach zestawu Style można usunąć piankowe wkładki i zastąpić je wymiennymi wkładkami piankowymi dostarczonymi w zestawie Saebo. W zestawie znajdują się również wymienne paski do nakładek na palce, części dłoni i przedramion.
- Pozostałe części/elementy można czyścić za pomocą tych samych roztworów czyszczących, które są stosowane do innego sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów eksploatacyjnych, takich jak Dispatch.
- Rozpyl lub nanieś roztwór na czystą szmatkę i wytrzyj.
- Jeśli urządzenie było użytkowane tylko kilka razy, wyściółka z pianki o zamkniętych komórkach może być ponownie użyta po przetarciu i wyczyszczeniu tym samym roztworem.

Pielęgnacja i czyszczenie wykonanych na zamówienie SaeboFlex i SaeboReach

- Użyj płynu dezynfekującego Dispatch lub innego środka dezynfekującego do użytku szpitalnego lub spryskaj czystą ściereczkę i przetrzyj.
- Piankowa wyściółka ma zamknięte komórki i nie jest chłonna. Można ją przecierać roztworem dezynfekującym i czystą ściereczką.

W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:



Saebo, Inc.
2459 Wilkinson Blvd
Suite 120
Charlotte, NC 28208
Tel: 888.284.5433
www.saebo.com



www.saebo.com
888-284-5433

With Saebo . . . There Is No Plateau In Sight®

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może narazić użytkownika na działanie ftalanu diizonylowego (DINP), uznanego przez stan Kalifornia za substancję rakotwórczą. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW.P6Warnings.ca.gov.

Produkcja i dystrybucja:

 **Saebo, Inc.** 2459
Wilkinson Blvd Ste. 120-B
Charlotte, NC 28208

888-284-5433
sales@saebo.com
www.saebo.com

GMDN: 41457
BUDIDI/GMN: 0850331006SaeboFlexPH



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.
info@europeanddevicesolutions.co.uk
www.europeanddevicesolutions.co.uk

Sponsor australijski:
Ausmedic Australia Pty Ltd
Unit 3, 3 Basalt Road Pemulwuy NSW
2145 1300 473 422
Performhealth.com.au



Wyd. 02|2023