


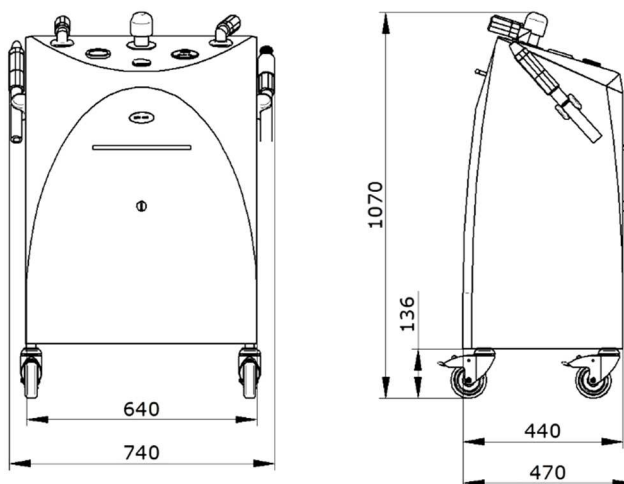

Schemat instalacji i wymiary urządzenia do masażu podwodnego AQUAMOBIL [mm]

## UWAGA!

- **Obwód zasilania musi być wydzielony tylko dla zasilania tego urządzenia (nie może zasiląć żadnych innych urządzeń) i musi zawierać:**
  - wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym  $\leq 30\text{mA}$ ;
  - wyłącznik zasilania, rozłączający jednocześnie wszystkie bieguny, zapewniający odstęp między stykami przynajmniej 3 mm, umieszczony w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp personelu w przypadkach awaryjnych. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny z pozycji normalnego użytkownika przez operatora lub personel serwisowy, należy zapewnić dodatkowe środki pozwalające na jego zablokowanie w pozycji wyłączonej.
  - przekrój przewodu zasilającego o średnicy  $3 \times 1,5\text{ mm}^2$ .  
Dokładną długość swobodnego końca przewodu ustalić taką, aby umożliwić swobodną pracę urządzenia przy dedykowanej wannie/zbiorniku terapeutycznym.
- Podłączenia układu elektrycznego urządzenia do sieci zasilania 230V~50Hz powinien dokonać elektryk z uprawnieniami. Jednym z warunków gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego wanny przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie musi być przyłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.
- Urządzenie musi być przyłączone do instalacji elektrycznej **na stałe**.
- Obudowa zespołu zaciskowego sieciowego jest wyposażona w dławnicę zapewniającą szczelne zaciśnięcie na obłym przewodzie o średnicy 5 - 10 mm.  
W przypadku zastosowania przewodu o innym rozmiarze, należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę zespołu zaciskowego sieciowego przed dostępem wody minimum IPX5.
- Instalacja elektryczna, do której jest podłączane urządzenie, musi spełniać wymagania odpowiadające obowiązującym przepisom prawa (np. PN-HD 60364-7-710, PN-HD 60634-7-701).