

# Karta instalacji ORKAN typ NBC1

**MEDEN-INMED Sp. z o.o.**



ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

tel. +48 94 347-10-40,

fax +48 94 347-10-41

<http://www.meden.com.pl>

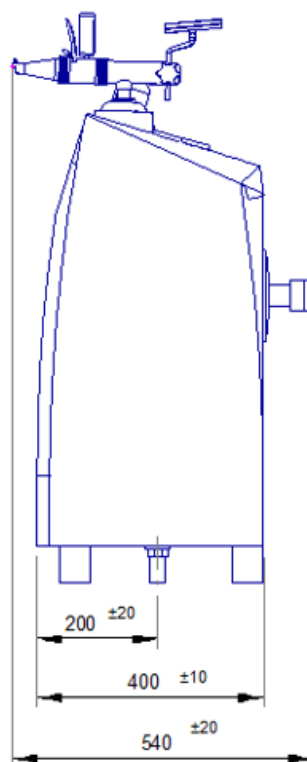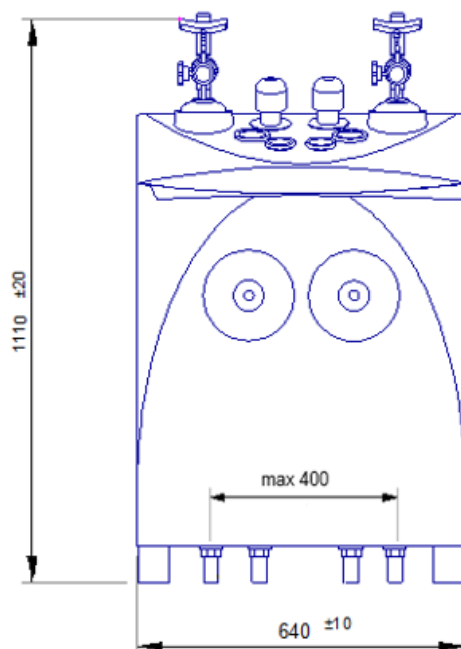

## Przyłącza natrysku ORKAN typ NBC1

**1 – Wyprowadzone przyłącze zimnej wody zakończone gwintem zewnętrznym 3/4" DN20, ciśnienie wody 4-6 bar, zabezpieczone zaworem odcinającym, zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;**

**2 – Wyprowadzone przyłącze ciepłej wody max 60°C zakończone gwintem zewnętrznym 3/4" DN20, ciśnienie wody 4-6 bar, zabezpieczone zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;**


**3 – Podłączenie przewodu uziemienia ochronnego;**

**4 - Pole zabiegowe;**

**5 – Spadek w kierunku syfonu podłogowego;**

**6 – Syfon podłogowy podłączony do rury ściekowej min DN75.**

Wszystkie wymiary w mm

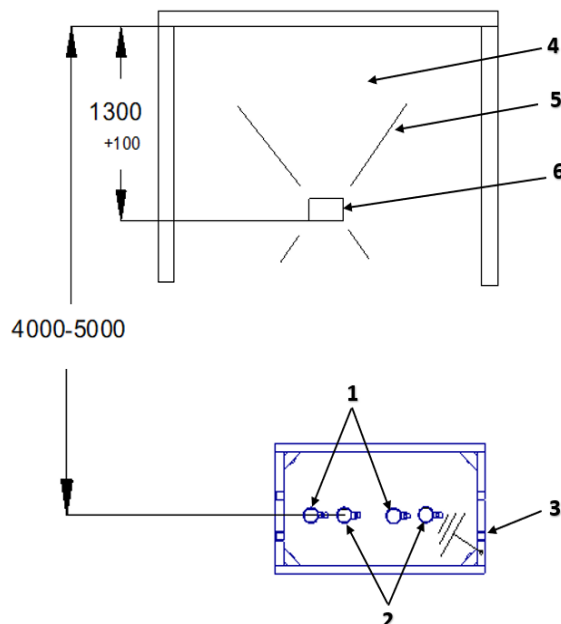

**Widok pola zabiegowego**