


VERSATOR®

MORSAFE®

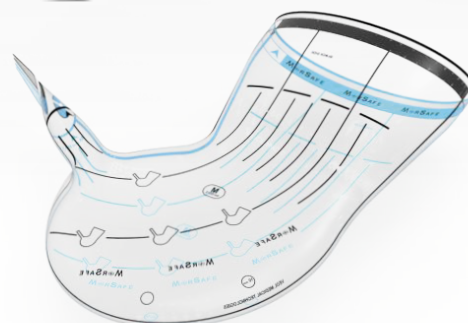

Safe Power Morcellation System

Nowa rzeczywistość bezpiecznej morcelacji tkanek

Laparoskopowa morcelacja w worku zgodna z zaleceniami FDA

Powszechnie wiadomo, że możliwość wykonywania operacji laparoskopowej oferuje pacjentowi ogromne korzyści. W przypadkach, w których wskazana jest histerektomia lub miomektomia, operacja laparoskopowa ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjną laparotomią, na przykład:

brak dużego nacięcia na brzuchu • niższe ryzyko infekcji • mniejszy ból pooperacyjny • zmniejszone ryzyko powstawania zrostów • skrócony pobyt w szpitalu • szybsze gojenie i regeneracja

Udowodniono, że morcelacja tkanek, wykonywana w połączeniu z izolującym workiem, stanowi ważny postęp w chirurgii laparoskopowej.

Versator® + MorSafe® =

Zwycięska kombinacja podnosząca bezpieczeństwo zdrowotne kobiet

Nowy system morcelacji tkanek Versator® składa się z worka do morcelacji MorSafe®, jednorazowej rękojeści, wielorazowego napędu oraz generatora. Jest to unikalny produkt wielokrotnego użytku z jednorazowymi rękojeściami. Nowy worek do morcelacji MorSafe® został specjalnie zaprojektowany w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się tkanek wokół jamy otrzewnej podczas morcelacji.

Funkcje i zalety systemu morcelacji Versator®

Funkcje wydajności i użyteczności

SZYBKI. Szybkie cięcie tkanek. Maksymalna prędkość 1600 obr./min.

MOCNY. Silnik o wysokim momencie obrotowym do cięcia wszystkich rodzajów tkanek.

ERGONOMICZNY STYL. Unikalna konstrukcja. Mniejsze zmęczenie, lepsza kontrola.

OSTRY. Ostre jak brzytwa ostrze do cięcia najtwardszych tkanek.

LEKKI. Lekka rękojeść dla wygody i komfortu użytkownika.

JEDNORAZOWY. Worek oraz rękojeść jednorazowego użytku dla bezpieczeństwa pacjenta, ułatwienia planowania zabiegów oraz optymalizacji kosztów.

Wielorazowa jednostka napędowa i rotor

- Osiem stopni kontroli prędkości
- Przyjazny dla użytkownika dotykowy interfejs
- Rotor wielokrotnego użytku (do 10-krotnej sterylizacji)

Dlaczego morcelacja w worku jest zalecana?

- Eliminuje konieczność płukania otrzewnej
- Zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się komórek
- Zebranie fragmentów tkanek jest szybsze i dokładniejsze
- Worek zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu struktur wewnętrznych
- Wypełniony worek zapewnia miejsce do pracy



Worki do morcelacji

MorSafe® to innowacyjne, jednorazowe worki, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się tkanek w jamie otrzewnej, pozwalając na bezpieczną morcelację podczas zabiegów ginekologicznych, takich jak laparoskopowa miomektomia lub laparoskopowa histerektomia.

W połączeniu z Morcelatorem Versator® system usuwa rozdrobnioną masę tkankową. Zmniejsza również nadmiar CO₂ przedostający się do pacjenta, co ma wpływ na skutki uboczne wywoływane przez CO₂.



Cechy worka Morsafe®

- Ergonomiczna konstrukcja zgodna z anatomią
- Charakterystyczne oznaczenia dla prawidłowego umieszczenia worka
 - Otwieranie przy pomocy drutu nitinolowego przyspiesza i ułatwia wprowadzanie narzędzi
- Oddzielne porty do morcelacji i optyki

System bezpiecznej morcelacji tkanek

Bezpieczny system morcelacji tkanek składa się z generatora, jednorazowej rękojeści, napędu (możliwa 10-krotna sterylizacja) oraz worków MorSafe®.

Specyfikacja produktu

Rękojeść

Prędkość cięcia	200 - 1600 RPM
Średnica ostrza	15 mm
Tryby cięcia	CUT, CUT PLUS & OFF
Waga*	180 g
Pozycja osłony rdzenia	Góra, Prawo, Lewo
Długość robocza	160 mm
Status użytkowania	Sterylny, jednorazowy

Jednorazowe worki do morcelacji

Liczba portów	Dwa
Rozmiary	Dostępny w 3 rozmiarach Mały: 1600 ml Średni: 2100 ml Duży: 2600 ml

Napęd (rotor)

Długość rotora	2000 mm
Waga*	460 g
Status użytkowania	Sterylizacja w autoklawie (max. 10 użyć)

Generator Versator - VDU

Moc znamionowa	100-240VAC, 350W, 50-60Hz
Wymiary*	345 x 215 x 110 mm
Waga*	4.5 kg

* Wartości są przybliżone, proszę odnieść się do IFU, aby uzyskać dokładną liczbę.



Wyłączny dystrybutor:

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

tel.: +48 609 139 337, mterczynska@meden.com.pl

tel.: +48 94 344 90 59 / 61, wam@meden.com.pl

fax.: +48 94 345 40 55, www.meden.com.pl