

All in One™ Tabela rozmiarów

Mankiet	Rozmiar	Numer katalogowy	Obwód proksymalny	Obwód dystalny
Mankiet łydki (jednokomorowy)	S	L4ZD261M	29-45	20-30
Mankiet łydki (jednokomorowy)	M	M L4ZD262M	34-60	24-36
Mankiet łydki (jednokomorowy)	L	L L4ZD263M	46-64	34-47
Mankiet łydki (czterokomorowy)	S	S L4ZD211M	29-45	20-30
Mankiet łydki (czterokomorowy)	M	M L4ZD212M	34-60	24-36
Mankiet łydki (czterokomorowy)	L	L L4ZD213M	46-64	34-47
Mankiet łydki i stóp (czterokomorowy)	S	S L4ZD2310	32-42	27-33
Mankiet łydki i stóp (czterokomorowy)	M	M L4ZD2320	36-46	26-36
Mankiet łydki i stóp (czterokomorowy)	L	L L4ZD2330	42-54	36-44
Mankiet uda (czterokomorowy)	S	S L4ZD2410	44-60	24-28
Mankiet uda (czterokomorowy)	M	M L4ZD2420	54-76	32-42
Mankiet uda (czterokomorowy)	L	L L4ZD2430	54-82	30-47
Mankiet do stóp	M	L4ZD272M	Do 39	

Dystrybutor:
Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 604 417 984
e-mail: mmelka@meden.com.pl
www.meden.com.pl

Wyprodukowany przez:
Mego Afek

Phlebo Press®

DVT 603 All in One™



Wybór szpitali w terapii przeciwzakrzepowej żył głębokich



**Zaprojektowane tak,
aby zaspokoić
potrzeby pacjentów
oraz personelu
medycznego.**

**Doskonały w terapii
przeciwzakrzepowej żył głębokich:**

- Łatwy w użyciu - tryb włączania/wyłączania.
- Automatycznie obsługuje każdy typ i kombinację mankietów, przy odpowiednim ciśnieniu.
- Ekonomiczność - Użycie z jedno lub czterokomorowymi mankietami dla łydki, uda lub stóp.
- Zasilanie bateryjne - do ośmiu godzin pracy na baterii.
- Stabilny montaż na szynie łóżka - łatwy dostęp dla pielęgniarki.
- Wyjątkowo miękkie, wygodne mankiety.

Phlebo Press® DVT All in One™ jest aparatem w pełni zautomatyzowanym, łatwym i intuicyjnym w obsłudze.



Łatwy w użyciu!
Zamocuj dowolny
rodzaj mankietu,
naciśnij **START**,
a system
zajmie się resztą.

All in One™ automatycznie rozpoznaje rodzaje
mankietów w dowolnej kombinacji, a kontrolki
umieszczone na urządzeniu ułatwiają
monitorowanie procesu.

Gradientowa kompresja obwodowa przy zastosowaniu mankietu czterokomorowego lub ekonomiczna, asymetryczna kompresja przy zastosowaniu mankietów jednokomorowych zawarte w jednym urządzeniu:

- Sekwencyjna gradientowa kompresja obwodowa przy 45 mmHg z zastosowaniem mankietów czterokomorowych.
- Kompresja przerywana z zastosowaniem mankietów jednokomorowych.
- Mankiety stóp pracują przy ciśnieniu 130 mmHg – do zabiegów ortopedycznych wymagających dostępu do obszaru kolan.
- Automatyczne rozpoznawanie dowolnej kombinacji mankietów - jednej lub obu nóg, stopy, łydki lub uda. Poprząsnięciu przycisku START, urządzenie zidentyfikuje i zastosuje prawidłowe ciśnienie oraz sposób terapii.
- Bateria do ośmiu godzin pracy bez zasilania sieciowego, ciągłe ładowanie podczas pracy na zasilaniu.
- Wyraźne alarmy dźwiękowe i wizualne. Łatwa identyfikacja ewentualnych błędów w użytkowaniu np. zagięty wąż, odłączony lub nieprawidłowo założony mankiety.
- Miękkie i łatwe w noszeniu mankiety zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji kończyny oraz zapobiegają podrażnieniom skóry.



	Przycisk zasilania		Poziom naładowania baterii
	Przycisk START/STOP		Poziom ciśnienia (mmHg)
	Mankiet odłączony/nieszczelność		Mankiet podłączony
	Zagięty wąż		Status kontrolki: Zielony - urządzenie w trakcie pracy. Biały - urządzenie włączone, gotowe do pracy. Czerwony - błąd urządzenia.
	Zasilanie		
	Terapia obustronna		Jedno- lub czterokomorowy
Cykl 60 sekund	Waga i rozmiar 2,3 kg / 23 x 20 x 18 in	Zakres ciśnienia 45 / 130 mmHg	Napięcie zasilające 90-246 VAC, 47-63 Hz