
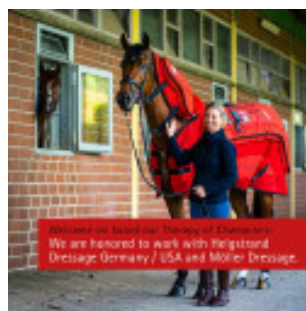
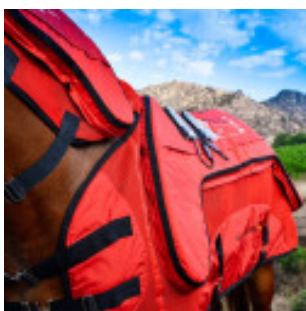


Derka magnetyczna dla koni ProSeries 3in1

Opis produktu:

Derka PEMF ProSeries 3in1 to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające równoczesne stosowanie trzech rodzajów terapii: **magnetoterapia PEMF, wibracyjny masaż głęboki, termoterapia światłem podczerwonym** dzięki czemu zapewnia synergistyczny efekt terapeutyczny przy jednoczesnej wygodzie i prostocie stosowania.

Zdjęcia produktu:

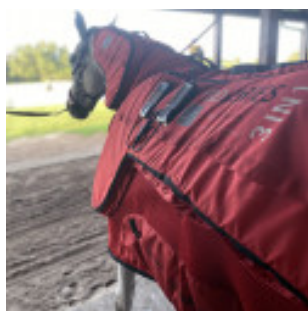

Szczegółowy opis produktu:

Derka PEMF ProSeries 3in1

Derka PEMF ProSeries 3in1 dzięki działaniu miejscowemu i ogólnoustrojowemu pozwala nie tylko **zapobiegać urazom** jak i **znacząco wspomagać ich leczenie** ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie **maksymalnego potencjału sportowego konia**.

Derka PEMF ProSeries 3in1 stosowana jest w celu **zmniejszenia napięcia mięśniowego** i **usprawnienia krążenia w organizmie** przekłada się na **szybszą regenerację** po wysiłku oraz na bardziej **wydajne i owocne treningi**.

INFORMACJA

Derka PEMF ProSeries 3in1 jest dozwolona do użytku pomiędzy startami przez **FEI (Międzynarodową Federację Jeździecką)** i **nie jest uważana za doping**.

Derka PEMF ProSeries 3in1 nieoceniona pomoc

Pozwól derce ProSeries 3in1 wykonać pracę za Ciebie! Wystarczy założyć derkę na swojego konia przed lub po treningu, a Twój koń będzie czerpał wszystkie terapeutyczne korzyści terapii, stojąc w swoim boksie, w przyczepie lub pomiędzy startami.

Derka PEMF ProSeries 3in1 - właściwości

- Bezinwazyjna, relaksująca i możliwa do zastosowania w niemal każdych warunkach **magnetoterapia PEMF, masaż i terapia ciepłem** pomagają utrzymać sprawność i formę konia na najwyższym poziomie.
- **Derka PEMF ProSeries 3in1** oprócz zastosowania regeneracyjnego sprawdza się także w łagodzeniu objawów kolki (masaż tryb ciągły + termoterapia) wspomagająco do leczenia zaleconego przez lekarza weterynarii.
- **Wibracyjny masaż głęboki**, czyli forma terapii, która wykorzystuje wibracje do dotarcia do głębszych warstw mięśniowych i tkanek, pomagając w rozluźnieniu napiętych mięśni, zmniejszeniu sztywności i poprawieniu krążenia krwi. Wpływa także na redukcję stanów zapalnych poprzez różnorodne mechanizmy działania na poziomie komórkowym i układu krążenia.
- Termoterapia w derce **ProSeries 3in1** w szybszy sposób niż solarium aplikuje ciepło na ciało konia jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.
- **Derka PEMF ProSeries 3in1** zasilana jest akumulatorami wielokrotnego użytku z opcją zasilania sieciowego.
- Posiada odpinaną część szyjną, co umożliwia stosowanie jej u koni płochliwych lub zestresowanych.

Derka PEMF ProSeries 3in1 - Sport Innovations

Derka PEMF ProSeries 3in1 - wybór profesjonalistów

Wybierając **Derka PEMF ProSeries 3in1** dołączasz do grona wielu jeźdźców, którzy zaufali naszym produktom. Warto wymienić choć kilku z wybitnych sportowców, którzy doceniają **Derki PROSERIES** jak:

- Christian Ahlman,
- Lisa Wilcox,
- Michael Klimke,
- Lars Petersen
- Helgstrand Dressage.

Derka PEMF ProSeries 3in1 - Dane techniczne:

Wbudowane programy terapeutyczne:	7
Zakres magnetoterapii [Hz]:	stałe częstotliwości od 1 do 250
Częstotliwości terapii [Hz]:	1 - 250 (impuls bipolarny)
Siła pola magnetycznego [μ T]:	1000 bezpośrednio na cewce, 400 na wysokości 95 mm nad cewkami
Intensywność:	5 poziomów (poziom 1-5 ok. 20% - 31% - 50% - 71% - 100%) stopnie Militesla
Zakres temperatur termoterapii:	do 45 stopni
Ogrzewanie [W]:	ok. 50 przy nieaktywnym polu magnetycznym

Protokół czyszczenia derki Sport Innovations ProSeries 3-in-1

1

Przygotowanie

Odłącz wszystkie elementy elektroniczne: Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że derka jest odłączona od źródeł zasilania, a wszystkie baterie i kontrolery zostały wyjęte bądź zabezpieczone przed zmoczeniem.

Usuń luźne zanieczyszczenia: Za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza ręcznego usuń sierść, kurz i inne zabrudzenia z powierzchni derki.

2

Czyszczenie powierzchniowe

Użyj wilgotnej ściereczki: Zwilż miękką ściereczkę w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu (np. szarego mydła lub delikatnych środków czyszczących).

Delikatnie przetrzyj powierzchnię: Unikaj nadmiernego zwilżania, szczególnie w okolicach, gdzie znajdują się komponenty elektroniczne i magnetyczne.

Nie zanurzaj derki w wodzie: Zabronione jest pranie derki w pralce lub ręczne moczenie jej w wodzie.

3

Suszenie

Susz w przewiewnym miejscu: Po czyszczeniu pozostaw derkę do wyschnięcia w cieniu, w temperaturze pokojowej.

Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła: Nie susz derki na słońcu,

grzejnikach ani innych źródłach ciepła, aby nie uszkodzić materiałów i komponentów elektronicznych.

4

Konserwacja i przechowywanie

Sprawdź stan techniczny: Regularnie kontroluj stan magnesów, przewodów i innych komponentów pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Przechowuj w suchym miejscu: Po wysuszeniu przechowuj derkę w suchym, przewiewnym miejscu, najlepiej w oryginalnym pokrowcu lub torbie.

Zaleca się zakładanie cienkiej derki na konia pod derkę magnetyczną w celu ograniczenia zanieczyszczenia urządzenia.

Wideoinstrukcja czyszczenia derki

Informacje:

Kategoria: Weterynaria

Model: