



Krem przewodzący do terapii Tecar - Transound® 1L

Opis produktu:

Krem przewodzący do **terapii Tecar** firmy **EF Medica** w wygodnym opakowaniu 1000ml wyposażony w specjalny dozownik.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

KREM DO TERAPII TECAR

Stosowanie kremu podczas zabiegów na częstotliwościach radiowych pozwala na zmniejszenie impedancji kontaktowej pomiędzy sondą a skórą.

Wysoka przewodność gwarantuje najlepsze efekty zarówno w fazie pojemnościowej, jak i rezystancyjnej zabiegu. Dołączony aplikator umożliwia dokładne dozowanie produktu. Zastosowane konserwanty są nietoksyczne i ściśle zgodne z prawem. **Produkt nie zawiera lateksu.**

Krem zawiera **środek bakteriobójczy, Euxyl K 100**, którego składnikami aktywnymi są: **alkohol benzylowy, metylochlooroizotiazolinon, metyloizotiazolinon**. Zgodny ze standardem **biokompatybilności**. Nie zawiera **formaldehydu**. Nie uszkadza sondy urządzenia.

Opakowanie: 1000 ml

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- Skórę pacjenta należy odpowiednio oczyścić i odtłuścić.
- Nałóż krem w odpowiedniej ilości.
- Podłącz i używaj sprzętu oraz sond zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów.
- Po zakończeniu zabiegu usuń wszystkie pozostałości kremu za pomocą papieru, TNT (włókniny) lub gazy zwilżonej wodą.

OSTRZEŻENIE:

- Nie stosować w elektrostymulacji.

- Nie używać do zapisów elektrokardiograficznych.
- Produkt dostarczany jest w stanie niejałowym.
- Kremu nie należy stosować na oczy lub skórę, która ma podrażnienia, otarcia lub rany.
- Nie połykać.
- Nie używać po upływie terminu ważności podanego na butelce.

PIERWSZA POMOC:

- **OCZY:** w razie przypadkowego kontaktu z oczami płukać dużą ilością ciepłej wody przez 15 minut. Nie trzeć oczu. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarza.
- **SKÓRA:** W przypadku podrażnienia skóry, dokładnie umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarza.
- **POŁKNIĘCIE:** Przypadkowe spożycie zazwyczaj nie wiąże się z ryzykiem, w przypadku wystąpienia powikłań należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje:

Przeznaczenie: TECAR
Kategoria: Żele i preparaty
Kategoria: Terapia Tecar
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Krem
Pojemność: 1000 ml
Klasyfikacja: produkt niemedyczny

Model: