




Salus Talent Pro - aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

Opis produktu:

Salus Talent Pro - urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wyposażone dwa aplikatory.

Najgłębsze przenikanie (**10 cm w głąb tkanki**), bezinwazyjna terapia, bezpieczeństwo i zabiegi w miejscach **niedostępnych dla innych terapii**. To tylko niektóre z zalet stosowania **Salus Talent Pro**.

Zdjęcia produktu:

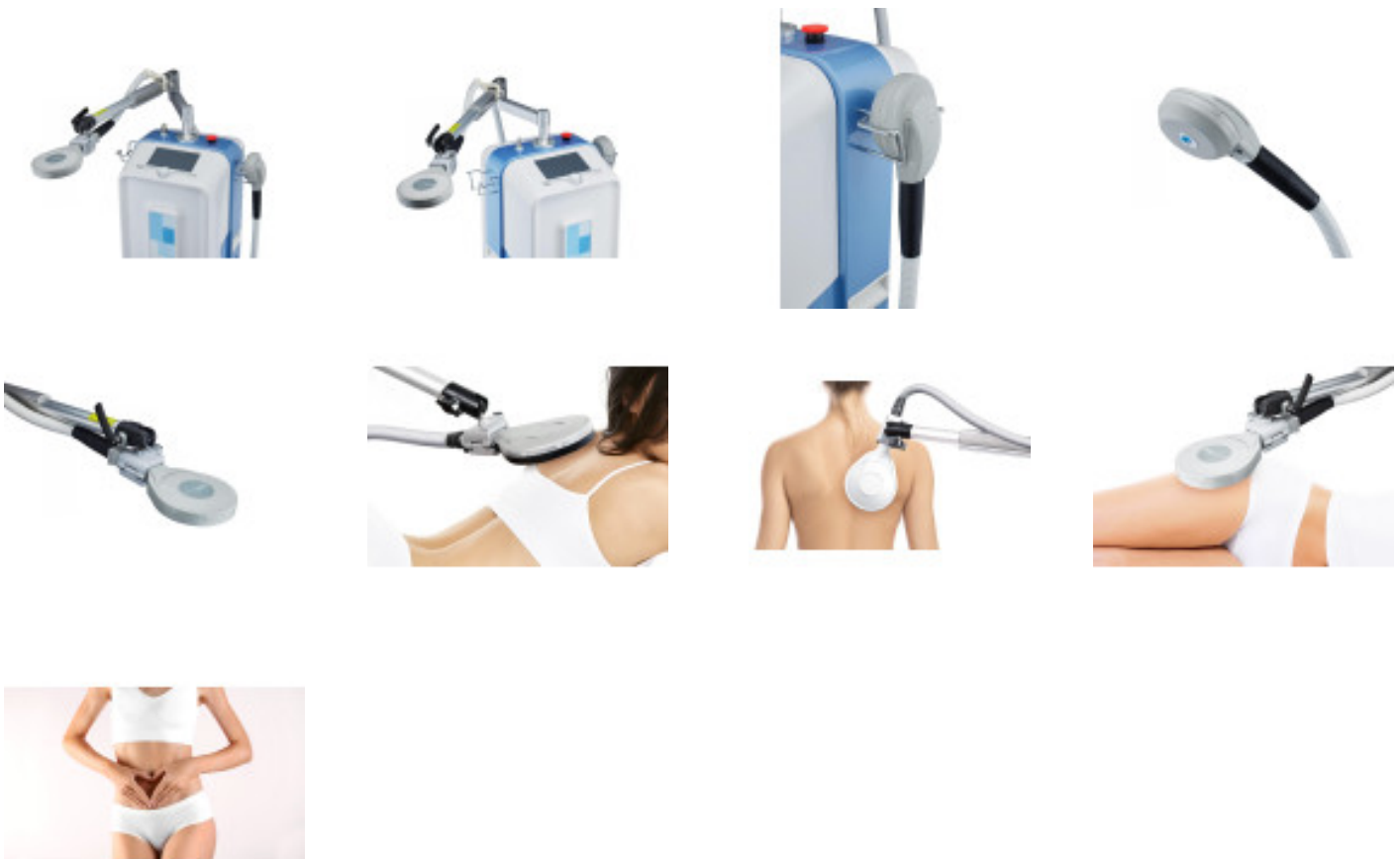

Szczegółowy opis produktu:

SALUS TALENT

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna

Salus Talent Pro to pierwsze na rynku urządzenie magnetoterapeutyczne, za pomocą którego można uzyskać odczuwalną intensywność podczas stosowania, a także indukcję magnetyczną do 3 Tesli przy częstotliwości do 100 Hz.

Salus Talent Pro to wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny pozwalający na miejscowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując wyznaczony obszar w głębi ciała.

Ludzkie ciało stanowi dobry przewodnik dla pola magnetycznego. W momencie przyłożenia **wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego**, tkanki są stymulowane w miarę penetracji tego pola w głąb organizmu. W efekcie pobudzane są:

- komórki nerwowe,
- mięśnie,
- naczynia krwionośne.

W przeciwieństwie do stymulacji elektrycznej, działającej jedynie na powierzchni, stymulacja wywołana silnym **polem magnetycznym** przenika głęboko do wnętrza organizmu, pobudzając tkanki.

Główne obszary zastosowań Salus Talent:

- Rehabilitacja,
- Medycyna sportowa,
- Neurologia,
- Ortopedia,
- Uroinekologia.

Korzyści wpływające z użytku Salus Talent:

- Zabiegi w miejscach niedostępnych dla innych terapii,
- Najgłębsze przenikanie (do 10 cm w głąb tkanki),
- Szybki powrót do sprawności fizycznej,
- Skuteczna i bezinwazyjna terapia,
- Bezbolesne zabiegi,
- Rewelacyjne efekty,
- Bezpieczny w użyciu.

Właściwości

Salus Talent Pro:

- Indukcja magnetyczna do 3 Tesli,
- Częstotliwość do 100 Hz,
- Kolorowy ekran dotykowy 8",
- Duży aplikator ze specjalnym uchwytem, zapewniającym komfort użytkowania,
- Mały aplikator do ręcznego opracowania obszaru zabiegowego,
- 20 programów automatycznych,
- 20 programów manualnych,
- 20 programów użytkownika,

- Skuteczna bezinwazyjna terapia,
- Bezpieczny w użyciu,
- Programy i akcesoria do zabiegów uroginekologicznych (opcja dodatkowa).

Wskazania do użycia Salus Talent Pro:

- Schorzenia kręgosłupa,
- Ostry/przewlekły ból odc. C, Th, L-S (lumbago),
- Rwa kulszowa (ischialgia),
- Spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kręgów),
- Zaburzenia w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego,
- Bark zamrożony (ograniczenie ruchomości wskutek zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych),
- Zwyrodnienia stawów,
- Reumatoidalne zapalenie stawów,
- Uszkodzenie nerwów obwodowych,
- Osłabienie / zanik mięśni,
- Zaburzenia układu moczowo-płciowego,
- Nietrzymanie moczu,
- Ból prostaty,
- Stany pourazowe.

Wśród przeciwwskazań do zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej znajduje się:

- ciąża i okres karmienia,
- podwyższona temperatura ciała,
- aktywne nowotwory,
- obecność rozrusznika serca, pompy insulinowej, metalowych implantów,
- ciężka, nieustabilizowana niewydolność układu krążenia.

Programy automatyczne Salus Talent Pro

Protokół	Wskazanie	Czas terapii [min]
A1	Świeże skręcenie stawu, obrzęk (małe stawy)	10
A2	Świeże skręcenie stawu, obrzęk (duże stawy)	10
A3	Ostry ból stawu skokowego	10
A4	Ostry ból stawu łokciowego	10
A5	Ostry ból stawu biodrowego / miednicy	12
A6	Bark zamrożony - stan ostry	10
A7	Ostry ból odc. C, Th kręgosłupa	10
A8	Ostry ból odc. L-S Th kręgosłupa	10
A9	Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	10
A10	Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa	12

A11	Przewlekły stan zapalny stawów	10
A12	Przewlekłe bóle mięśniowe	12
A13	Przewlekły ból stawu skokowego	10
A14	Przewlekły ból stawu łokciowego	10
A15	Przewlekły ból stawu biodrowego / miednicy	12
A16	Bark zamrożony - stan przewlekły	10
A17	Przewlekły ból C, Th kręgosłupa	12
A18	Przewlekły ból odcinka L-S kręgosłupa	15
A19	Wzmacnianie mięśni, trening mięśni	12
A20	Intensywna stymulacja mięśni	15

Przykłady zastosowania Salus Talent Pro:

Prezentacja produktu:

Informacje:

Waga: 60 kg
 Tryby pracy: Impulsowy
 Typ urządzenia: Aparat do głębokiej stymulacji
 Zakres częstotliwości: 0-100 Hz
 Liczba kanałów: 2
 Mobilność: Stacjonarny
 Zasilanie akumulatorowe: Nie
 Wbudowane programy: 20
 Zapis własnych programów: 20
 Wymiary: 54 x 50 x 107 - 173 (z uchwytem) cm
 Aplikatory: Duży aplikator ø 16 cm
 Aplikatory: Mały aplikator ręczny ø 11.5 cm
 Czas trwania impulsu: CH1: 420 µs
 Czas trwania impulsu: CH2: 456 µs
 Czas zabiegu: 1-60 min
 Ekran: kolorowy ekran dotykowy 8"
 Maksymalna indukcja: Powyżej 100 mT (3T)
 Programy manualne: 20
 Zasilanie: 220 - 230 V
 Zasilanie: 50 - 60 Hz

Model: