

Orteza na kręgosłup lędźwiowy LombaStab



Opis produktu:

Orteza lędźwiowo-krzyżowa LombaStab wyposażona jest w **system Quik lacing**, który ułatwia precyzyjne zapinanie ortezy.

LombaStab posiada symetryczne uchwyty na dłonie zapewniające prawidłowe wyśrodkowanie paska na kręgosłupie.

Orteza na kręgosłup lędźwiowy LombaStab polecana jest osobom pracującym w pozycji stojącej, które szukając łatwego i precyzyjnego dopasowania ortezy, aby uśmierzyć ból.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza na kręgosłup lędźwiowy LombaStab

Orteza LombaStab wskazana jest w nieswoistych bólach krzyża (ostry, podostry, przewlekły) oraz w przypadku stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.

Cechy charakterystyczne ortezy na kręgosłup lędźwiowy LombaStab

- Łatwe i precyzyjne zapinanie dzięki systemowi sznurowania **Quik lacing system**,

- Silne wsparcie² dla skutecznego działania przeciwbólowego dzięki tylnym płytom i dopasowanym stalowym wspornikom,
- Możliwość dostosowania kompresji do anatomii w kształcie litery A lub V dzięki systemowi sznurowania i konstrukcji kątów³ między przednią a tylną częścią,

Dla kogo przeznaczona jest orteza na kręgosłup lędźwiowy?

- Osobom szukającym łatwego i precyzyjnego dopasowania ortozy, aby uśmierzyć ból,
- Osobom długo pracującym w pozycji stojącej.

Jak działa orteza na kręgosłup lędźwiowy LombaStab

- Umożliwia ciągłe przywracanie pozycji ciała, a także zapewnia efekt proprioceptywny,
- Zwiększy ciśnienie w jamie brzusznej, aby umożliwić uwolnienie krążków międzykręgowych w połączeniu z³ punktami zgięcia⁴
- Przy lekkim unieruchomieniu odcinka lędźwiowego orteza pomoże ograniczyć ekstremalnie niebezpieczne ruchy
- Utrzymuje ciepło w stawie lędźwiowym⁴

Jak założyć ortezę na kręgosłup lędźwiowy LombaStab

Używając pętli na rękę, umieść pasek wokół talii

Wyreguluj pasek tak, aby jego podstawa zatrzymała się na górze zagięcia między pośladkami

Zabezpiecz dwie części pasa bez użycia siły

Plastikowe płytki powinny być umieszczone po obu stronach kręgosłupa

Za pomocą uchwytów dostosuj napięcie pasa w zależności od potrzeb i aktywności

Orteza LombaStab pozwala szybko i precyzyjnie dopasować poziom kompresji

Prezentacja produktu:

Dane techniczne:

Nazwa ortozy	LombaStab
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I: Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 60-80 cmRozmiar II: Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 75-95 cmRozmiar III: Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 90-110 cmRozmiar IV: Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 105-125 cmRozmiar V: Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 120-140 cm
Kod refundacji NFZ	M.060

Źródło:

- (1) Badanie przeprowadzone wewnątrznie na grupie 13 pacjentów, październik 2019
- (2) Wpływ elastycznych pasów lędźwiowych na efekt programu treningu mięśni u pacjentów z przewlekłym bólem pleców. Dalichau S, Scheele K. Z Orthop ihre Grenzgeb. 2000 styczeń-luty; 138 (1): 8-16.
- (3) P. Calmels i in. 2009: Skuteczność elastycznego podparcia lędźwiowego zapewnianego przez pas podtrzymujący Thuasne Lombacross Activity w leczeniu podostrego bólu krzyża. Kręgosłup, 2009; 34(3):215-220.
- (4) Mniej materiału w okolicach żeber i bioder

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 60-80 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 75-95 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 90-110 cm, Rozmiar IV - wysokość 26 cm - obwód w pasie 105-125 cm, Rozmiar V - wysokość 26 cm - obwód w pasie 120-140 cm