



Pas lędźwiowo-krzyżowy Lombacross Activity

Opis produktu:

Funkcjonalny pas lędźwiowo-krzyżowy zapewniający zwiększone podtrzymanie.

PRZEZNACZENIE

- Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, faza ostra, intensywny ból

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Stabilizacja dostosowana do bólu dzięki dodatkowym pasom dociągowym
- Wygodny w użytkowaniu dzięki anatomicznym wycięciom w okolicach bioder i żeber
- Możliwość zakładania bezpośrednio na skórę na cały dzień dzięki użyciu tkaniny Combite

TYP PACJENTA

- Pacjent cierpiący na ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej o aktywności fizycznej na znacznym poziomie, np. pracownik magazynu kompletujący wysyłki

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pas lędźwiowo-krzyżowy Lombacross Activity

Orteza lędźwiowo-krzyżowa Lombacross Activity wskazana jest w leczeniu niespecyficznego bólu dolnej części pleców (w postaci ostrej, podostrej lub chronicznej) oraz w przypadku zwężenia przestrzeni międzykręgowych.

Zalety pasa Lombacross Activity

- Mocna kompresja i wzmocnione wsparcie dzięki dodatkowemu, wzmocnionemu paskowi
- Zwiększona wygoda w noszeniu dzięki anatomicznemu krojowi w rejonie bioder i żeber

- Oddychalność: odprowadzanie wilgoci dzięki tkaninie Combitex
- Orteza jest łatwa w utrzymaniu, dzięki możliwości prania w 40°C

Dla kogo polecana jest orteza lędźwiowo-krzyżowa?

- Osobom doświadczającym bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej o aktywności fizycznej na wysokim poziomie, np. magazynier przenoszący ciężkie przedmioty

Jak założyć pas lędźwiowo-krzyżowy Lombacross Activity?

Przed pierwszym użyciem uformuj podpórki w taki sposób, aby pasowały do pleców pacjenta

Użyj pętli na dłonie/palce, aby ułatwić zakładanie pasa

Umieść pas wokół talii

Złóż obie części pasa bez użycia siły

Wyreguluj wysokość i wyśrodkuj pas wokół kręgosłupa

Użyj dodatkowych pasków, aby dostosować poziom zaciśnięcia do swoich potrzeb

Prezentacja produktu:

Dane techniczne:

Nazwa ortozy	Lombacross Activity
Pomiar	*
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 52-62 cmRozmiar II:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 63-74 cmRozmiar III:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 75-89 cmRozmiar IV:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 90-105 cmRozmiar V:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 106-120 cmRozmiar VI:Wysokość ortozy 26 cmObwód w pasie 121-140 cm
Kod refundacji NFZ	M.060
Kolor	

*** Orteza o wysokości 21 cm dostępna na zamówienie (czas dostawy: 2-3 tygodnie).**

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortozy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 52-62 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 63-74 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 75-89 cm, Rozmiar IV - wysokość 26 cm - obwód w pasie 90-105 cm, Rozmiar V - wysokość

26 cm - obwód w pasie 106-120 cm, Rozmiar VI -
wysokość 26 cm - obwód w pasie 121-140 cm
Opieka nad pacjentem - kolory: Biały, Czarny