



Pas na kręgosłup lędźwiowy Lombax Original

Opis produktu:

Wspomagający pas lędźwiowo-krzyżowy Lombax Original.

PRZEZNACZENIE

- Leczenie nawracających schorzeń powodujących ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej podczas wykonywania codziennych czynności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Łatwy w zakładaniu dzięki dwuetapowemu zapięciu
- Wysoka kompresja i duża wytrzymałość dzięki wykorzystaniu tkaniny Lombax
- Duży komfort i wysoki poziom przepuszczalności powietrza dzięki tkaninie 3D w części tylnej ortezy
- Łatwy w utrzymaniu dzięki możliwości prania w pralce w temperaturze 30°C

TYP PACJENTA

- Pacjent cierpiący na chorobę zwyrodnieniową stawów, narażony na ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, o umiarkowanej aktywności fizycznej, np. aktywna osoba w podeszłym wieku

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pas lędźwiowo-krzyżowy Lombax Original

Orteza lędźwiowo-krzyżowa Lombacross Original wskazana jest w leczeniu niespecyficznego bólu dolnej części pleców (w postaci ostrej, podostrej lub chronicznej) oraz w przypadku zwężenia przestrzeni międzykręgowych.

Zalety pasa Lombacross Original

- Łatwy w zakładaniu dzięki dwuetapowemu zapięciu
- Wysoka kompresja i duża wytrzymałość dzięki wykorzystaniu tkaniny Lombax
- Duży komfort i wysoki poziom przepuszczalności powietrza dzięki tkaninie 3D w części tylnej ortezy
- Łatwy w utrzymaniu dzięki możliwości prania w pralce w temperaturze 30°C

Dla kogo polecana jest orteza lędźwiowo-krzyżowa?

- Osobom doświadczającym bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej o umiarkowanej aktywności fizycznej, np. aktywna osoba w podeszłym wieku

Jak założyć pas lędźwiowy Lombax Original?

Przed pierwszym użyciem uformuj podpórki w taki sposób, aby pasowały do pleców pacjenta

Użyj pętli na dłonie/palce, aby ułatwić zakładanie pasa

Umieść pas wokół talii

Złóż obie części pasa bez użycia siły

Wyreguluj wysokość i wyśrodkuj pas wokół kręgosłupa

Użyj dodatkowych pasków, aby dostosować poziom zaciśnięcia do swoich potrzeb

Prezentacja produktu:

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Lombax Original
Pomiar	*
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość ortezy 26 cmObwód w pasie 60-85 cmRozmiar II:Wysokość ortezy 26 cmObwód w pasie 86-112 cmRozmiar III:Wysokość ortezy 26 cmObwód w pasie 112-140 cm
Kod refundacji NFZ	M.060
Kolor	

* Orteza o wysokości 21 cm dostępna na zamówienie (czas dostawy: 2-3 tygodnie).

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 60-85 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 86-112 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 112-140 cm