



Orteza kolana z regulacją kąta zgięcia Genu Ligaflex ROM

Opis produktu:

Orteza więzadeł stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia/wyprostu Genu Ligaflex ROM.

- Wyprofilowane aluminiowe podpory zwiększające dopasowanie i kontrolę
- Antypoślizgowa dzianina silikonowa
- Replikuje naturalny ruch kolana

Model dostępny w wersji **otwartej** oraz **zamkniętej**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza kolana z regulacją kąta zgięcia Genu Ligaflex ROM

Urazy kolana mogą powodować duży ból i dyskomfort, szczególnie jeżeli uraz wpływa na sposób chodzenia. Orteza kolana z regulacją kąta zgięcia Genu Ligaflex ROM odtwarza naturalny ruch kolana, aby przyzwyczaić je do poruszania się w prawidłowy sposób. Pomaga to ograniczyć ból związany z chorobą lub urazem.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze urazów/naderwania więzadeł kolanowych bocznych lub krzyżowych
- Rehabilitacja pooperacyjna
- Niestabilność/zwiotczenie stawu

Pacjenci docelowi

- Pacjenci po poważnych skręceniach lub w trakcie rehabilitacji

Cechy charakterystyczne

- Kontrola zakresu ruchu dzięki beznarzędziowemu ograniczaniu możliwości zgięcia i wyprostowania o dużym zakresie regulacji
- Zawias TM5+ odtwarzający naturalne ruchy stawu kolanowego
- Stabilność za sprawą włókien silikonowych wbudowanych w strukturę dzianiny i pasek podtrzymujący powyżej łydki
- Wygoda dzięki anatomicznemu kształtowi ze strefami komfortu i naprzemiennymi paskami dla zapewnienia prawidłowego krążenia krwi
- Orteza kolana dostępna jest w 6 różnych rozmiarach
- Model dostępny w wersji otwartej i zamkniętej

Zakresy regulacji zgięcia/wyprostowania

Zgięcie	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Wyprost	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°

Przeczytaj więcej o ortezie na kolano na naszym blogu.

Jak wyregulować kąt zgięcia/wyprostowania w ortezie kolana Genu Ligaflex ROM

Otwórz osłonę zawiasu, wciskając zatrzask do środka

Wybierz pożądany ogranicznik wyprostowania na plastikowym elemencie

Usuń ogranicznik wyprostowania 0°

Wstaw nowy ogranicznik wyprostowania

Wybierz pożądany ogranicznik zgięcia na plastikowym elemencie

Załóż ogranicznik zgięcia. Upewnij się, że otwór w ograniczniku zgięcia pokrywa się z otworem w zawiasie

Zamknij osłonę zawiasu

Wykonaj kilka ruchów zginania/prostowania, aby upewnić się, że ograniczniki są prawidłowo zablokowane pod wymaganym kątem

Prezentacja produktu

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Genu Ligaflex ROM
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 32-34 cm Rozmiar II:Obwód kolana: 35-37 cm Rozmiar III:Obwód kolana: 38-41 cm Rozmiar IV:Obwód kolana: 42-45 cm Rozmiar V:Obwód kolana: 46-49 cm Rozmiar VI:Obwód kolana: 50-53 cm
Kod refundacji NFZ	J. 039

Kolor	
-------	--

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 40 cm - obwód kolana 32-34 cm, Rozmiar II - wysokość 40 cm - obwód kolana 35-37 cm, Rozmiar III - wysokość 40 cm - obwód kolana 38-41 cm, Rozmiar IV - wysokość 40 cm - obwód kolana 42-45 cm, Rozmiar V - wysokość 40 cm - obwód kolana 46-49 cm, Rozmiar VI - wysokość 40 cm - obwód kolana 50-53 cm
Opieka nad pacjentem - model: Model otwarty, Model zamknięty