

Galaxy Traction T4 - Stół do trakcji kręgosłupa

Opis produktu:



GALAXY Traction T4 to cztero-sekcyjny stół do zabiegów trakcji kręgosłupa, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu pacjenta oraz ergonomii pracy terapeuty. Elektryczna regulacja wysokości stołu w zakresie **48-98 cm** za pomocą nożnej ramki sterowania, umożliwia łatwe i bezpieczne obniżenie lub podwyższenie leża i dostosowanie stanowiska bez konieczności angażowania rąk. Zintegrowana, obrotowa podstawa podciągająca trakcyjną oraz przesuwana sekcja nożna o zakresie ruchu **15 cm**, umożliwia swobodne i precyzyjne przeprowadzenie planowanej procedury trakcji kręgosłupa.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

GALAXY Traction T4

4-sekcyjne leże Elektryczna regulacja wysokości Podstawa pod ciągnik trakcyjny 4 sekcje leża 48-98 cm wysokość leża $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ zagłówek 15 cm przesuw sekcji $\pm 90^{\circ}$ obrót ramienia podstawy 70 cm szerokość sekcji 4 sekcje leża 48-98 cm wysokość leża $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ zagłówek 15 cm przesuw sekcji $\pm 90^{\circ}$ obrót ramienia podstawy 70 cm szerokość sekcji Dłaczego GALAXY Traction T4

Regulacja, przyciąganie i system trakcyjny w jednym stanowisku

GALAXY Traction T4 łączy rozwiązania wspierające trzy kluczowe obszary pracy: przygotowanie ułożenia pacjenta, regulację stanowiska oraz współpracę z ciągnikiem trakcyjnym. Dzięki temu ustawienie stołu można dopasować do planowanej procedury i organizacji pracy placówki.

01

Zakres 48-98 cm pozwala obniżyć leże przed zajęciem miejsca przez pacjenta i dopasować wysokość roboczą do wykonywanych czynności. Nożna ramka sterowania umożliwia regulację bez angażowania rąk.

02

Podział leża na zagłówek, sekcję środkową, sekcję miednicy i sekcję nożną ułatwia przygotowanie ułożenia pacjenta odpowiednio do planowanej procedury.

03

Zintegrowana podstawa pozwala zamontować urządzenie TRU-TRAC lub TRITON jako element stanowiska do zabiegów trakcji.

04

Obrót ramienia podstawy ciągnika w zakresie $\pm 90^{\circ}$ ułatwia dopasowanie położenia blatu ciągnika do konfiguracji stanowiska, a skokowa blokada co około 13° pozwala wybrać jedno z dostępnych ustawień. Dodatkowo podstawa ciągnika obraca się swobodnie wokół swojej osi, powodując automatyczne dopasowanie pozycji ciągnika do osi trakcji.

05

Regulacja od -10° do $+80^{\circ}$ pozwala dopasować położenie zagłówka do planowanej procedury, a sprężyna gazowa wspomaga zmianę jego ustawienia.

06

Dwa warianty ramy pozwalają dopasować sposób przemieszczania pustego stołu do organizacji

stanowiska i potrzeb placówki.

Konstrukcja leża

Cztery sekcje wspierające przygotowanie ułożenia pacjenta

GALAXY Traction T4 jest przeznaczony do wykonywania zabiegów trakcji kręgosłupa oraz przygotowania ułożenia pacjenta odpowiednio do planowanej procedury. Czterosekcyjna konstrukcja leża wyodrębnia poszczególne obszary podparcia i ułatwia personelowi właściwe ułożenie pacjenta do zabiegu. Stół jest przeznaczony do użytkowania przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

zagłówek sekcja środkowa sekcja miednicy sekcja nożna Wygodna regulacja i obsługa

Regulacja wysokości bez angażowania rąk

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie **48-98 cm** pozwala obniżyć leże przed zajęciem miejsca przez pacjenta oraz dostosować wysokość do wykonywanych czynności. Nożna ramka sterowania umożliwia zmianę wysokości stołu bez angażowania rąk.

Kąt pochylenia zagłówka można regulować od **-10° do +80°**. Sprężyna gazowa wspomaga zmianę ustawienia, a zwolnienie dźwigni blokuje zagłówek w wybranym położeniu.

Konstrukcję stołu uzupełniają:

- otwór na twarz,
- wzmocniony punkt mocowania pasa trakcyjnego,
- tapicerowana zaślepka punktu mocowania pasa.

Kontrola dostępu do regulacji wysokości: wyjmowany klucz pozwala wyłączyć elektryczną regulację wysokości i ograniczyć możliwość jej uruchomienia przez osoby nieupoważnione. System trakcyjny

Kontrolowany pręciwy ruch (kontrola) / regulowane ustawienie ciężarów

15 cm

Przebieg leczenia

Poluzowanie pokrętła blokady umożliwia swobodny przesuw sekcji nożnej w zakresie **15 cm**. Dokręcenie pokrętła blokuje sekcję w ustalonym położeniu. Relingi służą do mocowania pasów stabilizujących zgodnie z procedurą zabiegową i instrukcją używanych akcesoriów.

$\pm 90^\circ$

Przebieg leczenia

Podstawa służy do montażu ciągnika trakcyjnego. Jej ramię obraca się w zakresie $\pm 90^\circ$ i może być blokowane skokowo co około 13° . Stół jest przystosowany do współpracy z urządzeniami TRU-TRAC lub TRITON.

Warianty ramy

Ramki dolne P1 lub P4

GALAXY Traction T4 jest dostępny z ramą F0 lub F4. Oba warianty różnią się sposobem przemieszczania pustego stołu i mogą zostać dopasowane do organizacji pracy placówki.

Wariant ramy F0 Konstrukcja Dwie stopki od strony zagłówka oraz dwa małe, nieskrętne koła w części tylnej. Przesuwanie stołu Pusty stół można przemieszczać po jego uniesieniu od strony zagłówka. Wariant ramy F4 Konstrukcja Cztery stopki oraz cztery wysuwane koła skrętne. Przesuwanie stołu Podczas pracy stół spoczywa na stopkach. Po wysunięciu czterech kół skrętnych pusty stół można przemieszczać bez konieczności jego ręcznego unoszenia.

Odkryj Galaxy Traction T4 pod dowolnym kątem i zobacz szczegóły konstrukcji w interaktywnym widoku 360°.

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Masa: 128 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: od -10° do +80°
Linia: Galaxy
Liczba sekcji: 4
Zakres regulacji wysokości: 48-98 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Klasa ochronności: I
Zasilanie: 100-240 V
Częstotliwość: 50-60 Hz
Długość całkowita: 202 cm
Pobór prądu: 1,5-3 A
Klasa wyrobu medycznego: I
Oznakowanie CE: Tak
Stopień ochrony: IPX4
Szerokość leża: 70 cm
Długość zagłówka: 59 cm
Długość sekcji środkowej: 21 cm
Długość sekcji nożnej: 87 cm
Długość sekcji miednicy: 25 cm
Zakres przesuwu sekcji nożnej: 15 cm
Typ części aplikacyjnej: B
Otwór na twarz: Tak
Autoryzacja dostępu kluczem: Tak
Możliwość montażu pasa trakcyjnego: Tak
Relingi do mocowania pasów stabilizujących: Tak
Zakres obrotu ramienia podstawy ciągnika trakcyjnego: $\pm 90^\circ$
Skokowa blokada ramienia podstawy ciągnika trakcyjnego: co około 13°

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Galaxy trakcja - wersje: Galaxy Traction T4 - T4.F0, Galaxy Traction T4 - T4.F4