

Cewnik Schelin Catheter do iniekcji wewnątrzsterczowych




Opis produktu:

Wstrzyknięcia leku o działaniu miejscowo znieczulającym do prostaty z użyciem **cewnika Schelin Catheter™** mogą:

- Zmniejszyć ból i dyskomfort,
- Eliminować ryzyko przedostania się patogenów z odbytnicy do organizmu podczas wstrzykiwania,
- Eliminować konieczność znieczulenia ogólnego.

Cewnik Schelin jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku, dostarczany jest w stanie sterylnym oraz gotowy do użycia. Należy obchodzić się z nim jak z produktem sterylnym.

Zdjęcia produktu:

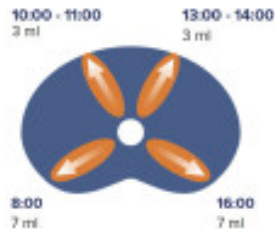

Szczegółowy opis produktu:

Srodki farmaceutyczne:

Sa one zalecane jako najmniej toksyczne i uczulające.

- Mepiwakaina (Carbocain - Aspen Nordic) 1% 20 ml.
- Lidokaina (Xylocain - Aspen Nordic) 1% 20 ml.

Zalecane pozycje cewnika i całkowita objętość do wstrzyknięcia:

Zalecane użycie przed terapią parą wodną

- Przed założeniem nasmaruj cewnik żelem znieczulającym. Włóż cewnik Schelin i napełnij balon 20 ml sterylnej wody.

- Ostrożnie rozciągnij cewnik tak, aby balon opierał się o szyjkę pęcherza moczowego. Opróżnij pęcherz przez wylot odprowadzający. Obróć cewnik do pozycji na godzinie 8 i wstrzyknij 3 ml po całkowitym wkłuciu igły. Wycofaj igłę o 10 mm do pierwszego szarego oznaczenia i wstrzyknij 2 ml. Wycofaj igłę o kolejne 10 mm do drugiego szarego oznaczenia i wstrzyknij 2 ml. Wyciągnij igłę, aż pojawi się szare oznaczenie o szerokości 5 mm.
- Obróć cewnik do pozycji na godzinie 16:00 i wstrzyknij łącznie 7 ml w taki sam sposób, jak powyżej.
- Wyciągnij igłę, aż pojawi się szare 5-milimetrowe oznaczenie.
- Obróć cewnik do pozycji godziny 13:00 - 14:00 i wstrzyknij łącznie 3 ml, gdy igła jest całkowicie włożona.
- Wyciągnij igłę, aż pojawi się szare 5-milimetrowe oznaczenie.
- Obróć cewnik do pozycji godziny 10:00-11:00 i wstrzyknij łącznie 3 ml, gdy igła jest całkowicie włożona.
- Całkowicie wycofaj igłę do cewnika, aż będzie widoczne całe 5-milimetrowe szare oznaczenie. Opróżnij balon, wyjmij cewnik i zutylizuj go.

Opublikowane badania dla Cewnika Schelin Catherer™

- Reduced treatment time for TUMT (Schelin, 2002)
- Reduced prostate bleeding (Schelin et al., 2004)
- Pain relief during treatment (Mutaguchi, 2005)
- Reduces peri-operative bleeding in TURP (Schelin, 2009)
- Larger resection weights at TURP (Stenmark, 2021)

Informacje:

Model:

CoreFlow - Soft Stent: Długość stentu 50 mm -
BNC 819150, Długość stentu 40 mm - BNC
819140