

Saebostim One

Opis produktu:



Saebostim One to łatwe w obsłudze bezprzewodowe urządzenie do elektrostymulacji. Jego konstrukcja jest idealna do zapobiegania lub zmniejszania podwichnięcia barku poprzez wzmocnienie osłabionych mięśni otaczających staw. Urządzenie działa na zasadzie dostarczania sygnałów elektrycznych za pośrednictwem bezprzewodowych elektrod do docelowych mięśni ramion, które wspomagają ich unoszenie.

Wymień podkładki żelowe co 10-12 zastosowań, aby uzyskać maksymalną stymulację!

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Co to jest Saebostim One

Saebostim One to bezprzewodowe urządzenie do elektrostymulacji, które zostało zaprojektowane w celu wzmocnienia osłabionych mięśni oraz zwiększeniu zakresu ruchu. Saebostim One można wykorzystać do reedukacji mięśni w celu poprawy ich funkcji.

Urządzenie Saebostim One doskonale sprawdza się w zapobieganiu lub zmniejszaniu ryzyka podwichnięcia poprzez wzmocnienie osłabionych mięśni (na przykład mięśni naramiennych), które odpowiadają za niestabilność lub zwichnięcie stawu. Saebostim One działa poprzez dostarczanie

sygnałów elektrycznych za pośrednictwem bezprzewodowych elektrod do wybranych mięśni ramion, co pomaga w podnoszeniu ramienia i przywracaniu go do prawidłowej pozycji stawowej.

Wbudowane programy zostały klinicznie przetestowane w celu poprawy funkcji, opóźnienia procesu zaniku mięśni oraz wzmocnienia osłabionych mięśni ramion i nóg. SaeboStim One stanowi doskonałe uzupełnienie każdego programu rehabilitacyjnego. Bez względu na to, czy stosuje się stymulację przed, po lub równolegle z innymi technologiami Saebo, różnorodność terapii może znacznie przyspieszyć powrót do pełnej sprawności funkcjonalnej.

Dla kogo przeznaczone jest urządzenie SaeboStim One?

- Pacjenci z urazami neurologicznymi oraz ortopedycznymi,
- Osoby po zabiegach ortopedycznych,
- Osoby cierpiące na osłabienie mięśni ramion oraz nóg.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania SaeboStim One?

- Pacjenci z ruzrusznikiem serca (wymagana jest konsultacja kardiologiczna)
- Pacjentki w ciąży
- Osoby z niekontrolowaną epilepsją

Informacje:

Model:

Saebo - rozmiar ogólny: Mały, Duży
Saebo - Dodatkowe wymienne podkładki żelowe
SaeboStim One: -, Rozmiar mały - 3 pary,
Rozmiar mały - 30 par, Rozmiar duży - 3 pary,
Rozmiar duży - 30 par