



Intellect Transport 2 Ultrasound - Aparat do terapii ultradźwiękowej

Opis produktu:

Intellect Transport 2 Ultrasound to przenośne urządzenie do terapii ultradźwiękowej, które generuje fale o częstotliwościach 1 i 3,3 MHz. Oprócz podstawowej głowicy 5 cm² może być wyposażony dodatkowo w głowice o średnicy 2 i 10 cm², baterię oraz wózek.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Intellect Transport 2 Ultrasound - Aparat do terapii ultradźwiękowej

Wyposażenie opcjonalne

głowica 2 cm² (47382),

głowica 10 cm² (47384),

wózek (15-1136),

bateria (14-1086).

Ulepszone wykrywanie sprzężenia i monitorowanie terapii optymalizuje transport odpowiedniej ilości energii do tkanek docelowych.

Możliwość zapisania do 15 niestandardowych protokołów w celu spersonalizowania zabiegów i skrócenia czasu konfiguracji.

Ultradźwięki o częstotliwości 1 i 3,3 MHz z wymiennymi rozmiarami głowic (2 cm², 5 cm² oraz 10 cm²) umożliwiają terapię różnych części ciała na zmiennych głębokościach penetracji.

Sprawne mocowanie do wózka za pośrednictwem magnesu eliminuje potrzebę użycia narzędzi podczas instalacji.

Lekka konstrukcja z opcjonalnym wbudowanym akumulatorem ułatwia przeprowadzanie zabiegów w dowolnym miejscu w placówce.

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego; łagodzenie bólu w dotkniętym obszarze.

1. Przycisk ON/OFF - Steruje przepływem energii elektrycznej do urządzenia.

2. Przycisk CLINICAL LIBRARY - Nacisnąć przycisk, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: Retrieve User Protocol (Pobierz protokół użytkownika), Restore Factory Settings (Przywróć ustawienia fabryczne), Restore Factory Protocols (Przywróć protokoły fabryczne), Language (Język), View Unit Information (Wyświetl informacje o urządzeniu), Backlight (Podświetlenie).

3. Przycisk TIME (CZAS) - Naciskając przyciski strzałek w górę lub w dół, można ustawić całkowity czas terapii.

4. Przycisk INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ) - Użyć strzałki w górę lub w dół na przycisku INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ), aby zwiększyć lub zmniejszyć moc wyjściową.

5. Przycisk 4-kierunkowy

- Strzałka w górę - Gdy w oknie wyświetlana jest lista opcji, nacisnąć przycisk strzałki w górę, aby przewinąć listę w górę.
- Strzałka w dół - Gdy w oknie wyświetlana jest lista opcji, nacisnąć przycisk strzałki w dół, aby przewinąć listę w dół.
- Powrót - Użyć tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego okna.
- Wyświetlanie/wprowadzanie parametrów - Wybrać ten przycisk, aby wyświetlić parametry fali podczas zabiegu. Ten przycisk służy także do akceptacji podświetlonego wyboru.

6. Przycisk STOP - Wybrać ten przycisk, aby zatrzymać zabieg.

7. Przycisk START - Wybrać przycisk Start, aby rozpocząć zabieg.

8. Przycisk PAUSE (WSTRZYMAJ) - Wybrać ten przycisk, aby wstrzymać zabieg. Aby ponownie rozpocząć zabieg, należy nacisnąć przycisk PAUSE (WSTRZYMAJ).

9. Uchwyt na aplikator ultradźwiękowy.

10. Uchwyt urządzenia.

Linia Intellect Transport 2 dostępna jest jako trzykanałowy model Combo (2 kanałowa elektroterapia + ultradźwięki) lub tylko ultradźwiękowy model Ultrasound, które mogą być używane z opcjonalnym wózkiem lub bez niego. Urządzenia cechują się lekką i wytrzymałą konstrukcją oraz opcją zasilania bateryjnego, co zwiększa ich wszechstronność i umożliwia wykorzystanie w profesjonalnym środowisku sportowym.

Kanały:	1
Zapisywanie niestandardowych protokołów:	15
Protokoły kliniczne:	Tak
Magnetyczne mocowania wózka:	Tak
Zasilanie:	100-240V, AC ~50/60 HZ
Masa urządzenia:	1,9 kg (bez baterii)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	25 x 34,6 x 11,9 cm
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Klasa I, typ B
Testy bezpieczeństwa:	UL/IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-5

Informacje:

Kategoria: Aparaty do terapii ultradźwiękowej

Model:

Bateria: nie, tak
 Głowica 2cm²: nie, tak
 Głowica 10cm²: nie, tak