



Tensi+ elektrostymulator na nietrzymanie moczu

Opis produktu:


Tensi+ to nielekowa i nieinwazyjna terapia bez skutków ubocznych umożliwiająca leczenie pęcherza nadreaktywnego pochodzenia idiopatycznego lub neurologicznego.

Wyrób medyczny klasy IIa Zaprojektowany we współpracy z urologami i pacjentami
Opracowany wyłącznie do stymulacji nerwu piszczelowego tylnego w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB)

Do zestawu dołączony jest żel przewodzący 100 ml.

Odkryj, jak Tensi+ wspomaga leczenie pęcherza nadreaktywnego. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pęcherz nadreaktywny (OAB) - Tensi+

Zdjęcia produktu:

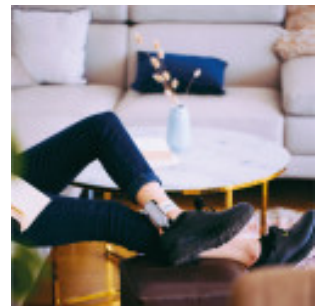



Szczegółowy opis produktu:

Odzyskaj kontrolę nad swoim pęcherzem

Tensi+ to urządzenie medyczne do leczenia pęcherza nadreaktywnego

Elektrostymulator na nietrzymanie moczu Tensi+ wykorzystuje technikę przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS) poprzez stymulację nerwu piszczelowego tylnego. Rezultaty techniki TENS są **potwierdzone klinicznie po 3 miesiącach leczenia**, czasami z pierwszymi efektami **po 6 tygodniach**.

Po założeniu po wewnętrznej stronie kostki, urządzenie Tensi+ stosuje się przez **20 minut dziennie** przez 12 tygodni lub dłużej, w zależności od zaleceń lekarza. W kolejnych tygodniach pacjent powinien kontynuować stosowanie Tensi+ w celu utrzymania efektów poprawy kontroli nad pęcherzem moczowym.

Zawartość zestawu

Elektrostymulator Tensi+, 2 elektrody, pasek, kabel USB, instrukcja obsługi.

Łatwa obsługa

Łatwy do założenia

Dyskretny

Samodzielna obsługa

Wyprodukowano we Francji

Tensi+ - innowacyjne i intuicyjne urządzenie

Tensi+ to nielekowa i nieinwazyjna terapia bez skutków ubocznych umożliwiającą leczenie pęcherza nadreaktywnego pochodzenia idiopatycznego lub neurologicznego.

Pęcherz nadreaktywny można zdefiniować jako nagłace parcie na mocz, zwykle związane z występowaniem jednego lub więcej z poniższych objawów:

Nagła potrzeba

Pragnienie jest nieodparte i nagłace.

Częstomocz

Chęć oddania moczu ponad 8 razy dziennie.

Nykturia

Potrzeba oddania moczu występuje co najmniej raz w ciągu nocy.

Nietrzymanie moczu

Brak kontroli nad oddawaniem moczu.

Prosta kuracja rozłożona w czasie

Tydzień 1

Pierwsze użycie Tensi+, codziennie przez 20 minut.

Tydzień 6

Odczuwalne zmniejszenie objawów i początkowe efekty w odzyskaniu kontroli nad pęcherzem.

Tydzień 12

Znacząca poprawa objawów pęcherza nadreaktywnego. Początkowa faza leczenia zostaje zakończona.

Kolejne tygodnie

Kontynuacja terapii w celu utrzymania efektów.

Informacje:

Kategoria: Elektrostymulatory

Model: