

Manipulator maciczny ClearView Total

Opis produktu:

ClearView Total to zaawansowane narzędzie chirurgiczne, które zachowuje wszystkie cechy standardowego urządzenia ClearView, jednocześnie oferując dodatkowe funkcje. Głównym udoskonaleniem jest fabrycznie zamontowany balon okluzyjny, który pełni kluczową rolę w zapobieganiu utracie odmy otrzewnej po wykonaniu nacięcia kolpotomii. Balon działa jako skuteczne uszczelnienie, utrzymując odpowiednie ciśnienie w jamie brzusznej podczas zabiegu.

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach:

- ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 7 cm - UM-750
- ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 9 cm - UM-950

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Manipulator maciczny ClearView Total

ClearView Total charakteryzuje się tymi samymi cechami co ClearView. Dodatkowo wyposażony jest w balon okluzyjny oraz trzy nakładki do kolpotomii różnej wielkości. Balon okluzyjny zapobiega utracie odmy otrzewnowej po wykonaniu nacięcia kolpotomii podczas histerektomii laparoskopowej.

Do napełniania balonu służy dołączona 60 ml strzykawka, za pomocą której wprowadza się 60-120 ml sterylnej soli fizjologicznej. Oprócz balonu, ClearView Total wyposażony jest w zestaw trzech kapturków do kolpotomii o różnych rozmiarach. Kapturki zostały specjalnie zaprojektowane, aby poprawić widoczność podczas wprowadzania.

ClearView Total sprawdza się w laparoskopowej histerektomii

ClearView Total jest szczególnie przydatny podczas laparoskopowej histerektomii. Połączenie balonu okluzyjnego i kapturków do kolpotomii umożliwia chirurgowi płynne przejście między poszczególnymi etapami zabiegu, jednocześnie minimalizując ryzyko potencjalnych komplikacji. Chirurgi korzystający z tego narzędzia mogą cieszyć się zwiększoną kontrolą nad polem operacyjnym oraz lepszą widocznością podczas kluczowych etapów zabiegu. Różnorodność rozmiarów kapturków pozwala na dostosowanie narzędzia do indywidualnych wymagań anatomicznych pacjentki.

Konfiguracja i użytkowanie ClearView Total

Sprawdź balon

Użyj dołączonej strzykawki, aby przetestować balon przed założeniem.

Zmierz wielkość macicy

Zmierz macice. W razie potrzeby poszerz szyjkę macicy.

Wprowadź urządzenie i napompuj balon

Zwilż końcówkę dystalną i włóż narzędzie do macicy. Powoli napompuj balon.

Uchwyt sterujący

Obracaj uchwyt, aby manipulować macicą.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis produktu	Kod produktu	Opakowanie
ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 7 cm	UM-750	1 szt.
ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 9 cm	UM-950	1 szt.

Informacje:

Kategoria: Manipulatory maciczne

Model:

Manipulator maciczny ClearView: ClearView - UM - 750, ClearView - UM-950