

## Poduszka przeciwodleżynowa Ida AB

### Opis produktu:

IDA AB to przeciwodleżynowa, zmiennociśnieniowa poduszka siedzeniowa, zaprojektowana z myślą o profilaktyce odleżyn. Składa się z zespołu komórek wypełnionych powietrzem, pracujących w czterech fazach cyklu, co sprzyja wentylacji skóry i wspomaga krążenie. Poduszka współpracuje z pompami Iza, Ida lub Ola, oferując tryb pracy ciągłej (zmiennej lub statycznej). Dostępna w różnych rozmiarach, z pokrowcem medycznym przystosowanym do prania.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

KOMFORT I PROFILAKTYKA

## Poduszka przeciwodleżynowa Ida AB

Ida AB to zmiennociśnieniowa poduszka siedzeniowa, stworzona z myślą o profilaktyce odleżyn. Składa się z zespołu połączonych ze sobą komórek, tworzących dwie odrębne, naprzemiennie zasilane sekcje powietrza.

### Budowa i działanie

Poduszka Ida AB zbudowana jest z wypustków-baniek lub komór prostych wypełnionych powietrzem. Komory są połączone naprzemiennie, tworząc dwie sekcje zasilane przez pompę zmiennociśnieniową. Działanie poduszki opiera się na zasadzie podobnej do materaców zmiennociśnieniowych, automatycznie regulując ciśnienie powietrza zgodnie z wybranym trybem pracy.

## Cykl pracy

System poduszki Ida AB pracuje w czterech fazach:

1. Wypełnienie wszystkich komór
2. Wypompowanie powietrza z co drugiej komory
3. Ponowne wypełnienie wszystkich komór
4. Wypompowanie powietrza z komór dotychczas stale wypełnionych

Ten cykl pomaga w tworzeniu efektu miecha powietrznego, co przyczynia się do wentylacji skóry pacjenta i wspomaga pracę układu krwionośnego.

## Konstrukcja i bezpieczeństwo

Poduszka Ida AB wykonana jest z elastycznego tworzywa i umieszczona w pokrowcu zamykanym na suwak. Pokrowiec jest przystosowany do mycia i prania, co ułatwia utrzymanie higieny. Dolna część pokrowca wykonana jest z materiału przeciwpoślizgowego, co zwiększa stabilność poduszki podczas użytkowania.

## Kompatybilność i użytkowanie

Do optymalnego funkcjonowania poduszki Ida AB zaleca się korzystanie z pomp Iza, Ida lub Ola. Poduszka pracuje w trybie ciągłym, oferując opcje pracy zmiennej lub statycznej. Minimalna użytkowa wartość ciśnienia wynosi 60 mmHg, a maksymalna dopuszczalna to 130 mmHg.

Pompę należy dokupić osobno.

## Dane techniczne

Ilość komór głównych	2
Pokrowiec medyczny	
Minimalna wartość ciśnienia	60 mmHg
Maksymalna wartość ciśnienia	130 mmHg
Ilość wypustków-baniek	25 lub 36
Zestaw naprawczy	
Masa własna	+/- 5 kg
Tryb pracy	Ciągły (zmienny lub statyczny)

## Dostępne modele

Nazwa modelu	Ilość komór	Ilość sekcji	Wymiary (cm)
Ida AB 25 42x42x5	25	2	42 x 42 x 5
Ida AB 25 46x46x5	25	2	46 x 46 x 5
Ida AB 36 42x42x5	36	2	42 x 42 x 5

**Informacje:**

**Model:**

Model: IDA AB 25 42x42x5, IDA AB 36 42x42x5