



Velox Foam Extra - Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

Opis produktu:

Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, działająca już od 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy. Polecana do sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i powierzchni w gabinetach kosmetycznych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Velox Foam Extra — Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

Bezalkoholowa pianka do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, o przyjemnym cytrusowym zapachu, szczególnie polecana do delikatnych materiałów.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika:

- Skuteczna dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe
- Działanie na bakterie, grzyby i wirusy już od 1 minuty
- Działanie na prątki gruźlicy w 5 minut
- Ekonomiczna w użyciu i gotowa do natychmiastowego zastosowania
- Przyjemny zapach cytrusowy

Spektrum działania:

- Bakterie i grzyby (1 min)
- Prątki gruźlicy (5 min)
- Wirusy osłonkowe

Zastosowanie

Velox® Foam Extra jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Znajduje zastosowanie w:

- Obszarze medycznym jako wyrób medyczny
- Domach opieki
- Salonach fitness i SPA
- Gabinetach kosmetycznych i masażu
- Powierzchniach mających kontakt z żywnością
- Dezynfekcji powierzchni ze szkła akrylowego, foteli zabiegowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Sposób użycia

Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Postać	Bezalkoholowa pianka
Zapach	Cytrusowy
Rodzaj opakowania	butelka 1 l ze spryskiwaczem
Skład (na 100 g roztworu)	0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g P oli(oksy-1,2-etanodiol), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)
Certyfikacja	wyrób medyczny i produkt biobójczy

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Spektrum

Normy wg

organiczne niskie

wysokie

EN14885

Bakterie	EN13727	60 sek.	60 sek.
	EN13697	30 sek.	60 sek.
	EN16615	60 sek.	3 min
Grzyby (C.albicans)	EN13624	60 sek.	60 sek.
	EN13697	30 sek.	
	EN16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy	EN14348	5 min	10 min

(M.terrae)			
Prątki (M.avium, M.terrae)	EN14348	15 min	15 min
Wirusy osłonkowe (Vaccinia)	EN14476	60 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN14476	60 sek.	60 sek.
Rotawirus	EN14476	15 min	

Informacje:

Przeznaczenie: Środek do dezynfekcji
Rodzaj preparatu: Czyszczący
Konsystencja: Inny
Pojemność: 1000 ml
Klasyfikacja: produkt medyczny

Model:

Ilość sztuk: 1 szt., karton (6 szt.)