

Masa fangoparafinowa do zabiegów fango



Opis produktu:

Masa fango wykorzystywana jest do **okładów fangoparafinowych**. **Okłady z fango** wykorzystywane są do **terapii termicznej** w uzdrowiskach i SPA.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Masa fango

Masa fango wykorzystywana jest do okładów **fangoparafinowych**. **Okłady z fango** wykorzystywane są do terapii termicznej w uzdrowiskach i SPA.

Fango to **związek mineralny** o pochodzeniu **wulkanicznym**, jego wyjątkowe składniki są bardziej skoncentrowane niż w naturalnej masie torfowej. Stosowanie **okładów** bezpośrednio na skórę pozwala na transdermalne przyswajanie cennych składników **masy**, dodatkowo osiągając efekt **rozluźnienia mięśni**, ulgi w dolegliwościach stawów i redukcję stresu. Masa **fango** dostępna w naszym **sklepie** charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termo-fizycznymi - silnie **przewodzi ciepło**, działa rozgrzewająco i powoli oddaje temperaturę.

Dostępne są dwa rodzaje masy fango parafinowej:

- **Fangoparaffina płynna "N"** - o **niższej lepkości**, pochodząca ze złóż błota morskiego uformowanego z łupków traw morskich oraz pyłu wulkanicznego. Dzięki zawartości składników zmiękczających, **masa fango** jest średnio gęsta, doskonale nadaje się do wykonywania okładów z wykorzystaniem folii do fango.

Parafina stała	35-40%
Fango	38-43%
Dodatkowe składniki	22-26%

- **Fangoparafina gęsta "K"** - o **wyższej lepkości**, pochodząca z błota wulkanicznego i złóż błota morskiego. Swoje właściwości zawdzięcza wyższej zawartości **błota fango**, przez co **masa** jest gęsta i dobrze poddaje się formowaniu.

Parafina stała	35-40%
Fango	42-47%
Dodatkowe składniki	16-21%

Masa do okładów **fango (parafango)** jest wzbogacona **parafiną**, dzięki czemu jest łatwa w użyciu i charakteryzuje się wysoką plastycznością. **Okłady** z masy **fango** wykonywane są z wykorzystaniem folii do **fango**, sama **masa fango** po podgrzaniu nadaje się do ponownego użycia, dzięki czemu jest to bardzo **ekonomiczny zabieg**. **Masa** może zostać użyta ponownie ok. 20-30 razy pod warunkiem zastosowania **sterylizacji** masy (temp. 130°C przez 15 minut) po każdym **zabiegu**.

Wskazania do stosowania okładów fango:

- schorzenia **reumatologiczne** i **zwyrodnieniowe stawów**,
- przewlekłe **stany zapalne mięśni i stawów**,
- **stany zapalne** narządów wewnętrznych,
- schorzenia **pourazowe**,
- choroby układu **mięśniowo-szkieletowego**,
- **bolesne miesiączki**,
- zaburzenia **psychiczne** i psychosomatyczne,
- wysoki poziom **stresu, przemęczenie**,
- blizny i zrosty po **zabiegach operacyjnych**.

Masa fango - przeciwwskazania:

- ciąża,
- wysoka temperatura, gorączka,
- niewydolność układu krążenia, choroby serca,
- nadciśnienie krwi,
- **wrzody** żołądka lub jelit,
- ostre stany **reumatyczne**.

W przypadku występowania wyżej wymienionych schorzeń należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem terapii z wykorzystaniem masy **fango**.

Aplikacja masy fango:

Jeżeli lekarz kierujący nie zalecił inaczej, masę należy przygotować w mieszalniku, podgrzać w cieplarni do temperatury ok. 50°C. **Masa** powinna być aplikowana w zależności od **powierzchni ciała** poddawanej terapii:

okład na rękę	2-3 kg
okład na łokieć	1-2 kg
okład na stopę	2-3 kg
okład wątroby	3-4 kg
okład pośladków	2-3 kg
okład dłoni	2 kg
okład biodra	2 kg
okład kolana	2-3 kg
okład torsu	3-4 kg
okład pleców	3 kg
okład ramion	2-3 kg
okład brzucha	3-4 kg

Informacja

Parafina fango nie ma terminu ważności. Po pierwszym użyciu parafinę Fango można przetworzyć i ponownie wykorzystać aż do 30 razy zgodnie z poniższym opisem: Ponowne użycie parafiny fango możliwe jest po jej podgrzaniu do temperatury 130-135 °C przez minimum 15-20 min i zachowaniu zwyczajowych środków higieny. Działania te można przeprowadzić aż do 30 razy bez utraty jakości. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe szczegóły producenta mieszadeł fango dotyczące tej obróbki w wysokiej temperaturze. Należy pamiętać, że parafiny fango nie da się całkowicie usunąć z tekstyliów.

Informacje:

Kategoria: Termoterapia

Model:

Masa fango: płynna "N" - niższa lepkość, gęsta "K" - wyższa lepkość