

Okład parafinowy PINO 27,5 x 37 cm



Opis produktu:

Okład parafinowy PINO 27,5 x 37 cm to wyrób medyczny wielokrotnego użytku, przeznaczony do profesjonalnych zabiegów ciepłoleczniczych. Dzięki wysokiej pojemności cieplnej parafiny, okład oddaje ciepło powoli i równomiernie, co pozwala utrzymać stałą temperaturę terapeutyczną w tkankach przez cały czas trwania zabiegu. Wytrzymały i elastyczny pokrowiec jest przystosowany do łatwej dezynfekcji, wspierając zachowanie standardów higienicznych w placówce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Okład parafinowy PINO 27,5 x 37 cm

Wysokiej jakości okład parafinowy wielokrotnego użytku, przeznaczony do profesjonalnych zabiegów ciepłoleczniczych. Dostarcza tkankom głębokie i równomierne ciepło, wspierając procesy regeneracyjne i przynosząc ulgę w bólu.

Produkt jest wyrobem medycznym, przeznaczonym wyłącznie do użytku profesjonalnego przez przeszkolonych specjalistów.

Ciepłolecznictwo z użyciem parafiny

Zabiegi z użyciem okładów parafinowych mają na celu głębokie i równomierne rozgrzanie tkanek, takich jak mięśnie, stawy, ścięgna czy więzadła. Parafina charakteryzuje się wysoką pojemnością cieplną i niską przewodnością, co sprawia, że oddaje ciepło stopniowo i długotrwale, minimalizując ryzyko poparzenia skóry. Efektem zabiegu jest poprawa krążenia krwi, zwiększenie elastyczności tkanek oraz przyspieszenie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu.

Długotrwałe i stabilne ciepło

Dzięki wysokiej pojemności cieplnej parafina oddaje ciepło powoli i równomiernie, utrzymując je w zakresie terapeutycznym przez cały czas trwania zabiegu (do 20-30 minut).

Wytrzymałość i łatwa pielęgnacja

Produkt jest wytrzymały dzięki elastycznemu pokrowcowi wykonanemu z folii. Po każdym użyciu należy go zdezynfekować przez przetarcie, używając bezalkoholowych środków na bazie wody.

Działanie i efekty terapeutyczne:

- rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawa krążenia,
- głębokie rozluźnienie mięśni,
- działanie przeciwbólowe,
- zwiększenie elastyczności tkanek miękkich,
- przyspieszenie procesów regeneracyjnych.

Wskazania do stosowania:

- choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów,
- stany po urazach narządu ruchu (np. skręcenia, zwichnięcia),
- zeszywnienia stawów i przykurcze,
- przewlekłe stany zapalne tkanek miękkich,
- dolegliwości bólowe mięśni i ścięgien.

Sposób użycia i przygotowanie do zabiegu

1. Okład należy podgrzać do temperatury 50-65°C w szafie grzewczej.
2. Okładu parafinowego nie należy kłaść bezpośrednio na skórę. Po podgrzaniu należy go umieścić w pokrowcu lub owinąć grubym ręcznikiem, tworząc warstwę izolacyjną.
3. Tak przygotowany okład należy umieścić na części ciała poddawanej terapii. Zalecany czas zabiegu wynosi 20-30 minut.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	27,5 x 37 cm
Wypełnienie	Parafina
Zastosowanie	Wielokrotnego użytku
Podgrzewanie	Szafa grzewcza (50-65°C)
Maks. temperatura	Nie podgrzewać powyżej 70°C
Kuchenka mikrofalowa	Nie nadaje się
Szacowana żywotność	Ok. 6-12 miesięcy (materiał eksploatacyjny, zależnie od intensywności użytkowania)
Czyszczenie	Bezalkoholowe środki dezynfekujące na bazie wody
Zawartość opakowania	1 x Okład parafinowy PINO
Status produktu	Wyrób medyczny

Kraj produkcji

Niemcy

Informacje:

Model: