



Zestaw promocyjny - Intellect Transport 2 Combo + stół Nexus S2

Opis produktu:

Zestaw promocyjny Intellect Transport 2 Combo + stół Nexus S2 to profesjonalne rozwiązanie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i masażu leczniczego. Przenośny aparat Intellect Transport 2 Combo z kolorowym ekranem i wbudowanymi protokołami klinicznymi zapewnia skuteczne i spersonalizowane zabiegi, a stabilny i nowoczesny stół Nexus S2 doskonale sprawdza się zarówno w gabinetach fizjoterapii, jak i w Medical SPA & Wellness.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Intellect Transport 2 Combo - Przeznaczenie

Intellect® Transport 2 Combo udostępnia szereg terapii multimodalnych (m.in. TENS, NMES, ultradźwięki) przeznaczonych do stosowania przez pracowników opieki zdrowotnej w celu leczenia różnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Cechy charakterystyczne

Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości z przejrzystym, intuicyjnym menu.

Możliwość zapisania do 15 niestandardowych protokołów.

Ilość dostępnych przebiegów prądowych: 14.

Ulepszone wykrywanie sprzężenia i monitorowanie terapii optymalizuje transport odpowiedniej ilości energii do tkanek docelowych.

Ultradźwięki o częstotliwości 1 i 3,3 MHz z wymiennymi głowicami (2 cm², 5 cm² oraz 10 cm²) umożliwiają terapię różnych części ciała na zmiennych głębokościach penetracji.

Mocowanie sterownika do wózka za pośrednictwem magnesu eliminuje potrzebę użycia narzędzi podczas instalacji.

Lekka konstrukcja z opcjonalnym wbudowanym akumulatorem ułatwia przeprowadzanie zabiegów w dowolnym miejscu w placówce.

Możliwość przeprowadzania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki).

Wyposażenie podstawowe

Intellect Transport 2 Combo (47544)

Aplikator ultradźwiękowy 5 cm²/sup > (47383)

Zestaw przewodów, kanał 1 (40-0097)

Zestaw przewodów, kanał 2 (40-0098)

Elektroda węglowa 6 x 8 cm, czarna (79967)

Gąbkowa kieszonka na elektrody 9 x 10,5 cm (79970)

Rzepowa opaska mocująca Nylatex 2-1/2 x 24 (12-10648)

Elektrody samoprzylepne Dura-Stick+ 5 cm (42197)

Wyposażenie opcjonalne

Głowica 2 cm² (47382)

Głowica 10 cm² (47384)

Bateria (14-1086)

Wózek (15-1136)

Interfejs użytkownika w Intellect Transport 2 Combo

1. Przycisk ON/OFF - Steruje przepływem energii elektrycznej do urządzenia

2. Przycisk CLINICAL LIBRARY - Nacisnąć przycisk, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: Retrieve User Protocol (Pobierz protokół użytkownika), Restore Factory Settings (Przywróć ustawienia fabryczne), Restore Factory Protocols (Przywróć protokoły fabryczne), Language (Język), View Unit Information (Wyświetl informacje o urządzeniu), Backlight (Podświetlenie).

3. Przycisk TIME (CZAS) - Naciskając przyciski strzałek w górę lub w dół, można ustawić całkowity czas terapii.

4. Przycisk INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ) - Użyć strzałki w górę lub w dół na przycisku INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ), aby zwiększyć lub zmniejszyć moc wyjściową.

5. Przycisk 4-kierunkowy

- Strzałka w górę - Gdy w oknie wyświetlana jest lista opcji, nacisnąć przycisk strzałki w górę, aby przewinąć listę w górę.

- Strzałka w dół - Gdy w oknie wyświetlana jest lista opcji, nacisnąć przycisk strzałki w dół, aby przewinąć listę w dół.
- Powrót - Użyć tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego okna.
- Wyświetlanie/wprowadzanie parametrów - Wybrać ten przycisk, aby wyświetlić parametry fali podczas zabiegu. Ten przycisk służy także do akceptacji podświetlonego wyboru.

6. Przycisk STOP - Wybrać ten przycisk, aby zatrzymać zabieg.

7. Przycisk START - Wybrać przycisk Start, aby rozpocząć zabieg.

8. Przycisk PAUSE (WSTRZYMAJ) - Wybrać ten przycisk, aby wstrzymać zabieg. Aby ponownie rozpocząć zabieg, należy nacisnąć przycisk PAUSE (WSTRZYMAJ).

9. Uchwyt na aplikator ultradźwiękowy

10. Uchwyt urządzenia

Dostępne przebiegi prądowe

- Prądy interferencyjne
- Prądy interferencyjne, premodulowane
- Stymulacja rosyjska
- VMS
- Prądy wysokonapięciowe
- Mikroprądy
- TENS Asymetryczny dwufazowy
- TENS Symetryczny dwufazowy
- Prądy Träberta
- Galwaniczny ciągły
- Galwaniczny przerywany
- Monofazowy trójkątny
- Monofazowy prostokątny
- Prądy diadynamiczne

Wskazania do elektroterapii

TENS

Objawowe łagodzenie ostrego i przewlekłego bólu związanego ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Zarządzanie i łagodzenie bólu pooperacyjnego

NMES

Reedukacja mięśni

Utrzymanie/zwiększenie zakresu ruchu

Prezentacja video

Linia Intellect Transport 2 dostępna jest jako trzykanałowy model Combo (2 kanałowa elektroterapia + ultradźwięki) lub tylko ultradźwiękowy model Ultrasound, które mogą być używane z opcjonalnym wózkiem lub bez niego. Urządzenia cechują się lekką i wytrzymałą konstrukcją oraz opcją zasilania bateryjnego, co zwiększa ich wszechstronność i umożliwia wykorzystanie w profesjonalnym środowisku sportowym.

Dane techniczne

Ilość kanałów do elektrostymulacji:	2
Ilość kanałów do terapii ultradźwiękami:	1
Zapisywanie niestandardowych protokołów:	15
Ilość przebiegów prądowych:	14
Protokoły kliniczne:	Tak
Magnetyczne mocowania wózka:	Tak
Zasilanie:	100-240V, AC ~50/60 Hz
Masa urządzenia:	2,2 kg (bez baterii)
Waga transportowa:	3,9 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	25 x 34,6 x 11,9 cm
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Ultradźwięki klasa I, typ B Elektroterapia klasa I, typ BF
Testy bezpieczeństwa:	UL/IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-5

Stół do ręcznego masażu leczniczego Nexus S2

Stół do masażu Nexus został stworzony z myślą o masażystach i terapeutach manualnych, poszukujących stabilnego i wygodnego urządzenia do pracy. Każdy stół do masażu z linii Nexus jest wyposażony w zastrzeżoną wzorem użytkowym ramkę, umożliwiającą komfortową regulację góra/dół. Ramka jest umieszczona bezpośrednio pod leżyskiem, dzięki czemu kontrola wysokości jest wygodna w obsłudze.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii stół Nexus uzyskał niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju detale wykończeniowe. Każda z części składowych stołu wykonana jest z maksymalną precyzją, estetyką i co najważniejsze - niezawodnością. Poprzez nową technologię produkcji oraz najbardziej rygorystyczne normy powstał produkt stabilny, wytrzymały i bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej. Wymiary oraz parametry użytkowe stołu Nexus zostały opracowane przy współudziale inżynierów oraz specjalistów z dziedziny rehabilitacji, kosmetologii i masażu. Dzięki wypracowanym standardom uzyskaliśmy w pełni ergonomiczny kształt, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno kosmetologowi jak i pacjentowi.

Cechy charakterystyczne

- stół o solidnej, nożycowej konstrukcji,
- wytrzymały - maksymalne obciążenie stołu to aż 185 kg,

- wyposażony w autoryzację dostępu zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą ustawień stołu,
- estetyczny i nowoczesny design doskonale wpisujący się w stylistykę gabinetów do rehabilitacji, gabinetów SPA & Wellness,
- wielowarstwowa tapicerka wykonana jest z wytrzymałych, cieczoodpornych materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie stołu,
- dostępna szeroka gama kolorystyczna tapicerki,
- opcja podgrzewanego leżyska o dwustopniowej regulacji temperatury,

Wskazania

Stół do masażu Nexus umożliwia przyjęcie właściwej pozycji do masażu pacjentom dotkniętym schorzeniami takimi jak:

- zespół skrzyżowania górnego,
- zespół opóźnionego bólu mięśniowego,
- ból szyjnego odcinka kręgosłupa,
- przeciążenie zawodowe,
- zaburzenia napięcia mięśniowego,
- choroba dyskowa kręgosłupa,
- choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego,
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego,
- przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa,
- zespół bolesnego barku,
- mukowiscydoza,
- przewlekły ból pleców,
- przewlekły ból w dolnym odcinku kręgosłupa,
- ból w zmęczeniu mięśnia czworogłowego,
- napięciowy ból głowy.

Informacje:

Model: