

Aplikator miejscowy Dwu-dyskowy MT - Viofor



Opis produktu:

Przeznaczony do wykonywania **zabiegów magnetoterapii** na wybrane części ciała. Składa się z dwóch identycznych elementów aplikacyjnych - dysków. Dwukolorowe pokrycie dysków określa polaryzację pola magnetycznego wytwarzanego przez każdy element, co ma istotne znaczenie dla metodyki terapii.

Aplikator Dwu-dyskowy MT - Viofor wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości składa się z dwóch identycznych, połączonych ze sobą płaskich elementów aplikacyjnych - dysków **Współpracuje ze sterownikami Clinic.**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aplikator miejscowy Dwu-dyskowy MT - Viofor

Dwukolorowe pokrycie dysków określa polaryzację pola magnetycznego wytwarzanego przez każdy element, co ma istotne znaczenie dla sposobu (metodyki) prowadzenia terapii.

Stosowanie aplikatora

Konfiguracja płaska - możliwy do zastosowania zakres indukcji magnetycznej: 0,19-4,5 mT.

- dyski ułożone rozdzielnie tym samym kolorem „do góry”
 - każdy dysk wytwarza niejednorodne zmienne pole magnetyczne o tej samej polaryzacji
- dyski ułożone rozdzielnie różnymi kolorami „do góry”
 - każdy dysk wytwarza niejednorodne zmienne pole magnetyczne o przeciwnej polaryzacji

Konfiguracja w stos

- **dyski ułożone w stos tymi samymi kolorami „do góry”, kończy na dyskach.**
 - możliwy do zastosowania zakres indukcji magnetycznej: 0,25-6 mT.
 - każdy dysk wytwarza niejednorodne pole magnetyczne o tej samej polaryzacji.

- **dyski ułożone w stos tymi samymi kolorami „do góry”, kończyła pomiędzy dyskami.**
 - możliwy do zastosowania zakres indukcji magnetycznej: 0,19-4,5 mT
 - każdy dysk wytwarza niejednorodne pole magnetyczne o tej samej polaryzacji.
 - umieszczenie dysków nad sobą w odpowiedniej odległości pozwala uzyskać między nimi pole magnetyczne zbliżone do jednorodnego.

Zastosowania Dwu-dyskowy MT

- Choroby narządu ruchu
- Opóźniony zrost kostny
- Powikłania endoprotezoplastyki stawu biodrowego
- Stawy rzekome
- Powikłania występujące podczas wydłużania kości metodą operacyjną
- Osteoporoza
- Choroba zwyrodnieniowa oraz stany zapalne stawów
- Stany po pęknięciach i złamaniach kości
- Stany po urazach stawów
- Choroby układu krążenia
- Mikro- i makroangiopatia cukrzycowa
- Angiopatia na tle miażdżycowym
- Choroby skóry i tkanek miękkich
- Rany skóry i tkanek miękkich
- Infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich
- Oparzenia
- Bliznowce
- Owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi

Dane techniczne:

indukcja pola magnetycznego (szczytowa) dla jednego dysku	0,19 mT - 4,56 mT
indukcja pola magnetycznego (szczytowa) dla dwóch dysków ułożonych w stos	0,25 mT - 6,0 mT
częstotliwość	od 5 do 40 Hz, regulowana skokowo co 5 Hz
czas zabiegu	od 10 do 30 min, regulowany skokowo co 5 min
kształt sygnału	sinusoidalny, prostokątny, trójkątny
średnica jednego dysku	16,5 cm
wysokość jednego dysku	3,3 cm

Informacje:

Model: