



Lampa do naświetlań Biopttron MedAll ze statywem

Opis produktu:

Lampa Biopttron do terapii światłem najnowszej generacji - MedAll ze statywem to zestaw umożliwiający terapię wygodną pracę z pacjentem podczas zabiegu **leczenia światłem**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lampa Biopttron do terapii światłem najnowszej generacji - MedAll ze statywem to zestaw umożliwiający terapię wygodną pracę z pacjentem podczas zabiegu **leczenia światłem**. Pozwala na oszczędność czasu i sił terapeuty podnosząc jednocześnie **efektywność samego zabiegu**. Terapeuta ma możliwość **pracy z innym pacjentem**, nie odczuwa też dolegliwości związanych z długotrwałym utrzymywaniem **rąk w jednej pozycji**.

Lampa Biopttron MedAll pokrywa **obszar 40,72 cm²** zapewniając większy **zasięg terapeutyczny** niż stosowany do tej pory **Biopttron Compact III**. Średnica lampy wynosi **5 cm**.

Biostymulująca **terapia światłem Biopttron** działa w **naturalny sposób**. Poprawia **zdolności regeneracyjne organizmu**, pomaga mu wykorzystać swój własny potencjał leczniczy.

Wskazania medyczne:

- **Reumatologia:**
 - zapalenie kości i stawów,
 - reumatoidalne zapalenie stawów (przewlekłe),
 - choroba zwyrodnieniowa stawów

- **Fizjoterapia:**

- bóle krzyża,
- bóle ramion i szyi,
- zespół cieśni nadgarstka,
- blizny,
- urazy układu mięśniowo-szkieletowego

- **Medycyna sportowa:**

- uszkodzenie tkanki miękkiej mięśni,
- ścięgien i więzadeł

- **Leczenie bólu i gojenie ran:**

- gojenie się ran,
- gojenie się ran po urazach (zranieniach),
- oparzenia,
- gojenie się ran po operacjach,
- owrzodzenie podudzi,
- odleżyny

- **W leczeniu noworodków:**

- zapalenie żył,
- odleżyny,
- oparzenia

- **W pediatrii:**

- zmiany skórne u dzieci,
- egzema endogenna,
- infekcje górnych dróg oddechowych,
- choroby alergiczne układu oddechowego,
- zaburzenia i deficyty mięśniowoszkieletowe,
- zaburzenie i deficyty neurologiczne

- **Zaburzenia dermatologiczne i problemy skórne:**

- atopowe zapalenia skóry,
- łuszczyca,
- opryszczka prosta i półpasiec,
- powierzchowne infekcje bakteryjne,
- trądzik młodzieńczy ,
- uszkodzenia błon śluzowych

- **Sezonowe Zaburzenia Afektywne(SAD)**

100 milionów osób cierpi na bóle mięśni i stawów 100 milionów osób cierpi na artretyzm i reumatyzm 67 milionów osób cierpi na bóle ramion, barków i krzyża 67 milionów osób doznaje urazów i 4 000 000 osób odnosi rany i obrażenia Jedna na pięć osób dorosłych cierpi z powodu przewlekłego bólu

Wszystkie te dolegliwości można leczyć dzięki BIOPTRON Light Therapy

Zalety lamp Bioptron:

- Szeroki wachlarz zastosowań dla zdrowia
- Klinicznie potwierdzony pozytywny wpływ na różne systemy ustrojowe
- Brak znanych negatywnych skutków ubocznych, ryzyka wystąpienia zagrożenia
- Prosty w obsłudze dla całej rodziny

- Nie wymaga konserwacji
- Nieustanne wprowadzanie innowacji

Zobacz jak stosować lampę Bioptron

Lp	Rodzaj schorzenia	Miejsce naświetlania	Czas minimalny	Dziennie	Minimum
1	Afty	Miejsce występowania bólu	6 min	3 razy	10-20 dni
2	Alergie	Objawowo, splot słoneczny, grasicca	6 min	2 razy	Do skutku
3	Astma	Splot słoneczny, grasicca	8 min	2-3 razy	Do skutku
4	Bielactwo	Bezpośrednio z odl.5cm	6 min	3 razy	Do skutku
5	Bóle gardła	Gardło wewnętrzne, nasada nosa	8 min	2 razy	3 dni
6	Bóle głowy	W miejscu bólu, tył głowy	12 min	3 razy	10 dni
7	Bóle wątroby	Miejsce bolące + receptory	8 min	3 razy	20 dni
8	Ból zębów	Miejsce występowania bólu	8 min		Do skutku
9	Bóle żołądka	Miejsce bolące + receptory	16 min	2 razy	20 dni
10	Cellulitis	Miejsce występowania + Oxy Spray	6 min	3 razy	20 dni
11	Choroba Alzheimera	Splot słoneczny + receptory mózgu	10 min	2 razy	60 dni
12	Chrypka	Tchawica, receptory + Oxy Spray do gardła	8 min	2-3 razy	10 - 20 dni
13	Cukrzyca	Trzustka, receptory trzustki	12 min	2-3 razy	20 - 60 dni
14	Depresje	Splot słoneczny, grasicca, twarz	6 min	3 razy	wg potrzeb
15	Dolegliwości menstruacyjne	Środek podbrzusza	16 min	2-4 razy	Do skutku
16	Dolegliwości pozawałowe	Splot słoneczny, grasicca, łuk strzelca	8 min	2 razy	20 dni
17	Dyskopatie	Punktowo, kręgosłup na całej długości	6 min	2-3 razy	Do skutku
18	Egzema	Punktowo + Oxy Spray	8 min	3 razy	10 - 30 dni
19	Gronkowiec	Migdały, receptory + Oxy Spray do ustnie	10 min	3 razy	Do skutku
20	Grzybica	Punktowo + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
21	Halluxy	Na miejsca występowania	8 min	2-3 razy	Do skutku
22	Hemoroidy	Bezpośrednio na chore miejsca	12 min	3 razy	20 dni
23	Jaskra	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2-3 razy	Do skutku

24	Jęczmień	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2-3 razy	Do skutku
25	Kamica nerkowa	Nerki	16 min	3 razy	Do skutku
26	Kamica woreczka żółciowego	Bezpośrednio na bolące miejsca	12 min	3 razy	Do skutku
27	Kaszel	Tchawica, receptory + Oxy Spray	8 min	3 razy	10 dni
28	Katar	Zatoki szczękowo - czołowe, nasada nosa	8 min	3 razy	7 dni
29	Katar sienny	Splot słoneczny, grasicca, krtań, zatoki szczękowe, nasada nosa	6 min	2 razy	Okres pylenia
30	Krótkowzroczność	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2 razy	Do skutku
31	Krwiaki	Chore miejsca	12 min	3 razy	10 dni
32	Łuszczyca	Chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
33	Łysienie plackowate	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	3 razy	Do skutku
34	Martwice	Miejsca objawów + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
35	Miażdżycy	Miejsca bólu, receptory układu krążenia	10 min	2 razy	Do skutku
36	Migreny	W miejscu bólu, tył głowy	12 min	3-5 razy	Do skutku
37	Nadciśnienie tętnicze	Receptor za lewym uchem, serce	6 min	Rano	Do skutku
38	Naderwania ścięgien	Miejsce występowania bólu	12 min	2 razy	Do skutku
39	Nerczyca	Nerki, pęcherz moczowy, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
40	Neuralgie	Punktowo, kręgosłup na całej długości	6 min	3 razy	Do skutku
41	Niedowład mięśni	Splot słoneczny, punktowo chore miejsca	16 min	3 razy	Do skutku
42	Odciski	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
43	Odklejenie siatkówki	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
44	Odleżyny	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
45	Odmrożenia	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
46	Odparzenia	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
47	Odra	Splot słoneczny, miejsca objawów + Oxy Spray	6 min	3 razy	10 dni
48	Oparzenia	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
	Opryszczka	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	2 razy	2 dni
49		Objawowo + Oxy Spray, splot	6 min	3 razy	Do

		słoneczny			skutku
50	Osteoporoza	Punktowo na miejsca dolegliwości	12 min	3 razy	Do skutku
51	Ostrogi	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
52	Owrzodzenia żylakowate	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
53	Paradontoza	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
54	Paraliż	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	10 min	3 razy	Do skutku
55	Plamy starcze	Punktowo w miejscach występowania	6 min	3 razy	Do skutku
56	Półpasiec	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	8 min	3 razy	Do skutku
57	Prostata	Punktowo na chore miejsca, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
58	Przebarwienia skóry	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
59	Przeszczepy	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	15 dni
60	Przeziębienia	Splot słoneczny, grasicca, nasada nosa	8 min	3 razy	Do skutku
61	Rany oka	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
62	Rany wszelkiego typu	Punktowo oraz wokół rany	6 min	3 razy	10 dni
63	Rewitalizacja	Splot słoneczny, grasicca, twarz	6 min	3 razy	wg potrzeb
64	Rozstępy	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
65	Rumień	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	2 razy	10 dni
66	Schorzenia reumatyczne	Splot słoneczny, punktowo na chore miejsca	12 min	3 razy	Do skutku
67	Sińce	Chore miejsca + Oxy Spray	8 min	2 razy	14 dni
68	Skręcenia	Chore miejsca	8 min	3 razy	14 - 30 dni
69	Skurcze mięśni	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
70	Stany zapalne oka	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	3 razy	Do skutku
71	Stany zapalne	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	8 min	3 razy	10 - 30 dni
72	Stany zapalne dziąseł	Miejsce występowania bólu	6 min	2 razy	14 dni
73	Stłuczenia	Miejsce występowania bólu	8 min	2 razy	14 dni
74	Stwardnienie skóry	Bezpośrednio na miejsca występowania	6 min	3 razy	Do skutku
75	Stwardnienie rozsiane	Splot słoneczny, punktowo chore miejsca	8 min	3 razy	Do skutku
76	Szum w uszach	Bezpośrednio do ucha, receptory uszu	8 min	2 razy	Do

					skutku
77	Trądzik	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
78	Wrzody dwunastnicy	Miejsca występowania bólu, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
79	Wrzody żołądka	Miejsca występowania bólu, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
80	Wysypki	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	7 dni
81	Zaćma	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
82	Zakrzepowe zapalenie żył	Punktowo na chore miejsca	6 min	3 razy	30 dni
83	Zapalenia korzonków	Punktowo na chore miejsca, receptory	8 min	3 razy	14 dni
84	Zapalenie migdałków	Punktowo na chore miejsca, receptory	8 min	3 razy	7 - 14 dni
85	Zapalenie oskrzeli	Splot słoneczny, drzewka oskrzeli, receptory	8 min	3 razy	7 - 14 dni
86	Zapalenie ucha	Bezpośrednio do ucha, receptory uszu	8 min	3 razy	7 - 14 dni
87	Zapalenie zatok	Splot słoneczny, zatoki	8 min	3 razy	7 - 14 dni
88	Zespoły bólowo korzeniowe	Punktowo na chore miejsca	16 min	2 razy	Do skutku
89	Złamania	Dwa miejsca - przed i za gipsem	8 min	3 razy	14 dni
90	Zmarszczki	Twarz + Oxy Spray	8 min	2 razy	Do skutku
91	Zwichnięcia	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	16 min	3 razy	7 - 14 dni
92	Zwyrodnienia stawów	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	16 min	3 razy	Do skutku
93	Żylaki	Punktowo na miejsca występowania	6 min	3 razy	Do skutku

Światło **BIOPTRON** jest **światłem spolaryzowanym** - jego fale poruszają się (oscylują) na płaszczyznach równoległych. **Polaryzacja** wytwarzana jest przy zastosowaniu bardziej złożonej wersji systemu wielowarstwowych luster Brewstera (nazwanego nazwiskiem fizyka, który odkrył tę technologię). **Lustro Brewstera** odpowiada za **polaryzację** spektrum elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia **BIOPTRON**. **Polaryzacja liniowa** przez odbicie, stosowana w Systemie Terapii **BIOPTRON** jest bardzo wydajna, a emitowane przez urządzenia BIOPTRON światło osiąga stopień polaryzacji **> 95%**.

Informacje:

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:
Lampa
Kategoria: Światłoterapia

Opcje produktu: