



ARTROMOT SP3 - szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego

Opis produktu:

Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego Artromot SP3.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zmotoryzowana szyna CPM ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu skokowego.

Wskazania:

- zabiegi na kościach, chrząstkach, ścięgnach i więzadłach
- plastyki mięśniowe
- wycięcia błony maziowej
- zespolenia kości z możliwością ćwiczeń
- rekonstrukcje stawu, rekonstrukcje ścięgien (Achillesa)
- stawy rzekome

- osteotomie
- artrotomie, artroskopie, synowektomie, artrolizy

Zalety:

- ruch fizjologiczny: dzięki w pełni zsynchronizowanym silnikom ARTROMOT-SP3 umożliwia ruchy:
- zgodne ze zgięciem grzbietowym i podeszwowym w górnym stawie skokowym
- odwrócenia i nawrócenia w dolnym stawie skokowym
- PNF (kombinacja w/w)
- uniwersalność: stosowanie na lewej i prawej kończynie dolnej
- pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy pilota z symbolami obrazkowymi
- karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta
- ergonomia: pełne dostosowanie do wymiarów anatomicznych pacjenta

Artromot SP3 może być stosowany w warunkach szpitalnych / ambulatoryjnych, w praktyce lekarza rodzinnego, a także indywidualnie w domu.

Zakresy ruchu

- Zgięcie podeszwowe / grzbietowe 50° / 0° / 40°
- Odwrócenie / nawrócenie (inwersja / ewersja) 40° / 0° / 20°

Dostępne modele:

Artromot SP3 standard	• Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 godz / tryb pracy ciągłej • Pauzy 0 - 59 sek • Regulacja prędkości 5 - 100 % • Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz. • Kontrola silników - włączenie / wyłączenie dla ruchów izolowanych • Tryb synchroniczny / asynchroniczny: synchroniczny - ruch prowadzony według wzorców PNF, asynchroniczny - losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu • Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń • Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych • Pozycja transportowa - przygotowanie do zapakowania i transportu • Blokada klawiatury - zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii • Menu dla serwisu
Artromot SP3 standard chip	• Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 godz / tryb pracy ciągłej • Pauzy 0 - 59 sek • Regulacja prędkości 5 - 100 % • Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz. • Kontrola silników - włączenie / wyłączenie dla ruchów izolowanych • Tryb synchroniczny / asynchroniczny: synchroniczny - ruch prowadzony według wzorców PNF, asynchroniczny - losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu

	• Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń • Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych • Pozycja transportowa - przygotowanie do zapakowania i transportu • Blokada klawiatury - zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii • Menu dla serwisu • Karty chipowe pacjenta - zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta w modelach standard chip i comfort chip
Artromot SP3 comfort	• Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 godz / tryb pracy ciągłej • Pauzy 0 - 59 sek • Regulacja prędkości 5 - 100 % • Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz. • Kontrola silników - włączenie / wyłączenie dla ruchów izolowanych • Tryb synchroniczny / asynchroniczny: synchroniczny - ruch prowadzony według wzorców PNF, asynchroniczny - losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu • Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń • Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych • Pozycja transportowa - przygotowanie do zapakowania i transportu • Blokada klawiatury - zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii • Menu dla serwisu • Program strechingu - delikatne i stopniowe poszerzanie zakresu ruchu oddzielnie dla zginania podszewowego, grzbietowego, inwersji, ewersji • Dokumentacja terapii - zapis wyników ćwiczeń w formie wykresów oddzielnie dla zginania podszewowego, grzbietowego, inwersji, ewersji • Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu • Program izolacji - separowane, naprzemienne ruchy zginania lub inwersji / ewersji
Artromot SP3 comfort chip	• Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 godz / tryb pracy ciągłej • Pauzy 0 - 59 sek • Regulacja prędkości 5 - 100 % • Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz. • Kontrola silników - włączenie / wyłączenie dla ruchów izolowanych • Tryb synchroniczny / asynchroniczny: synchroniczny - ruch prowadzony według wzorców PNF, asynchroniczny - losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu • Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń • Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych • Pozycja transportowa - przygotowanie do zapakowania i transportu • Blokada klawiatury - zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii • Menu dla serwisu

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Program stretchingu - delikatne i stopniowe poszerzanie zakresu ruchu oddzielnie dla zginania podszwowego, grzbietowego, inwersji, ewersji• Dokumentacja terapii - zapis wyników ćwiczeń w formie wykresów oddzielnie dla zginania podszwowego, grzbietowego, inwersji, ewersji• Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu• Program izolacji - separowane, naprzemienne ruchy zginania lub inwersji / ewersji• Karty chipowe pacjenta - zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta w modelach standard chip i comfort chip |
|--|--|

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model:

Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego Artromot SP3: SP3 standard, SP3 standard chip, SP3 comfort, SP3 comfort chip