



Mankiety chłodzące Cryo/Cuff

Opis produktu:

System **do krioterapii Cryo/Cuff** znajduje zastosowanie w zimnolecznictwie (terapii zimnem), wykazując dodatkowe działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe części ciała poddawanej terapii.

System **Cryo Cuff** posiada pozytywną **opinię** fizjoterapeutów i charakteryzuje się przystępną **ceną**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mankiety chłodzące Cryo/Cuff są niezastąpionym narzędziem pracy lekarzy medycyny

sportowej, rehabilitantów i fizykoterapeutów. Podłączane do **termosu** z zimną wodą i lodem **mankiety Cryo/Cuff** pozwalają na szybką i trwałą ulgę w bólu i zmniejszenie obrzęku w przypadku skręceń, zwichnięć, stanów zapalnych stawów i mięśni.

Dostępne mankiety chłodzące Cryo/Cuff:

- **mankiet na śródstopie (duży, obwód stopy 25-43 cm)**
- **mankiet na śródstopie (średni, obwód stopy 23-33 cm)**
- **mankiet na śródstopie (mały, obwód stopy 18-23 cm)**
- **mankiet chłodzący** - kolano S (**mały**, obwód uda 15 cm pow. rzepki **25-50 cm**)
- **mankiet chłodzący** - kolano M (**średni**, obwód uda 15 cm pow. rzepki **45-60 cm**)
- **mankiet chłodzący** - kolano L (**duży**, obwód uda 15 cm pow. rzepki **50-80 cm**)
- **mankiet chłodzący** - bark średni (**średni**, obwód klatki piersiowej **81-122 cm**)
- **mankiet chłodzący** - bark duży (**duży**, obwód klatki piersiowej **107-137 cm**)
- **mankiet chłodzący** - udo M (**średni**, obwód uda **45-58 cm**)
- **mankiet chłodzący** - udo L (**duży**, obwód uda **51-69 cm**)
- **mankiet chłodzący** - podudzie
- **mankiet chłodzący** - kręgosłup, biodro, żebra
- **mankiet chłodzący** - ręka, przedramię

System **Aircast** jest stosowany zarówno w warunkach domowych, **w rehabilitacji**, i **medycynie sportowej**. Istotą działania **Cryo Cuff** jest połączenie czynnika, jakim jest bezpieczny dla pacjenta **ucisk** (minimalizuje **krwiaki** i **obrzęk**) i zimna, działającego **przeciwbólowo**.

System Cryo Cuff to trzy współpracujące ze sobą elementy:

- **mankiet chłodzący** - dostępny w różnych rozmiarach i o różnym przeznaczeniu, zawierający **zimną wodę** pod ciśnieniem,
- **termos chłodzący** - ze zbiornikiem wody z lodem, pozwala na prowadzenie od 6 do 8 godzin **terapii**,
- **wąż** - łączy **mankiety chłodzące** z **termosem chłodzącym** i wymienia między nimi wodę z lodem.

Wszystkie elementy systemu są dostępne w osobnym zakupie.

Zasada działania

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest napełnienie **termosu** wodą z lodem i założenie **mankietu chłodzącego**. Unosząc napełniony **termos chłodzący** do góry powodujemy spłynięcie ochłodzonej wody do **mankietu** i wytworzenie w nim ciśnienia. Ucisk jest proporcjonalny do wysokości na jakiej znajduje się **termos** (40 cm daje ciśnienie ok. 30 mmHg). Wysokość uniesienia termosu zależy od wskazań lekarskich oraz rodzaju urazu. Ciśnienie należy zmniejszyć przy jakichkolwiek objawach dyskomfortu i cierpienia.

Po odłączeniu węża ciśnienie jest utrzymywane w **mankiecie chłodzącym**. Ciepło ciała pacjenta powoduje **ogrzanie wody** po mniej więcej **15-30 minutach**, ogrzaną wodę należy wpuścić z powrotem do **termosu**. **Ochłodzenie** wody trwa do **trzech minut**, po tym czasie **mankiet chłodzący** może ponownie zostać napełniony wodą. Kolejne wymiany wody należy powtarzać **co godzinę**.

Wskazania:

- urazy,

- ostre skręcenia,
- leczenie pooperacyjne,
- rehabilitacja.

Badania kliniczne:

W toku badań klinicznych wykazano, iż wczesne stosowanie systemu **Cryo/Cuff** firmy **Aircast** minimalizuje krwiaki i przyczynia się do **redukcji dolegliwości bólowych**. W opracowaniu opisującym **terapię bólu** po operacjach porównano stosowanie **Cryo/Cuff** z innymi metodami **krioterapii**. Pacjenci poddani terapii z wykorzystaniem **mankietów chłodzących Aircast** wymagali wyraźnie **niższych dawek środków przeciwbólowych**.

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Mankiety Cryo/Cuff: chłodzący - stopa (obejmujący kostkę), śródstopie (duży), śródstopie (średni), śródstopie (mały), chłodzący - kolano S, chłodzący - kolano M, chłodzący - kolano L, chłodzący - bark średni, chłodzący - bark duży, chłodzący - udo M, chłodzący - udo L, chłodzący - podudzie, chłodzący - kręgosłup, biodro, żebra, chłodzący - dłoń, przedramię