



ARTROMOT K1 - Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego

Opis produktu:

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji **stawu kolanowego i biodrowego**.

Wskazania:

- kontuzje i skręcenia stawów
- wszelkiego rodzaju artrotomie, przede wszystkim z jednoczesnym wycięciem błony maziowej
- zabiegi na miękkich częściach w pobliżu stawów
- operacje plastyczne na mięśniach
- wszelkie operacje rekonstrukcyjne z zespoleniem kości (z możliwością ćwiczeń)
- osteotomia korekcyjna
- wycięcia guzów zlokalizowanych w okolicach stawów
- odtworzenia operacyjne stawu łącznie z implantacjami endoprotez
- artroliza (uruchomienie zeszywniałego stawu)
- zasterzałe zapalenia stawów
- wycięcie łąkotki
- wycięcie rzepki

Zalety:

- fizjologiczny zakres ruchomości zgodny ze zginaniem i prostowaniem
- anatomiczne ustawienie: wyklucza przesunięcie punktu obrotowego stawu pacjenta przy wzrastającym zgięciu kolana
- uniwersalność: stosowanie na lewej i prawej kończynie dolnej, bez konieczności przebudowy
- pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy pilota z dużym wyświetlaczem z ikonami oraz intuicyjnym menu, dla wersji classic pilot z pokrętłami
- karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta (w wersji Standard Chip i Comfort Chip)

Artromot K1 może być stosowany w warunkach szpitalnych / ambulatoryjnych, w praktyce lekarza rodzinnego, a także indywidualnie w domu.

Dane techniczne:

Zakresy ruchu

- Dla stawu kolanowego wyprost/zgięcie kolana -10° - 0° - 120°
- Dla stawu biodrowego wyprost/zgięcie stawu biodrowego minimum 0° - 7° - 115°

Dostępne funkcje:

Artromot K1 classic Pilot z pokrętłami	• Pauzy (w wyproście i zgięciu) 0 - 59 sek / 1 - 59 min • Regulacja prędkości 5 - 100 % • Blokada przycisków sterownika - zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień
Artromot K1 standard	• Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 godz / tryb pracy ciągłej • Pauzy (w wyproście i zgięciu) 0 - 59 sek / 1 - 59 min • Autorewers przy oporze 1 - 25 poz. • Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu • Łączny czas terapii - sumuje poszczególne sesje ćwiczeń • Nowy pacjent - resetuje aparat do ustawień fabrycznych • Ustawienia transportowe - ustawia aparat do pozycji transportowej • Menu dla serwisu
Artromot K1 standard chip	• Karty chipowe pacjenta - do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia w modelach standard chip
Artromot K1 comfort	• Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu) - intensyfikacja ćwiczeń przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu • Streching (prostowania lub zginania) - delikatne poszerzanie zakresu ruchu • Dokumentacja terapii - wykres przyrostu osiągnięć pacjenta • Programy rozgrzewki - stopniowe osiągnięcie ustawionego maksymalnego zakresu • Elektrostymulacja - synchronizacja z urządzeniem do elektrycznej stymulacji mięśni • Program workout - sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji Comfort

	• Program comfort - przygotowanie pacjenta do ćwiczeń po dłuższej przerwie między sesjami
Artromot K1 comfort chip	• Karty chipowe pacjenta - do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia w modelach comfort chip

Parametry:

- Masa 11 kg
- Wymiary 97 x 36 x 23 cm
- Wzrost pacjenta 120 – 200 cm

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model:

Szyna CPM Artromot K1: K1 classic, K1 standard, K1 standard chip, K1 comfort, K1 comfort chip