



System trans waginalny Advantage

Opis produktu:

Przezpochwowy, **podcewkowy system podwieszania Advantage**. Przeznaczony do leczenia problemów z nietrzymaniem moczu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przezpochwowy, podcewkowy **system podwieszania Advantage** jest przeznaczony do wszczepiania taśmy podcewkowej w celu leczenia zaburzeń związanych z nietrzymaniem moczu. **System Advantage** to innowacyjny, przezzastłonowy system podcewkowy oferujący kilka nowoczesnych rozwiązań dotyczących implantacji oraz uzyskiwania odpowiedniego napięcia, z których każde zostało stworzone tak, aby spełnić wszystkie potrzeby lekarza.

Urządzenie wprowadzające:

- Antypoślizgowa rączka zapobiegająca ześlizgiwaniu się dłoni podczas czynności śródoperacyjnych.
- Ergonomiczna rączka bez trudu dopasowuje się do dłoni operatora, tym samym umożliwiając używanie urządzenia zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne.
- Twarda powierzchnia tylnej krawędzi przekazuje impulsy dotykowe z końcówki dystalnej do dłoni operatora wskazując, iż urządzenie weszło w kontakt z twardą powierzchnią, np. kością.
- Rozszerza przewód rozwieracza na około 2 / 3 cm przed końcówką dystalną igły, co daje użytkownikowi odpowiednią przestrzeń do zaciśnięcia przewodu.
- Aktywator jest przeznaczony w szczególności do przeprowadzenia zabiegu wszczepienia

urządzenia Advantage posługując się jedną ręką.

Języczek wyśrodkujący:

- Niebieski języczek wyśrodkujący wskazuje środek siatki oraz zapewnia równomierne jej rozłożenie po obu stronach cewki.
- Umożliwia skierowanie całego kontr napięcia na rękaw w celu zachowania integralności siatki.
- Języczek jest bardzo łatwy w obsłudze. Można go bez trudu chwycić jednocześnie zapewniając bezpieczny chwyt rękawa.

Prawidłowe zakładanie siatki

- Siatka porusza się w obrębie rękawa ochronnego.
- Niezwykle gładkie połączenie z przewodem rozwieracza pozwala na bezszwowe przejście bez konieczności zaczepiania o tkanki.

Procedura implantacji taśmy Advantage

Po przygotowaniu niższych partii jamy brzusznej oraz pochwy, na których ma zostać przeprowadzony zabieg, wykonaj dwa małe poprzeczne nacięcia, mające od 0,5 do 1 cm po obu stronach linii centrującej tuż poniżej spojenia. Natnij przednią ścianę pochwy, a następnie obustronnie ją wyizoluj w standardowy sposób.	Opierając końcówkę igły o palec wskazujący od strony dłoni, delikatnie wsuń urządzenie mocujące w sposób przednioboczny w przestrzeń przycewkową, a następnie przebij powieź wewnątrzmiędniczną. Ostrożnie wsuń urządzenie mocujące przez przestrzeń Retziusa, a następnie przebij mięsień prosty wraz z jego pochewką. Nawiguj urządzeniem poprzez palpację wprowadzając je w nacięcie w jamie brzusznej znajdujące się po tej samej stronie do momentu gdy końcówka igły przejdzie przez to nacięcie.
Gdy końcówka igły/ rozwieracz przewodu sięgnie poza jamę brzuszną, wciśnij przycisk znajdujący się na rączce przewodu, spowoduje to przesunięcie się przewodu rozwieracza poza końcówkę igły. Chwyc rozwieracz umieszczając zacisk lub kleszczyki hemostatyczne na jego otwartym końcu. Ponad to, w celu zabezpieczenia jego pozycji poza jamą brzuszną, usuń igłę z jego wnętrza, wyjmując ją z rozwieracza oraz pochwy. Przewód rozwieracza/ urządzenie służące do umocowania siatki powinny pozostać na miejscu. Powtórz wszystkie wyżej opisane czynności po drugiej stronie. Po ich wykonaniu oba przewody rozwieracza powinny znajdować się we właściwych miejscach. W tym punkcie należy wykonać cystoskopię.	Napnij siatkę pociągając ją w górę na obu rozszerzaczach w taki sposób aby wyciek moczu został zmniejszony do dwóch lub trzech kropel. Po osiągnięciu odpowiedniego napięcia, chwyc niebieski języczek wyśrodkujący i przetnij go wzdłuż głównej linii. Upewnij się, że obie połowy języczka zostały usunięte.

Usuń rękaw ochronny pociągając go w górę za oba rozszerzacze jednocześnie, a następnie sprawdź napięcie siatki i w razie konieczności je wyreguluj.

Po osiągnięciu pożądanego napięcia delikatnie uciśnij jamę brzuszną, natnij dystalne końce siatki i sprawdź czy końce chowają się do nacięć. Zamknij nacięcia stosując klasyczne metody.

Informacje dotyczące składania zamówień

Numer katalogowy	Opis
M0068502000	System podwieszania Advantage (1 urządzenie mocujące oraz 1 siatka)
M0068502020	1 System podwieszania Advantage + 1 retraktor dopochwowy Vagitract™ + 1 osłonka miednicy Single Step™
M0068502030	1 system podwieszania Advantage + 1 osłonka miednicy Single Step™
M0068502040	1 System podwieszania Advantage + 1 retraktor dopochwowy Vagitract™

Informacje:

Systemy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu: System trans waginalny

Opcje produktu: