



## Siatka waginalna Upsilon



### Opis produktu:

**Siatka Upsilon™ w kształcie litery Y** z urządzeniem do pozycjonowania pochwy Colpassist™. To znacznie więcej niż lekka siatka. To łatwość wprowadzania i mocowania.

### Zdjęcia produktu:

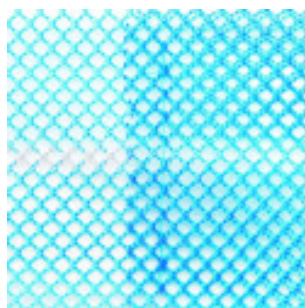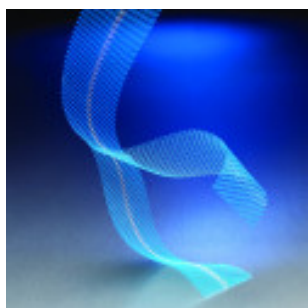

### Szczegółowy opis produktu:

**Siatka Upsilon w kształcie litery Y** charakteryzuje się lekką wagą, technologią zmniejszonej powierzchni w celu zredukowania kontaktu siatki ze ścianą pochwy. Cechy ułatwiające stosowanie siatki takie jak: duże pory oraz niebieski kolor zostały stworzone aby ułatwić wprowadzanie oraz mocowanie w celu wygodniejszej implantacji.

Porównanie z Siatką Restorelle w kształcie litery Y oraz 13-wiązaniową metodą szycia.

| Siła mocowania siatki (średnia) |          |        |
|---------------------------------|----------|--------|
| <b>Upsilon™ Y-Mesh n=30</b>     | 23.2 lbs | 103.2N |
| <b>Restorelle™ Y Mesh n=9</b>   | 16.5 lbs | 73.4N  |

[img-10580-left-large\_default]

- Cechy charakterystyczne siatki zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilności wprowadzania i mocowania.
- Niebieski kolor siatki stworzony w celu poprawienia widoczności siatki na tle tkanek.

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Upsilon™ Y-Mesh (BSC) | Restorelle™ Y Mesh | Alyte™ Y-MeshGraft (Sacral) | Alyte Y-MeshGraft (Vaginal) | Artisyn™ Y-Shaped Mesh | IntePro™ Y Graft           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Waga siatki (g/m2)                                                                                                                                                                                                                                   | 25                    | 20                 | 33.5                        | 16.5                        | 28*                    | 52                         |
| Rozmiar porów (mm2)                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8                   | 3.0                | 2.9***                      | 2.9***                      | 3.9**                  | Major: 6.9***Minor: 3.4*** |
| Średnica włókien (microns)                                                                                                                                                                                                                           | 100                   | 75                 | 90                          | 90                          | 100                    | 100                        |
| Długość włókien (cm/cm2)                                                                                                                                                                                                                             | 35.4                  | 48.7               | 58.5                        | 28.8                        | 39.6                   | 73.6                       |
| Stosunek powierzchni                                                                                                                                                                                                                                 | 1.11                  | 1.17               | 1.65                        | 0.81                        | 1.24*                  | 2.31                       |
| Grubość (microns)                                                                                                                                                                                                                                    | 200                   | 305                | 377                         | 287                         | 533                    | 527                        |
| Sprężystość (ASTM standard - 4032), sztywność (N)                                                                                                                                                                                                    | 0.53                  | 0.11               | -                           | 0.15                        | 0.71**                 | -                          |
| Wymowanie szwów (kierunek urządzenia), siła (n)                                                                                                                                                                                                      | 18.3                  | 11.5               | 18.3                        | 8.8                         | 13.5                   | 23.3                       |
| Kolor siatki                                                                                                                                                                                                                                         | Niebieski / naturalny | Naturalny          | Naturalny                   | Naturalny                   | Naturalny              | Naturalny                  |
| Dane będące własnością Boston Scientific, pochodzące z prób laboratoryjnych. Wyniki prób laboratoryjnych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste działanie kliniczne.*po rozpuszczeniu, ** przed rozpuszczeniem, *** obejmuje krzyżowanie się włókien |                       |                    |                             |                             |                        |                            |

### Urządzenie do podwieszania pochwy Colpassist™

Urządzenie do pozycjonowania pochwy Colpassist™ jest pierwszym urządzeniem tego typu stworzonym z myślą o przeprowadzaniu zabiegów ginekologicznych mających na celu podwieszenie pochwy oraz wykorzystanie go jako platformy szyjącej do unieruchamiania ściany pochwy podczas sakrokolpopexsjii.

- Dwa rozmiary końców sprawiają, iż powierzchnia przeznaczona pod szwy jest całkowicie płaska.
- Możliwość Wielokierunkowej manipulacji w Obrębie pochwy podczas izolowania jej części oraz Umiejscawiania siatki.

[img-10579-left-large\_default]

## Siatka waginalna Upsilon

### Informacje:

### Opcje produktu: